

ADAPTIC™

NON-ADHERING DRESSING

Protects the wound
**minimises pain and
maceration**

疼痛と浸軟を軽減し、創傷を保護



アダプティック®について

アダプティック®はアセテート繊維メッシュに独自のワセリンを含浸させた非固着性ドレッシング材です。



着脱を容易に行うことにより疼痛を軽減

アダプティック®のユニークなアセテート繊維は、創部の再生組織にも固着しにくく、交換時の二次損傷防止に寄与します¹。



浸軟と固着を軽減


アダプティック®の小孔のサイズについて

- ・滲出液などをスムーズに透過させ、二次固定の吸収性ドレッシング材の機能を妨げないため、滲出液の貯留、創周囲の浸軟防止が期待できます。
- ・創面、および二次ドレッシング材への固着を防止します¹。

使用方法


創部に合ったサイズのアダプティック®を選択します。
創周囲の健常皮膚が乾いていることを確認します。

貼付方法

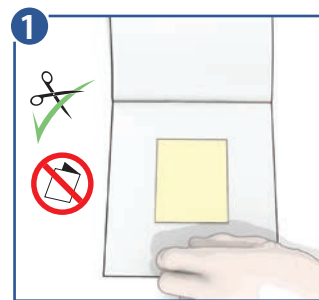

1 小さな創に使用する場合など、必要に応じてアダプティック®を滅菌済の剪刀でカットします。

貼付方法

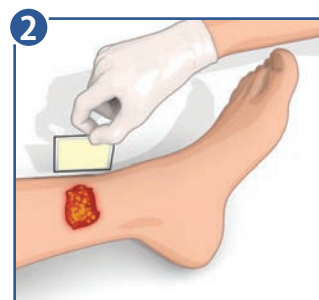

1. 鑷子、鉗子などを用いてアダプティック®を直接創部に貼付します。
2. アダプティック®を複数枚使用する場合は、ドレッシング材の一部が重なるよう貼付することにより、二次ドレッシング材への固着を低減します。
3. 上記の場合、アダプティック®を重ねて貼付する面積をなるべく小さくすることにより、小孔の閉塞が少なくなり、滲出液の透過を妨げにくくなります。

二次ドレッシング材貼付方法



アダプティック®をティエール®などの二次ドレッシング材で被覆してください。二次ドレッシング材は滲出液の量に応じて選択してください。

必要に応じて、テープや包帯などで保護・固定してください。

交換について



創傷の状態、滲出液の量に応じて交換頻度を決定してください。

販売名: アダプティックドレッシング
管理医療機器: 非固着性創傷被覆・保護材
医療機器認証番号:
225ADBZ100114000
JMDNコード: 11325000
滅菌方法: ガンマ線滅菌

【使用目的、効能又は効果】
創部の保護及び固着防止に用いること。

【保険適用】
非固着性シリコンガーゼ
(アダプティックドレッシング)
(1) 広範囲熱傷用 (2) 平坦部位用
保険請求: 償還価格による。
*再使用禁止
*再滅菌禁止
使用上の注意などは添付文書をご参照ください。

選任製造販売元

ケーシーアイ株式会社 <http://www.kcij.com>

NOTE: Specific indications, contraindications, warnings, precautions and safety information exist for these products and therapies. Please consult a clinician and product instructions for use prior to application. This material is intended for healthcare professionals.

©Copyright 2020 3M. All Rights Reserved. 3M and the other marks shown are marks and / or registered marks. Unauthorized use prohibited. PRA-PM-JP-00095 (07/20) 2020年7月作成 ®はKCIの登録商標です。


使用目的又は効果

非固着性ドレッシング材アダプティック®は、滲出液の量にかかわらず、以下のような創傷に適応となります。

- I度およびII度の熱傷
- 裂傷、擦過創
- 植皮部
- 静脈うっ滞性潰瘍
- 褥瘡
- 抜爪を行った創
- 皮膚炎
- 縫合創
- 術後創傷



圧迫療法との併用に適しています²。

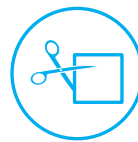

非固着性ドレッシング材アダプティック®は、創傷のサイズに合わせてカットする際に、ほつれ、裂けが少なくカットすることが可能です。

疼痛の軽減

手の術後創傷を対象とした多施設ランダム化比較試験において、非固着性ドレッシング材アダプティック®は、交換が容易で、被験者の75%が疼痛を感じることなく交換が可能でした。

アダプティック®ドレッシング

製品番号	サイズ	入り数/箱
2012JP	7.6cm x 7.6cm	50 枚
2013JP	7.6cm x 20.3cm	36 パック*
2014JP	7.6cm x 40.6cm	36 枚
2015JP	7.6cm x 20.3cm	24 枚
2018JP	7.6cm x 152.4cm	10 巻
2019JP	12.7cm x 22.9cm	12 枚

* 品番2013JPは、1/パック3枚入りとなります。

References

1. Terrill, P.J., and Varughese, G. A comparison of three primary non-adherent dressings applied to hand surgery wounds. *J Wound Care*. 2000; 9:359-363.
2. Vin, F. et al. The healing properties of Promogran in venous leg ulcers. *J. Wound Care* 2002; 11(9):335-41.

3M + **KCI**