



Prevena™

Incision Therapy

3M™ Prevena™ 125 Therapieeinheit Anzeigen und Alarmer



Warnanzeige



Akustischer Alarm (stumm)

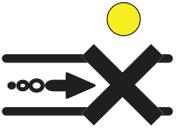
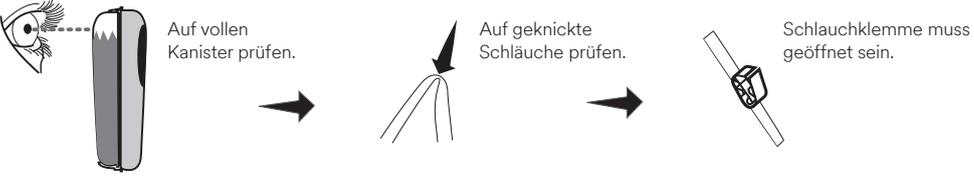
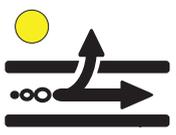
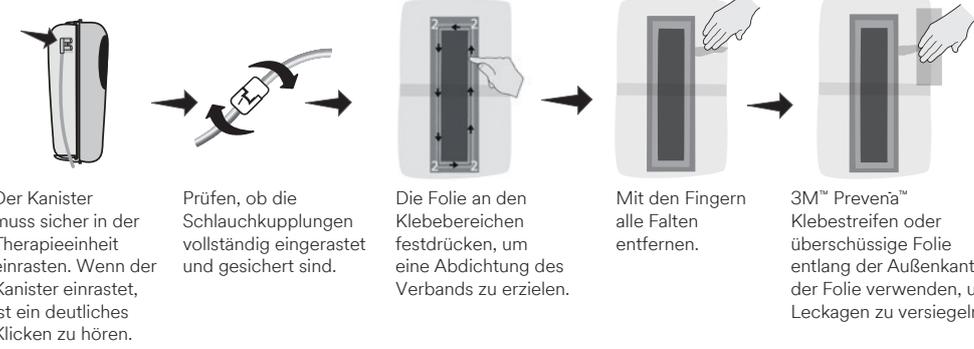
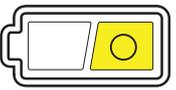
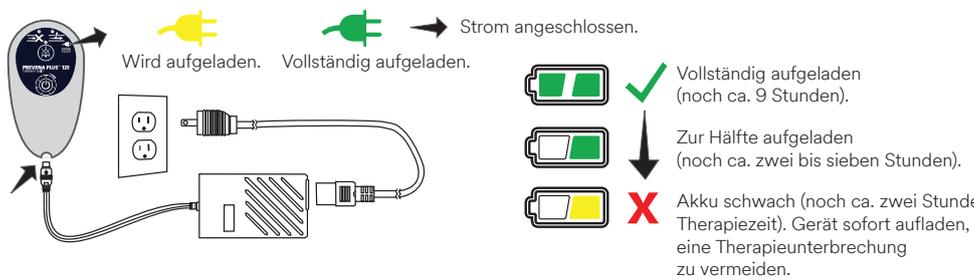


Akkuladestand

Dies ist eine Kurzanleitung. Weitere Informationen finden Sie im Anwenderhandbuch zur 3M™ Prevena™ Therapie.

Alarmtyp	Behebung
<p>Leckagealarm</p> <p>Ein Alarmton und eine konstant leuchtende LED.</p> 	<p>Um die korrekte Anlage des 3M™ Prevena™ Dressings sicherzustellen, verfügt die Prevena 125 Therapieeinheit über die Visicheck™ Funktion. Drücken Sie zweimal auf die EIN/AUS-Taste.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Eine LED: Optimal ▶ Zwei LEDs: Gut ▶ Drei LEDs: Grenzwertig <p>Wenn die Visicheck™ Funktion eine „grenzwertige“ Leckagerate anzeigt, gehen Sie wie folgt vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen, ob Kanister richtig arretiert ist. ▶ Überprüfen, ob die Schlauchkupplungen vollständig eingerastet und gesichert sind, um sicherzustellen, dass sie vollständig verbunden und arretiert sind. ▶ Falten mit den Fingern am Rand glattstreichen. ▶ Leckagen mit Prevena Folienstreifen abdichten (im Dressing Kit enthalten). ▶ Langsam und fest den Verbandsrand andrücken.
<p>Kanister voll</p> <p>Zwei Alarmtöne und eine konstant leuchtende gelbe LED.</p> 	<p>Flüssigkeitsstand im Kanister prüfen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn der Kanister voll ist Gerät ausschalten und Kanister wechseln. 2. Wenn der Kanister nicht voll ist, prüfen Sie, ob der Schlauch geknickt oder eingeklemmt ist. 3. Wenn bei der Therapie immer noch eine Warnung ausgegeben wird, kontaktieren Sie Ihren 3M Ansprechpartner.
<p>Akku schwach</p> <p>Option 1: Akku schwach – ein langsamer Alarmton, eine konstant gelb leuchtende LED.</p> <p>Option 2: Akku kritisch – ein Alarmton, schnell wiederholend mit zunehmender Lautstärke, zwei durchgehend gelb leuchtende LEDs.</p> 	<p>Diese Therapieeinheit verfügt über drei AA-Akkus.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zum Ausschalten fünf Sekunden gedrückt halten. 2. Die Abdeckung auf der Rückseite der Einheit drücken und schieben, um sie zu öffnen. 3. Drei AA-Akkus einlegen (Lithium-Akkus empfohlen). 4. Drücken und schieben, um die Abdeckung zu schließen. 5. Zum Einschalten die EIN-/AUS-Taste zwei Sekunden gedrückt halten.
<p>Systemfehler</p> <p>Ein Alarmton, schnell wiederholend mit zunehmender Lautstärke, zwei durchgehend gelb leuchtende LEDs.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zum Ausschalten die EIN-/AUS-Taste fünf Sekunden gedrückt halten. 2. Zum erneuten Einschalten die EIN-/AUS-Taste zwei Sekunden gedrückt halten. 3. Wenn die Therapie immer noch nicht startet, rufen Sie Ihren 3M Ansprechpartner an.
<p>Lebenszyklus des Produkts abgelaufen</p> <p>Drei LEDs zeigen an, dass der Lebenszyklus abgelaufen ist. Es ertönt 15 Sekunden lang ein wiederholter Alarmton, dann schaltet sich das Gerät aus.</p> 	<p>Der Lebenszyklus der Prevena 125 Therapieeinheit beträgt 192 Stunden (acht Tage).</p> <p>Informieren Sie den behandelnden Arzt oder das Pflegepersonal über den Abschluss der Therapie.</p>

3M™ Prevena™ Plus 125 Therapieeinheit Anzeigen und Alarmer

Alarmtyp	Behebung
<p>Blockadealarm</p>  <p>Der akustische Blockadealarm besteht aus zwei Alarmtönen, die alle 15 Sekunden wiederholt werden.</p>	 <p>Auf vollen Kanister prüfen.</p> <p>Auf geknickte Schläuche prüfen.</p> <p>Schlauchklemme muss geöffnet sein.</p>
<p>Leckagealarm</p>  <p>Der Leckagealarm besteht aus zwei Alarmtönen, die alle 15 Sekunden wiederholt werden.</p>	 <p>Der Kanister muss sicher in der Therapieeinheit einrasten. Wenn der Kanister einrastet, ist ein deutliches Klicken zu hören.</p> <p>Prüfen, ob die Schlauchkupplungen vollständig eingerastet und gesichert sind.</p> <p>Die Folie an den Klebereichen festdrücken, um eine Abdichtung des Verbands zu erzielen.</p> <p>Mit den Fingern alle Falten entfernen.</p> <p>3M™ Prevena™ Klebestreifen oder überschüssige Folie entlang der Außenkante der Folie verwenden, um Leckagen zu versiegeln.</p>
<p>Akku schwach</p>  <p>Der Alarm besteht aus zwei Alarmtönen, die sich alle vier Minuten wiederholen.</p>	 <p>Wird aufgeladen. Vollständig aufgeladen. Strom angeschlossen.</p> <p>Vollständig aufgeladen (noch ca. 9 Stunden).</p> <p>Zur Hälfte aufgeladen (noch ca. zwei bis sieben Stunden).</p> <p>Akku schwach (noch ca. zwei Stunden Therapiezeit). Gerät sofort aufladen, um eine Therapieunterbrechung zu vermeiden.</p>
<p>Systemfehler</p>  <p>Alle LEDs blinken und im 15-Sekunden-Takt ertönen Alarmtöne.</p> <p>PREVENA PLUS™ 125 THERAPY UNIT</p> 	<p>Schalten Sie die Therapieeinheit aus und wieder ein.</p>  <p>Aus Ein</p> <p>Therapie fortsetzen.</p> <p>Rufen Sie Ihren 3M Ansprechpartner an.</p>
<p>Taste zum Stummschalten des Alarms</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Die Taste zum Stummschalten des Alarms während der Alarmsituation drei Sekunden lang mittig gedrückt halten, um das akustische Alarmsignal zwei Minuten lang abzustellen. Wenn die Taste zur Stummschaltung des Alarms gedrückt wird, zeigt sie durch Aufleuchten an, dass sie aktiviert ist. Der Alarm wird nach zwei Minuten erneut ausgelöst, sofern die Alarmursache nicht behoben wurde.
<p>Therapie beendet</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Oberhalb der Betriebsanzeige beginnt eine LED ständig gelb zu leuchten. Die Therapieeinheit gibt acht Alarmtöne aus, gefolgt von einem kontinuierlichen Alarmton für fünf Sekunden. Danach schaltet sich die Therapieeinheit aus. Wenn die Therapieeinheit ihren Zyklus abgeschlossen hat und versucht wird, die Therapieeinheit wieder einzuschalten, ertönt drei Sekunden lang ein Alarm. Anschließend schaltet sich die Therapieeinheit aus. Informieren Sie den behandelnden Arzt oder das Pflegepersonal über den Abschluss der Therapie.

Hinweis: Bitte beachten Sie die für diese Produkte und Therapien geltenden Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsinformationen. Bitte ziehen Sie vor der Anwendung einen Arzt zurate und lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts. Dieses Material ist für medizinisches Fachpersonal bestimmt.

3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Tel +49 (0) 800 7833 524
VAC-kundenservice@mmm.com
www.3M.de/medicalsolutions

3M Österreich GmbH
Health Care Business
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel +43 (0) 186 330 500
VAC-kundenservice@mmm.com
www.3MAustria.at/medicalsolutions

3M (Schweiz) GmbH
Health Care Business
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
Tel +41 (0) 848 848 900
PostmasterCH@mmm.com
www.3MSchweiz.ch/medicalsolutions

EB12-0240/2022-2bbe0a68a993
© 3M 2022. 3M, Prevena und Visicheck sind eingetragene Marken oder Warenzeichen der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten.
OMG440445.

