

# PREVENA™

SISTEMA DI GESTIONE DELLE INCISIONI

## Indicatori e allarmi dell'unità terapeutica PREVENA™ 125



Indicatore di attenzione

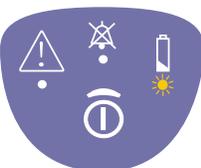
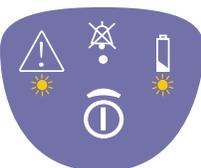
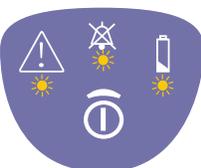


Allarme acustico (silenziato)

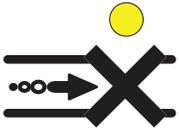
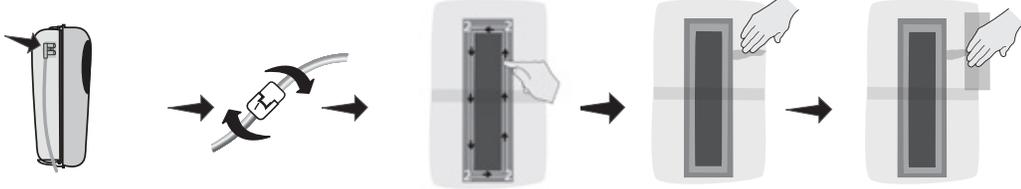
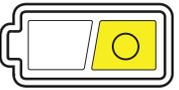
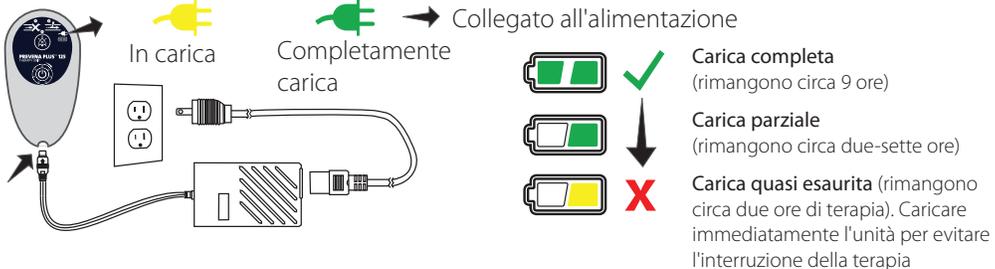
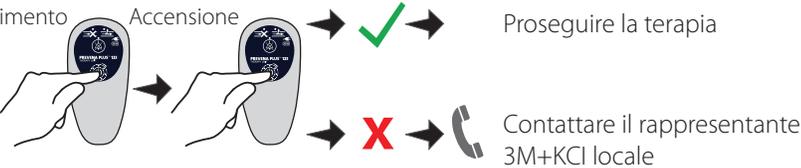


Livello della batteria

Questa è una guida rapida, per ulteriori dettagli consultare la Guida per i medici del sistema PREVENA™

Tipo di allarme	Come risolvere il problema
<p><b>Allarme perdita</b> Un segnale acustico, una luce gialla fissa</p> 	<p>Per garantire una corretta applicazione della medicazione per incisioni PREVENA™, l'unità terapeutica PREVENA™ 125 è dotata della funzione VISICHECK™. Premere due volte il pulsante di accensione/spengimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una spia: ottimale</li> <li>- Due spie: buona</li> <li>- Tre spie: marginale</li> </ul> <p>Se la funzione VISICHECK™ segnala una perdita di entità "Marginale", eseguire le operazioni elencate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assicurarsi che il contenitore sia bloccato all'interno dell'unità</li> <li>- Verificare che i connettori dei tubi siano completamente inseriti e bloccati</li> <li>- Spianare con le dita eventuali increspature presenti nell'adesivo</li> <li>- Utilizzare le strisce adesive PREVENA™ (presenti nella confezione della medicazione) per sigillare le perdite intorno alla medicazione</li> <li>- Premere con cura intorno ai bordi della medicazione</li> </ul>
<p><b>Allarme di contenitore dei fluidi pieno</b> Due segnali acustici, una luce gialla fissa</p> 	<p>Controllare il livello dei fluidi nel contenitore.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se il contenitore non è pieno, verificare che il tubo non sia attorcigliato o strozzato</li> <li>2. Se il contenitore è pieno, spegnere l'unità terapeutica</li> <li>3. Contattare il rappresentante 3M+KCI locale</li> </ol>
<p><b>Allarme di batteria scarica</b> Bassa: un segnale acustico lento, una spia gialla fissa Esaurita: un segnale acustico ripetuto rapidamente con volume crescente, due spie gialle fisse</p> 	<p>Questa unità terapeutica viene fornita con tre batterie AA.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenere premuto per cinque secondi per spegnere l'unità</li> <li>2. Premere e spingere avanti il pannello sul retro dell'unità per aprire il vano batterie</li> <li>3. Inserire tre batterie AA (si consiglia di utilizzare batterie al litio)</li> <li>4. Premere e spingere per chiudere il pannello</li> <li>5. Tenere premuto per due secondi per accendere l'unità</li> </ol>
<p><b>Allarme di errore di sistema</b> Un segnale acustico che viene ripetuto rapidamente e che aumenta di volume, due luci gialle fisse</p> 	<p>Ripristinare l'unità terapeutica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenere premuto per cinque secondi per spegnere l'unità</li> <li>2. Tenere premuto per due secondi per riaccendere l'unità</li> <li>3. Se l'unità terapeutica continua a non funzionare, contattare il rappresentante 3M+KCI locale</li> </ol>
<p><b>Fine del ciclo di vita del dispositivo</b> Tre luci indicano il termine del ciclo di vita del dispositivo. L'unità si spegnerà dopo un segnale acustico ripetuto per 15 secondi</p> 	<p>Contattare il rappresentante 3M+KCI locale</p> <p>Ciclo di vita = 192 ore (otto giorni)</p>

# Indicatori e allarmi dell'unità terapeutica PREVENA PLUS™ 125

Tipo di allarme	Come risolvere il problema
<p><b>Allarme di blocco</b></p>  <p>L'allarme acustico di blocco è costituito da due segnali acustici che si ripetono ogni 15 secondi</p>	 <p>Verificare che il contenitore non sia pieno</p> <p>Verificare che il tubo non sia piegato</p> <p>Accertarsi che il morsetto del tubo sia aperto</p>
<p><b>Allarme perdita</b></p>  <p>L'allarme di perdita è costituito da due segnali acustici che si ripetono ogni 15 secondi</p>	 <p>Verificare che il contenitore dei fluidi sia saldamente installato sull'unità terapeutica. Quando si installa il contenitore, è possibile udire il suono di uno scatto che indica l'avvenuta installazione</p> <p>Verificare che i connettori dei tubi siano completamente inseriti e bloccati</p> <p>Premere la pellicola per tutta la lunghezza della tenuta adesiva per assicurare che aderisca</p> <p>Utilizzare le dita per spianare eventuali increspature o grinze</p> <p>Utilizzare le strisce adesive PREVENA™ o la pellicola in eccesso lungo il bordo esterno della pellicola per sigillare eventuali perdite</p>
<p><b>Allarme di batteria scarica</b></p>  <p>L'allarme è costituito da due segnali acustici che si ripetono ogni quattro minuti</p>	 <p>In carica</p> <p>Completamente carica</p> <p>Collegato all'alimentazione</p> <p><b>Carica completa</b> (rimangono circa 9 ore)</p> <p><b>Carica parziale</b> (rimangono circa due-sette ore)</p> <p><b>Carica quasi esaurita</b> (rimangono circa due ore di terapia). Caricare immediatamente l'unità per evitare l'interruzione della terapia</p>
<p><b>Allarme di errore di sistema</b></p>  <p>Tutti i LED lampeggianti e due segnali acustici ripetuti ogni 15 secondi</p> <p>PREVENA PLUS™ 125 THERAPY UNIT</p>	<p>Spegnere e riaccendere l'unità terapeutica</p>  <p>Spegnimento</p> <p>Accensione</p> <p>Proseguire la terapia</p> <p>Contattare il rappresentante 3M+KCI locale</p>
<p><b>Pulsante di silenziamento allarme</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tenere premuta la parte centrale del pulsante di silenziamento allarme per tre secondi per silenziare l'allarme acustico per due minuti mentre la condizione che l'ha generato è in corso</li> <li>Quando viene premuto, il pulsante di silenziamento allarme si illumina per indicare che è stata selezionata la modalità di silenziamento</li> <li>L'avviso si riattiva dopo due minuti, a meno che la condizione che l'ha generato non sia stata risolta</li> </ul>
<p><b>Fine terapia</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si illumina un LED giallo fisso sopra l'indicatore di durata della terapia</li> <li>L'unità terapeutica emetterà otto segnali acustici seguiti da un segnale continuo per cinque secondi, dopo i quali si spegnerà</li> <li>Se si tenta di accendere un'unità terapeutica che ha terminato il ciclo della terapia, viene emesso un allarme acustico per tre secondi, quindi l'unità si spegne</li> <li>Comunicare la fine della terapia al medico curante o all'operatore sanitario</li> </ul>

NOTA: sono disponibili indicazioni, avvertenze, controindicazioni, precauzioni e informazioni sulla sicurezza per i prodotti e le terapie KCI. Prima dell'applicazione, consultare un medico e le istruzioni per l'uso del prodotto. Questo materiale è destinato a professionisti sanitari.

©Copyright 2020 3M. Tutti i diritti riservati. 3M e gli altri marchi riportati sono marchi e/o marchi registrati. È vietato l'uso non autorizzato. PRA-PM-IT-00056 (06/20)

**3M + KCI**