

# Handleiding voor het aanbrengen en verwijderen van 3M™ Tegaderm™ Absorberend transparant acrylverband



Raadpleeg de gebruiksinstructies voor volledige informatie over het gebruik van Tegaderm Absorberend transparant acrylverband.

## Instructies voor toepassing op de buik

### Voor het aanbrengen

- 1 **Reinig** de chirurgische incisie en de huid eromheen nauwkeurig. Laat de omliggende huid drogen voordat u het verband aanbrengt.
- 2 **Controleer** de chirurgische incisie en kies de juiste maat verband. Het verbandkussen moet 1 cm ruimer zijn dan de lengte van de incisie. Het is niet de bedoeling in het acrylkussen te knippen.

Opmerking: volg de infectiepreventierichtlijn binnen uw instelling.



### Aanbrengen van het verband



**1** Open de verpakking en haal het steriele verband eruit. **Verwijder de bescherm laag** van het verband, zodat de kleeflaag vrijkomt.



**2** Positioneer en centreer het verband over de incisie met de kleeflaag naar beneden.



**3** Druk het verband zachtjes op zijn plaats, strijk het glad vanuit het midden naar buiten.



**4** Verwijder langzaam het frame terwijl u de filmrand met stevige druk gladstrijkt. **Rek het verband niet uit op de huid.**



**5** Maak het verband passend en glad door de randen voorzichtig aan te drukken voor optimale hechting.

### Tip

Tijdens gebruik is het normaal dat er vloeistof wordt geabsorbeerd door het gehele wondkussen. Vocht aan de randen van het kussen **betekent niet dat het verband moet worden vervangen**. Het verband moet worden vervangen naar oordeel van de zorgprofessional.

### Verwijderen van het verband

Houd er rekening mee dat wondsluitingstrips waarschijnlijk ook worden verwijderd wanneer het 3M™ Tegaderm™ Absorberend transparant acrylverband wordt verwijderd.

- 1 **Maak de randen van de film voorzichtig los** van de huid.
- 2 Ga door met het losmaken van de film **totdat alle randen vrij zijn** van het huidoppervlak.
- 3 **Verwijder laag en traag het verband, door het langzaam over zichzelf heen te vouwen** (180 graden).



Neem voor meer informatie contact op met uw 3M productspecialist of ga naar [3M.nl/medical](http://3M.nl/medical) of [3M.be/medical](http://3M.be/medical)