

Handleiding voor het aanbrengen en verwijderen van 3M™ Tegaderm™ Absorberend transparant acrylverband



Raadpleeg de gebruiksinstructies voor volledige informatie over het gebruik van Tegaderm Absorberend transparant acrylverband.

Instructies voor toepassing op de knie

Voor het aanbrengen

- 1 **Reinig** de chirurgische incisie en de huid eromheen nauwkeurig. Laat de omliggende huid drogen voordat u het verband aanbrengt.
- 2 **Controleer** de chirurgische incisie en kies de juiste maat verband. Het verbandkussen moet 1 cm ruimer zijn dan uw incisie. Het is niet de bedoeling om in het acrylkussen te knippen.

Opmerking: volg de infectiepreventierichtlijn van uw instelling.

Aanbrengen van het verband



1 Open de verpakking en haal het steriele verband eruit. Verwijder de bescherm laag van het verband, zodat de kleeflaag vrijkomt.



2 Positioneer en centreer het verband over de incisie met de kleeflaag naar beneden. Let op: de knie moet hierbij in flexie zijn.



3 Druk het verband zachtjes op zijn plaats, strijk het glad vanuit het midden naar buiten.



4 Verwijder langzaam het frame terwijl u de filmrand met stevige druk gladstrijkt. Rek het verband niet uit op de huid.



5 Maak het verband passend en glad door de randen voorzichtig aan te drukken voor optimale hechting.

Tip

Tijdens gebruik is het normaal dat er vloeistof wordt geabsorbeerd door het gehele wondkussen. Vocht aan de randen van het kussen **betekent niet dat het verband moet worden vervangen**. Het verband moet worden vervangen naar oordeel van de zorgprofessional.

Verwijderen van het verband

Houd er rekening mee dat wondsluitingstrips waarschijnlijk ook worden verwijderd wanneer het 3M™ Tegaderm™ Absorberend transparant acrylverband wordt verwijderd.

- 1 **Maak de randen van de film voorzichtig los** van de huid.
- 2 Ga door met het losmaken van de film **totdat alle randen vrij zijn** van het huidoppervlak.
- 3 **Verwijder laag en traag het verband**, door het langzaam over zichzelf heen te vouwen (180 graden).



Neem voor meer informatie contact op met uw 3M productspecialist of ga naar 3M.nl/medical of 3M.be/medical