



Attest™

Sterilization Solutions


Sterilisatiezekerheid met 3M

3M™ Attest™ Trimetrische chemische indicator voor waterstofperoxidesterilisatie, Type 4


Ongeprocest



Geprocest

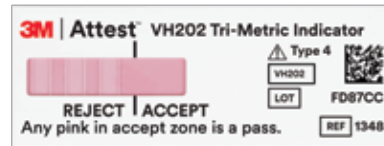

GOEDGEKEURD

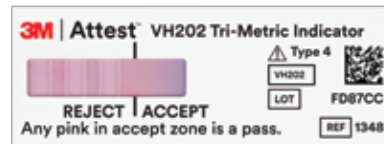

GOEDGEKEURD

Geprocest



AFGEKEURD



AFGEKEURD

3M™ Attest™ Trimetrische chemische indicatoren voor waterstofperoxidesterilisatie, type 4 conform ISO 11140-1:2014.

© 2021 3M. Alle rechten voorbehouden. 3M en Attest zijn merken en/of geregistreerde handelsmerken van 3M. Onrechtmatig gebruik is verboden. Gebruikt onder licentie in Canada.

70-2011-7969-7

M Belgium BVBA/SPRL
Health Care
Hermeslaan 7
1831 Diegem
3m_email_healthcare_be@mmm.com
www.3Mbelgie.be/medical

3M Nederland B.V.
Health Care
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Tel +31 15 782 2333
3m_email_healthcare_nl@mmm.com
www.3mnederland.nl/medical

In de twee bovenstaande voorbeelden heeft de kleurverandering de **ACCEPT**-zone bereikt. Dit houdt in dat de vermelde waarden voor de drie belangrijkste parameters (blootstellingsduur, temperatuur en concentratie van waterstofperoxide) bereikt zijn.

Als de kleurverandering de ACCEPT-zone heeft bereikt, is de sterilisatie geslaagd.

In de twee bovenstaande voorbeelden heeft de kleurverandering de **ACCEPT**-zone niet bereikt. De sterilisatie is niet **geslaagd** omdat de voorwerpen in het pakket, containersysteem of de mand niet lang genoeg blootgesteld zijn geweest aan de waterstofperoxidesterilisatie.

Het pakket moet opnieuw behandeld worden. Ook moet onderzocht worden waarom de sterilisatie niet is voltooid.

Als de kleurverandering de ACCEPT-zone niet heeft bereikt, is de sterilisatie niet voltooid.