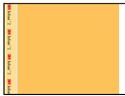
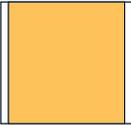







# Informazioni sul prodotto

É consigliabile l'utilizzo di un telo che riduca l'incidenza delle infezioni del sito chirurgico negli interventi cardiocirurgici<sup>1</sup> e i costi derivanti. Contattate il vostro rappresentante 3M per ulteriori informazioni sui teli per incisione battericida 3M™ Ioban™ 2.

## Teli da incisione battericida 3M™ Ioban™ 2

Telo da incisione battericida	Area di incisione (approssimativa)
 6640	34 x 35 cm 13 x 13 in
 6640EZ	35 x 35 cm 13 x 13 in
 6648	56 x 60 cm 22 x 23 in
 6648EZ	60 x 60 cm 23 x 23 in
 6650	56 x 45 cm 22 x 17 in
 6650EZ	60 x 45 cm 23 x 17 in
 6651	56 x 85 cm 22 x 33 in
 6651EZ	60 x 85 cm 23 x 33 in

## Teli specialistici ad azione battericida 3M™ Ioban™ 2

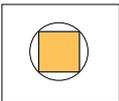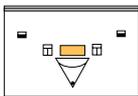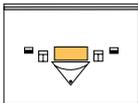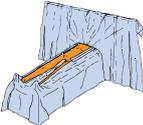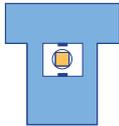Teli specialistici ad azione battericida	Area di incisione (approssimativa)	Dimensione complessiva (approssimativa)
 6657 Sacca raccogli liquidi circolare con telo da incisione 3M™ Ioban™ 2	30 x 30 cm 11 x 11 in	87 x 74 cm 34 x 29 in
 6658 Sacca raccogli liquidi grande con telo da incisione 3M™ Ioban™ 2	33 x 43 cm 13 x 17 in	74 x 74 cm 29 x 29 in
 6617 Telo per isolamento verticale con sacca e telo da incisione 3M™ Ioban™ 2	50 x 24 cm 19 x 9 3/8 in	320 x 213 cm 125 x 83 in
 6619 Telo per isolamento verticale con sacca e telo da incisione 3M™ Ioban™ 2	70 x 32 cm 27 x 12 in	328 x 254 cm 129 x 100 in
 6677 Telo per cardiocirurgia con telo da incisione 3M™ Ioban™ 2	41 x 97 cm 16 x 38 in	254 x 381 cm 100 x 150 in
 6681 Telo per cardiocirurgia con telo da incisione 3M™ Ioban™ 2	41 x 154 cm 16 x 61 in	254 x 384 cm 100 x 151 in
 6687 Telo per craniotomia con telo da incisione 3M™ Ioban™ 2	36.8 x 21.4 cm 14.5 x 8.4 in	196 x 406 cm 77 x 160 in
 6697 Telo per parto cesareo con telo da incisione 3M™ Ioban™ 2	30 x 30 cm 12 x 12 in	196 x 292 cm 77 x 115 in

Ogni dimensione riportata è approssimativa.



### Infection Prevention Division

3M Italia srl  
Via N. Bobbio, 21  
20096 Pioltello (MI)

Tel. 02 70351  
www.3mitalia.it/salute

3M e Ioban sono marchi di fabbrica di 3M.  
© 3M 2016– Tutti i diritti riservati.

1. Bejko J, Tarsia V, Bottio T., et al. Comparison of efficacy and cost of iodine impregnated drape vs. standard drape in cardiac surgery: study in 5100 patients. J Cardiovasc Transl Res. 2015; 8: 431-7.  
2. Alexander JW, Aerni S, Plettner JP. Development of a safe and effective one-minute preoperative skin preparation. Arch Surg. 1985; 120: 1357-61.

**3M** Science.  
Applied to Life.™

3M Infection Prevention Division

# I teli per incisione battericida 3M™ loban™ 2 aiutano a ridurre il rischio di infezioni del sito chirurgico.

I teli per incisione 3M™ loban™ 2 esercitano un'efficace azione battericida, riducendo la carica batterica cutanea. Un recente studio clinico effettuato in cardiocirurgia<sup>1</sup>, ha dimostrato che 3M™ loban™ 2 aiuta a ridurre l'incidenza delle infezioni del sito chirurgico in confronto a un telo da incisione senza battericida.


# Due sono gli aspetti fondamentali da considerare nella scelta di un telo da incisione: la perfetta adesione alla cute e l'attività battericida

I teli da incisione ad azione battericida 3M™ loban™ 2 aderiscono in modo sicuro alla cute, evitando il rischio di distacco accidentale durante l'intervento. Tale problematica potrebbe infatti aumentare di sei volte il rischio di infezione del sito chirurgico<sup>2</sup>.

La soluzione iodofora presente nell'adesivo del telo da incisione loban consente un'azione battericida ad ampio spettro e di lunga durata, con conseguente diminuzione del rischio di contaminazione della ferita.



## Un'efficace barriera

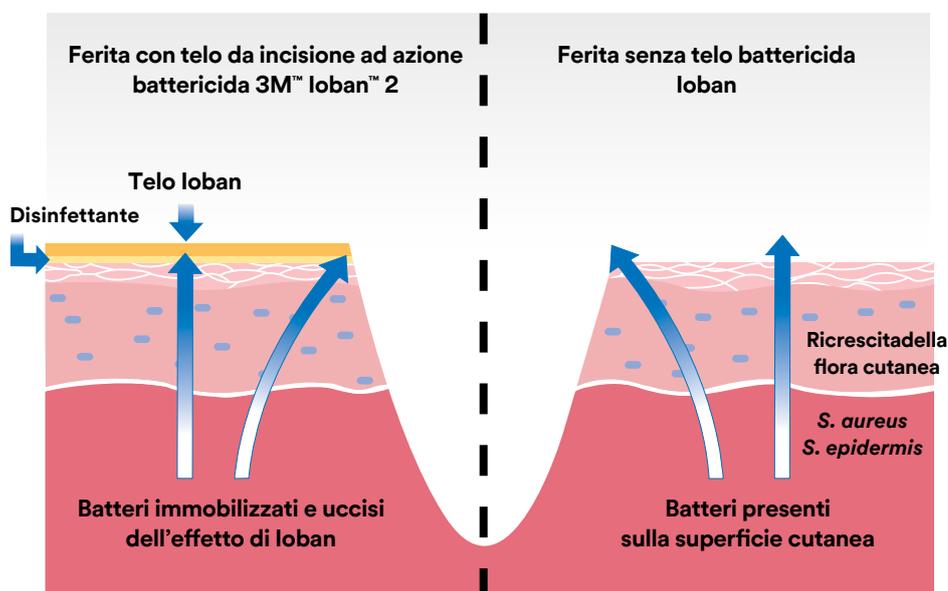

Diversi oggetti possono venire a contatto con la cute intorno all'incisione chirurgica e contaminarsi



Strumenti chirurgici




Guanti



Garze


# Studio comparativo tra 3M™ Ioban™ 2 e un telo non battericida

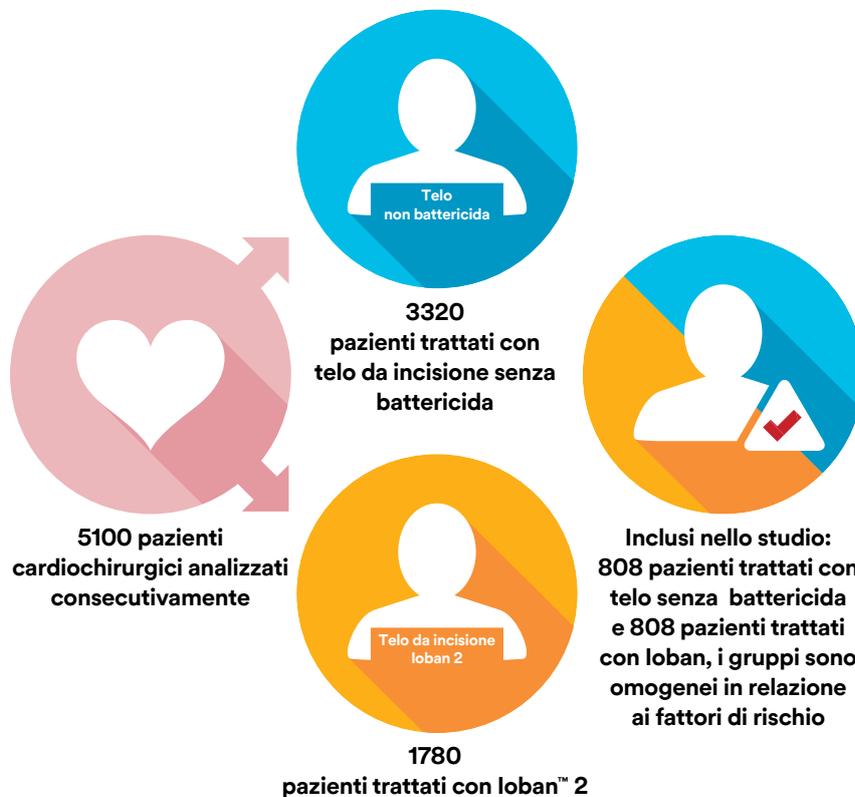

Questo studio valuta l'impatto di 3M™ Ioban™ 2 e di un telo non battericida sull'incidenza delle infezioni del sito chirurgico.

Questo studio retrospettivo ha considerato i dati raccolti in maniera prospettica di 5100 pazienti sottoposti a chirurgia cardiaca tra gennaio 2008 e marzo 2015. Sono stati quindi selezionati 808 pazienti in ciascun gruppo, con caratteristiche omogenee rispetto ai fattori di rischio.

## Conclusioni

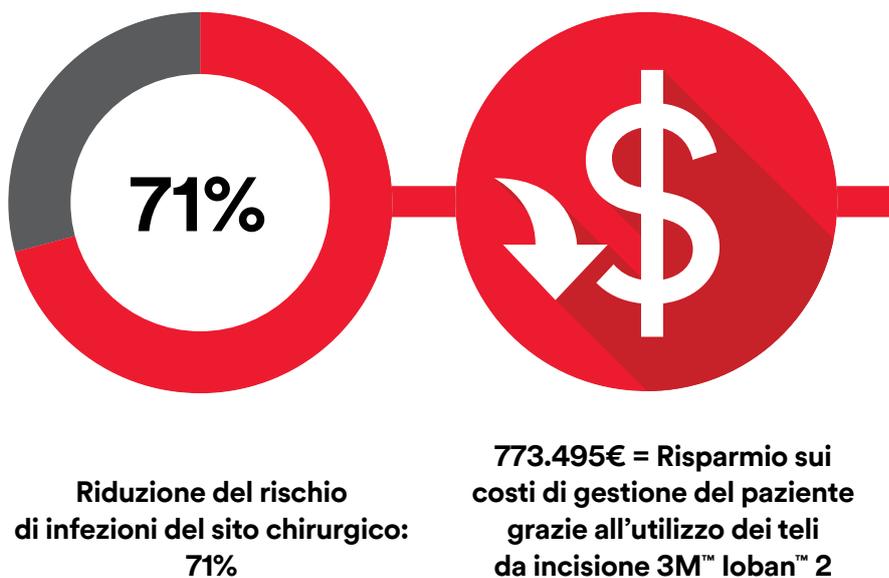

L'incidenza complessiva delle infezioni del sito chirurgico nel gruppo dei pazienti trattati con telo non battericida è stata 6,5%, di gran lunga superiore all'1,9% riscontrato nel gruppo trattato con 3M Ioban 2 (p=0.001).

I costi per la gestione del paziente sono il risultato della somma di: costo del telo, costo giornaliero della VAC, costo orario della sala operatoria, costo giornaliero della degenza, costo della terapia intensiva. Nel gruppo trattato con 3M™ Ioban™ 2 si è evidenziato un risparmio economico (p=0.65).

L'utilizzo dei teli da incisione ad azione battericida 3M™ Ioban™ 2 ha determinato una forte riduzione nell'incidenza d'infezione del sito chirurgico.

È stato inoltre dimostrato che 3M™ Ioban™ 2 consente un risparmio complessivo dei costi correlati alla cura del paziente<sup>1</sup>.

I prodotti della Linea 3M™ Ioban™ sono Dispositivi Medici marcati CE. Prima dell'utilizzo leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Materiale scientifico riservato al personale sanitario.