



Filtek^{MR}

Supreme Flowable Restorative

Agora nossa resina fluida está mais fácil de dispensar e manusear.


3M™ Filtek^{MR} Supreme Flowable é a nova resina fluida da 3M. A nova seringa para resina fluida oferece melhorias, com seu *design* mais ergonômico para melhorar o conforto e a facilidade de dispensar.* O material fluido continua o mesmo que a 3M™ Filtek^{MR} Z350 XT Flow, com a confiança e os benefícios que você já conhece.

Reduz a formação de bolhas e o desperdício

Praticamente nenhuma bolha é observada nas pastas após a extrusão e além disso você não terá escoamento indesejável do material após o uso, evitando o desperdício.

Sem suposições

O *design* da seringa possibilita visualizar facilmente a quantidade de material remanescente. O cilindro da seringa azul indica o restante de volume do material disponível. Quando sua seringa estiver vazia, apenas a parte branca do êmbolo aparecerá.

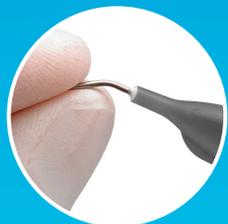

Ponta dobrável

É fácil dobrar a ponta de metal para melhor acesso à cavidade e ela resiste à torção após dobrá-la manualmente.

Fácil de dispensar e manusear

O formato triangular da nova seringa permite uma manipulação mais rápida e fácil.

*comparada a seringa antiga das resinas fluidas 3M

Principais benefícios

- Praticamente nenhuma bolha e minimiza o desperdício
- É fácil dobrar a ponta de metal, permitindo melhor acesso à cavidade*
- *Design* mais ergonômico para melhorar o conforto e a facilidade de dispensar*
- Excelente adaptação, retenção de polimento e resistência ao desgaste
- Versátil para uma ampla gama de indicações e técnicas

Pode ser aquecida para técnica de “injection molding”

A seringa pode ser aquecida até 70°C por uma hora até 25 vezes.



Casos Clínicos

3M™ Filtek™ MR Supreme Flowable Restorative oferece uma transição suave do material para o dente em restaurações estéticas.



Aspecto clínico inicial



Inserção da resina fluida



Aspecto clínico final

Caso clínico gentilmente cedido pelo Dr. Gunnar Reich, Munique, Alemanha

3M™ Filtek™ MR Supreme Flowable Restorative adapta-se facilmente e sela a margem.



Aspecto clínico inicial



Inserção da resina fluida



Aspecto clínico final

Caso clínico gentilmente cedido pelo Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia, Itália

Indicações

(Técnica incremental 2mm)



Classe III



Classe V



Odontologia minimamente Invasiva (MID)



Base



Forramento



Reparo de restaurações indiretas (Pequenos defeitos)¹



Reparos²



Alívio de áreas retentivas



Selante de fôssulas e fissuras

Consulte as instruções de uso para a lista completa de indicações.

Informação adicional

3M™ Filtek™ MR Supreme Flowable Restorative

1 seringa de 2g; 10 pontas aplicadoras.

COR

A1

A2

A3



1. Incluindo restaurações oclusais pequenas sem cargas mastigatórias.
2. Reparo de resina composta e materiais provisórios bisacrílicos.

* comparada a seringa antiga das resinas fluidas 3M.



Fale com a 3M

0800-0132333
www.3m.com.br
falecoma3M@mmm.com

Portal 3M Health Care Academy
www.3m.com.br/Odontologia



Acompanhe-nos

3M.OralCareBrasil

Os produtos comercializados pela 3M Oral Care são para uso exclusivo de profissionais dentistas. Para maiores informações sobre as especificações e precauções de cada produto, por favor leia as instruções de uso ou visite www.3m.com.br

3M e Filtek são marcas registradas da 3M ou da 3M Deutschland GmbH. Todas as outras marcas não são propriedade da 3M. © 2018, 3M. Todos os direitos reservados.