

3M

CUROS™

Disinfecting Port
Protectors

Yhdistä oikean värinen desinfektiokorkki

**Valitse tämä Curosu-
desinfektiokorkki:**

Käytä vain:

**Älä käytä
seuraavissa:**



3M™ Curosu™ -desinfektiokorkki
neulattomiin liittimiin



Neulattomat
liittimet



Avoimet naaras luer-
liittimet, kuten kolmitiehanat
(stopcocks, catheter hubs).



3M™ Curosu™ Stopper desinfektiokorkki
avoimiin naaras luer-liittimiin



Avoimet naaras luer-liittimet, kuten
kolmitiehanat (stopcocks, catheter hubs).



Neulattomat
liittimet



3M™ Curosu™ -desinfektiokorkki
Tego®-hemodialyysiliittimiin



Tego®-hemodialyysiliittimet



Avoimet naaras luer-
liittimet, kuten kolmitiehanat
(stopcocks, catheter hubs).



3M™ Curosu Tips™ -desinfektiokorkit
uros luer-liittimiin



Uros luer-liittimet