

# 3M

# Curoos™

Disinfecting Port  
Protectors

Käyttöohjeet

# 3M™ Curoos™

-desinfektiokorkki neulattomiin liittimiin

**Desinfioi yhdessä minuutissa – suojaa neulattomia liittimiä jopa seitsemän päivän ajan, mikäli sitä ei välillä poisteta.**



## Irrota

suojafolio 3M™ Curoos™ desinfektiokorkista.



## Kohdista ja kierrä

Kohdista Curoos desinfektiokorkki neulattomaan liittimeen ja kierrä myötäpäivään, kunnes se on tiiviisti paikallaan.

- ▶ Jos neulaton liitin on silminnähdn likainen, puhdista se manuaalisesti 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ennen desinfektiokorkin käyttöä
- ▶ Älä käytä desinfektiokorkkia, jos suojafolio on rikki, revennyt tai puhkaistu tai jos korkin vaahtomuovi vaikuttaa kuivalta
- ▶ Desinfektiokorkin on oltava neulattomassa liittimessä vähintään yhden minuutin ajan ja desinfektiokorkki voi olla paikoillaan liittimessä seitsemän päivää, mikäli sitä ei välillä poisteta
- ▶ Neulaton liitin on valmis käyttöön heti Curoos desinfektiokorkin poistamisen jälkeen, mikäli desinfektiokorkki on ollut paikoillaan liittimessä vähintään yhden minuutin ajan
- ▶ Aseta aina uusi Curoos desinfektiokorkki neulattomaan liittimeen jokaisen käyttökerran jälkeen
- ▶ Hävitä Curoos desinfektiokorkki jokaisen käyttökerran jälkeen
- ▶ Noudata sairaalan hoitokäytänteitä, kun desinfioit toistuvassa käytössä olevia neulattomia liittimiä

**Varoitus:** välttä mahdolliset vahingot käyttämällä tätä desinfektiokorkkia vain neulattomiin liittimiin.

**Varoitus:** tukehtumisvaara.

[3M.co.uk/Medical](https://www.3m.co.uk/Medical)

3M Medical Solutions Division  
Suomen 3M Oy  
Keilaniementie 1  
02600 Espoo  
Finland

Vaikuttava aine: 70-prosenttista isopropanolialkoholia.  
Kertakäyttöinen. Valmistuksessa ei ole käytetty  
luonnonkumilateksia tai bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatteja (DEHP).  
Katso käyttö-, varoitus- ja tuotetiedot laitteen merkinnöistä.

GF531  
3M ja Curoos ovat 3M Companyn tavaramerkkejä.  
© 3M 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.  
OMG79664.