



Cuрос™

Disinfecting Port
Protectors

3M™ Cuрос™ -desinfektiokorkki Tego®-hemodialyysiliittimeen

Desinfektiokorkki Tego®-hemodialyysiliittimiin

**Desinfioi yhdessä minuutissa – suojaa jopa seitsemän päivän ajan,
mikäli sitä ei välillä poisteta.**



Irrota

suojafolio 3M™ Cuрос™ desinfektiokorkista
Tego®-hemodialyysiliittimiin.



Kohdista ja kierrä

Cuрос -desinfektiokorkki Tego®-hemodialyysiliittimiin
kierrä desinfektiokorkkia myötäpäivään
hemodialyysiliittimessä, kunnes se on tiiviisti
paikallaan.

- ▶ Jos neulaton liitin on silminnähdn likainen, puhdista se manuaalisesti 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ennen desinfektiokorkin käyttöä
- ▶ Älä käytä desinfektiokorkkia, jos suojafolio on rikki, revennyt tai puhkaistu tai jos korkin vaahtomuovi vaikuttaa kuivalta
- ▶ Desinfektiokorkin on oltava neulattomassa liittimessä vähintään yhden minuutin ajan ja desinfektiokorkki voi olla paikoillaan liittimessä seitsemän päivää, mikäli sitä ei välillä poisteta
- ▶ Neulaton liitin on valmis käyttöön heti Cuрос desinfektiokorkin poiston jälkeen, mikäli desinfektiokorkki on ollut paikoillaan Tego®-hemodialyysiliittimessä vähintään yhden minuutin ajan
- ▶ Aseta aina uusi Cuрос desinfektiokorkki Tego®-hemodialyysiliittimeen jokaisen käyttökerran jälkeen
- ▶ Hävitä Cuрос desinfektiokorkki Tego®-hemodialyysiliittimiin jokaisen käyttökerran jälkeen
- ▶ Noudata sairaalan hoitokäytänteitä, kun desinfioit toistuvassa käytössä olevia neulattomia liittimiä

Varoitus: välttä mahdolliset vahingot käyttämällä tätä desinfektiokorkkia vain Tego®-hemodialyysiliittimiin.

Varoitus: tukehtumisvaara.

3M.co.uk/Medical