

# 3M

# Curoso™

Disinfecting Port  
Protectors

Desinfektiokorkin  
käyttö  
hoitoyksiköissä

# 3M™ Curoso™ Stopper

-desinfektiokorkki avoimiin naaras luer-liittimiin

**Desinfioi yhdessä minuutissa – suojaa avoimia naaras luer-liittimiä (esim. kolmitiehanat) jopa seitsemän päivän ajan, mikäli desinfektiokorkkia ei poisteta liittimestä.**



**Irrota**




**Keskitä ja kierrä avoimeen  
naarasliittimeen**

- ▶ Varmista, että liittimen venttiilit tai sulkijat ovat suljetussa asennossa ennen kuin käytät 3M™ Curoso™ Stopper desinfektiokorkkia avoimiin naaras luer-liittimiin
- ▶ Jos avoin naaras luer-liitin on silmännähdyn likainen, puhdista se manuaalisesti 70-prosenttisellä isopropyylialkoholilla ennen desinfektiokorkin käyttöä
- ▶ Älä käytä desinfektiokorkkia, jos suojafolio on rikki, revennyt tai puhkaistu
- ▶ Irrota desinfektiokorkki suojafoliosta
- ▶ Suojafolion poistamisen jälkeen, kohdista ja kierrä desinfektiokorkkia myötäpäivään avoimessa naaras luer-liittimessä, kunnes se on tiiviisti paikallaan
- ▶ Desinfektiokorkin on oltava paikoillaan vähintään yhden minuutin ajan ja se voi olla paikoillaan liittimessä seitsemän päivää, mikäli sitä ei välillä poisteta
- ▶ Avoin naaras luer-liitin on valmis käyttöön heti Curoso Stopper desinfektiokorkin poistamisen jälkeen, mikäli desinfektiokorkki on ollut paikoillaan liittimessä vähintään yhden minuutin ajan
- ▶ Hävitä desinfektiokorkki jokaisen käyttökerran jälkeen. Älä käytä desinfektiokorkkia uudelleen
- ▶ Uusi desinfektiokorkki on asetettava avoimeen naaras luer-liittimeen jokaisen käyttökerran jälkeen
- ▶ Noudata sairaalan hoitokäytänteitä, kun desinfioit toistuvassa käytössä olevia avoimia naaras luer-liittimiä

**Varoitus:** vältä mahdolliset vahingot käyttämällä Stopper desinfektiokorkkia vain avoimiin naaras luer-liittimiin ja varmistamalla, että korkki on kierretty tiiviisti kiinni.

**Varoitus:** tukehtumisvaara.

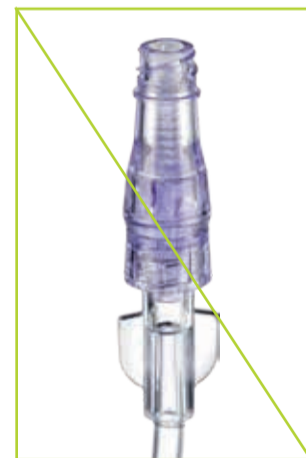

**Älä käytä  
neulatto-  
missa  
liittimissä**



**Älä käytä  
Tego®  
-hemodialyy-  
siliittimissä**

[3M.co.uk/Medical](http://3M.co.uk/Medical)

3M Medical Solutions Division  
Suomen 3M Oy  
Keilaniementie 1  
02600 Espoo  
Finland

Vaikuttava aine: 70-prosenttista isopropanolialkoholilla.  
Kertakäyttöinen. Valmistuksessa ei ole käytetty  
luonnonkumilateksia tai bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatteja (DEHP).  
Katso käyttö-, varoitus- ja tuotetiedot laitteen merkinnöistä.

GF533

Tego® on ICU Medical, Inc.:n tavaramerkki.  
3M ja Curoso ovat 3M Company:n tavaramerkkejä.  
© 3M 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.  
OMG79664.