



Tegaderm™

Soluciones para el Cuidado I.V.

Introduccion
Multilumen



Guía de producto

Apósitos Transparentes 3M™ Tegaderm™
CHG para el Aseguramiento del Sitio I.V.
con Gluconato de Clorhexidina 1657R para
Introduccion Multilumen

Apósitos Transparentes 3M™ Tegaderm™ CHG para el Aseguramiento del Sitio I.V. con Gluconato de Clorhexidina 1657R

El apósito está diseñado para brindar un cuidado excepcional del paciente mediante protección antimicrobiana, aseguramiento avanzado del sitio, estabilización del catéter y remoción gentil con la piel.

Borde reforzado

Tecnología diseñada para reducir el levantamiento de los bordes.

Protección antimicrobiana

Una almohadilla de gel impregnada con gluconato de clorhexidina (CHG) al 2% brinda protección antimicrobiana hasta por 7 días.

Tira adhesiva de aseguramiento con hendidura

Promueve una aplicación consistente y un mejor aseguramiento del sitio / estabilización del catéter. Las perforaciones permiten que la tira adhesiva se adapte alrededor de otros dispositivos.

Corte profundo ampliado

Permite que los lúmenes del catéter se adapten mejor y permanezcan en su sitio. Las perforaciones permiten que el corte se adapte alrededor de catéteres de gran volumen.

Barrera estéril resistente al agua que protege de contaminantes externos*

Película transparente altamente transpirable.

Reducción del riesgo de infección

Reducción clínicamente probada del 60% de infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con catéter (CRBSIs, por sus siglas en inglés) en pacientes con líneas centrales y arteriales;¹ se activa inmediatamente y mantiene niveles consistentes de actividad antimicrobiana hasta por 7 días.²

Visibilidad del sitio

El apósito transparente y la almohadilla de gel impregnada con gluconato de clorhexidina permiten la identificación temprana de complicaciones en el sitio de inserción.

Aplicación consistente



La almohadilla de gel impregnada con gluconato de clorhexidina y el apósito están diseñados para asegurar una aplicación correcta y estandarizada.

Aseguramiento del sitio / estabilización del catéter


Diseñado para proteger el sitio de inserción y reducir el movimiento o desplazamiento del catéter.

*Las pruebas *in vitro* muestran que la película provee una barrera contra virus de 27 nm o más de diámetro mientras que el apósito permanezca intacto sin fuga de líquido de infusión. 1. Timsit JF et al. Randomized controlled trial of chlorhexidine dressing and highly adhesive dressing for preventing catheter-related infections in critically ill adults. *Am J Crit Care Med*. 2012; 186(12): 1272-1278 <http://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/rccm.201206-1038OC>. 2. Bashir MH, Olson LK, Walters SA. Suppression of regrowth of normal skin flora under chlorhexidine gluconate dressings applied to chlorhexidine gluconate-prepped skin. *Am J Infect Control*. 2012; 40(4): 344-8.

1657R

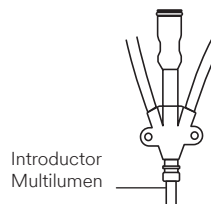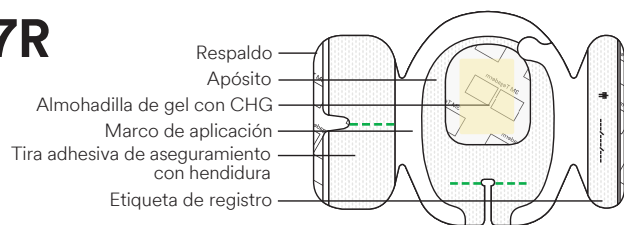

Prepare

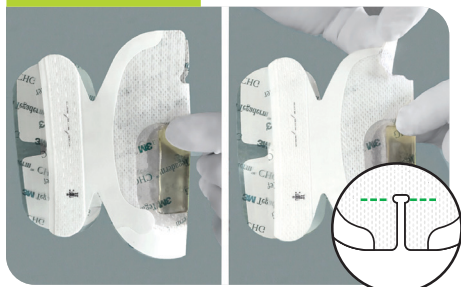


Prepare el sitio de acuerdo con el protocolo de la institución. El área debe estar completamente seca. Rasgue las perforaciones precortadas presentes en el corte profundo ampliado antes de retirar el respaldo del apósito. Retire el respaldo del apósito.

Presione



Centre el apósito de manera que la almohadilla de gel impregnada con gluconato de clorhexidina al 2% cubra el sitio de inserción del catéter (y las suturas cuando sea posible). Asegúrese de no estirar el apósito durante la aplicación. Una vez retirado el marco de aplicación, ejerza presión firme sobre el apósito para favorecer la adhesión.

Asegure

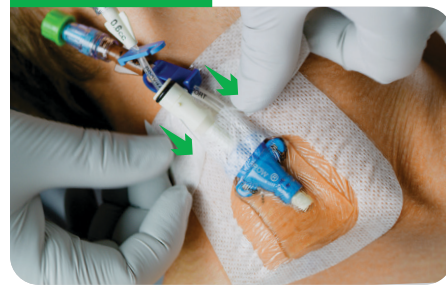

Aplique la tira adhesiva de aseguramiento debajo del tubo y superponga la parte trasera sobre el apósito. Retire las pestañas libres de adhesivo.

Asegure



Ubique la etiqueta de registro como se muestra en la imagen. Retire las pestañas libres de adhesivo.

Monitoree



El apósito deberá reemplazarse si la almohadilla de gel se desplaza cuando se presiona con el dedo. Cambie el Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ CHG 1657R cada siete (7) días; cuando el apósito se haya desprendido o se encuentre sucio; si la almohadilla de gel se satura; o en casos en los que exista inflamación, exudado visible, o pérdida de la visibilidad.

Retire



Rasgue las perforaciones precortadas. Después, sostenga la tira y despegue el apósito hacia el sitio de inserción del catéter usando una técnica de remoción baja y lenta. Para evitar causar daño a la piel, retire el apósito hacia atrás, nunca hacia arriba. Cuando la almohadilla de gel impregnada con CHG quede expuesta, tome una esquina de la almohadilla y del apósito transparente entre el pulgar y el dedo índice.

Para más información, consulte las Instrucciones de uso.

Información para pedido

Producto	Modelo	Tamaño de la almohadilla de gel impregnada con CHG	Tamaño del apósito	Unidades por cajita	Cajitas por case
	1657R	3 cm x 4 cm 1½ in x 1½ in	8.5 cm x 11.5 cm 3½ in x 4½ in	25	4

3M

División de Soluciones Médicas
3M Health Care
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144 USA
1-800-228-3957
www.3M.com/C3SD

Información de seguridad sobre Tegaderm™ CHG:

No utilice Tegaderm™ CHG en prematuros o menores de 2 meses de edad. El uso de este producto en prematuros puede provocar reacciones de hipersensibilidad o necrosis de la piel. La seguridad y efectividad de Tegaderm™ CHG no se ha establecido en menores de 18 años. Para mayor información sobre las indicaciones, consulte las instrucciones de uso del producto.

Por favor recicle.
3M y Tegaderm son marcas registradas de 3M. © 3M 2019. Todos los derechos reservados.
70-2011-7180-1