



Clarity™

Soluciones estéticas para ortodoncia

3M™ Clarity™ Advanced *Brackets* Cerámicos

Sonrisas brillantes. Desempeño excepcional.



Desempeño y estética que superan las expectativas.

3M™ Clarity™ Advanced *Brackets* Cerámicos son un revolucionario paso hacia el futuro en brackets cerámicos ortodóncicos. Mediante la combinación de tecnología progresiva y diseño de vanguardia, los *Brackets* Cerámicos Clarity Advanced proporcionan estética brillante, diseño pequeño, desprendimiento predecible y aumento de la comodidad del paciente. Están disponibles con adhesivo 3M™ APC™ Flash-Free, para hacer más rápida y eficiente que nunca la experiencia de adhesión. Estas características avanzadas le permiten ofrecer la mejor combinación de estética y desempeño a sus pacientes.

Apariencia atractiva. Diseño distinguido.

Estética brillante.

Deje que la sonrisa de su paciente brille de todas las formas posibles con los *Brackets Cerámicos Clarity Advanced*. Estos *brackets* de tamaño reducido están diseñados para integrarse con el color natural del diente, mientras que resisten las manchas y decoloración durante el tratamiento. Además, puede escoger de nuestras opciones de colores de ligaduras.




Fuerza confiable y tamaño pequeño de *bracket*.

Con un material cerámico de grano fino y creados mediante un proceso de moldeo por inyección, los *Brackets Cerámicos Clarity Advanced* ofrecen fuerza confiable en un tamaño pequeño y uno de los menores perfiles en la industria. Además, 3M Clarity Advanced *Brackets Cerámicos* le ofrecen un espacio amplio debajo del ala, lo que permite un tratamiento flexible y opciones de ligado.

El tamaño de grano pequeño brinda fuerza confiable en un *bracket* más pequeño.

Ampliación proporcional.
Fuente: laboratorio 3M.

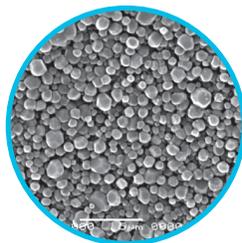



Material cerámico policristalino de grano fino– 3M Clarity Advanced Brackets Cerámicos




Material cerámico policristalino grueso– Brackets reforzados con metal de 3M

Comparación de tamaño de perfil anterior

Fuente: Datos internos de 3M

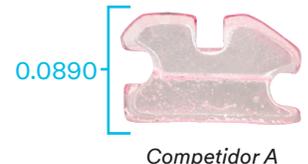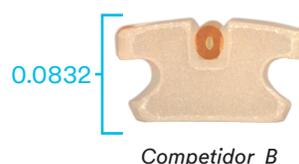

3M™ Clarity™ Advanced Brackets Cerámicos: Una revolución en tecnología de brackets cerámicos.

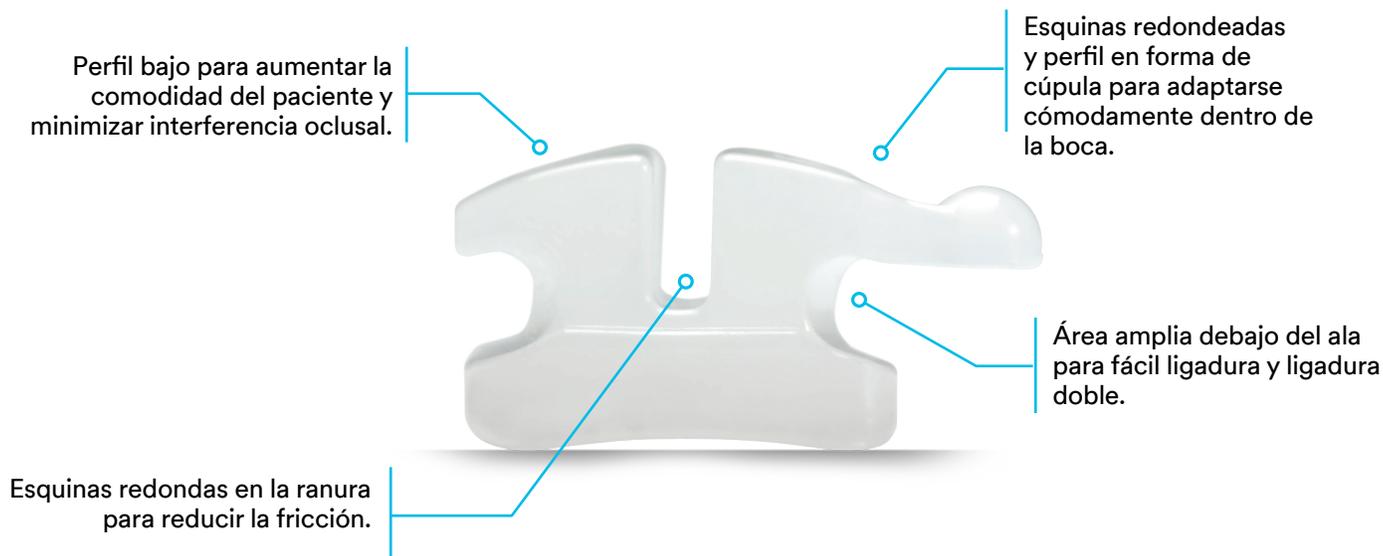

Trate de forma estética
a sus pacientes.



3M™ Clarity™ Advanced
Brackets Cerámicos


Superficie microcristalina para una fuerza de adhesión óptima.



Base geométrica específica del diente y diseño de base contorneada para una adaptación precisa del diente.

Concentrador de estrés para desprendimiento predecible.

Gancho redondo bidireccional para comodidad del paciente.

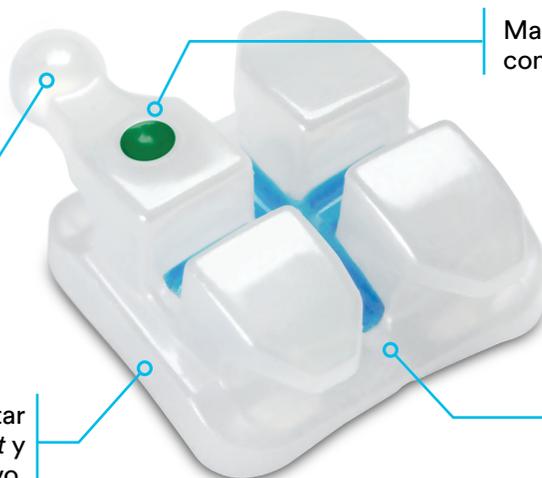


Marca de identificación del *bracket* con puntos de color.

Pestaña de base para facilitar la colocación del *bracket* y limpieza del adhesivo.

Marcas horizontales y verticales de referencia visual durante la colocación del *bracket*.

3M™ Forsus™ Correctores Clase II

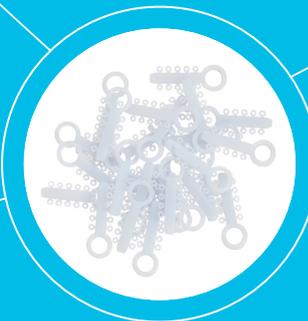

Ligas de color *Obscure*: ideal para maximizar la apariencia discreta de los *brackets*

Disponibles en prescripciones del sistema 3M™ MBT™ y Roth*.

*La versión de 3M de esta prescripción. Sin respaldo implícito del doctor.

Proceso de adhesión simple y eficiente.

Impulsado por la tecnología, el sistema adhesivo 3M™ APC™ Flash-Free es el sistema de adhesión más eficiente en ortodoncia. Nuestro diseño innovador crea un sustrato de adhesión único en la base del *bracket* que le ahorra tiempo e impacta positivamente en la satisfacción del paciente.




Disponible con adhesivo 3M™ APC™ Flash-Free para una adhesión superior.

Tasa de falla de adhesión promedio de menos del 2%



Ahorra tiempo y costos

-  Adhesión más rápida y eficiente que los brackets sin adhesivo preincorporado.
-  Elimina el paso de remoción de excedentes de adhesivo.
-  Limpieza simple y fácil al retirar.

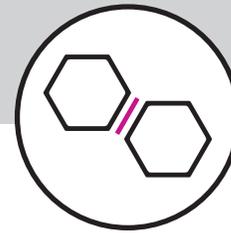

Eficiencia superior de adhesión

-  El tiempo de adhesión se reduce hasta en un 40% por *bracket*.
-  Eliminar la remoción de adhesivo reduce el movimiento accidental del *bracket* después de la colocación, reduciendo la necesidad de reemplazo.
-  Protege el esmalte debajo del adhesivo.

Diseñado para pacientes felices y prácticas eficientes.



Desprendimiento predecible y consistente con concentrador de estrés.

Reduzca la incertidumbre del proceso de desprendimiento del *bracket* cerámico con nuestro concentrador de estrés único, un sello de la marca 3M Clarity. Esta característica innovadora de diseño permite el desprendimiento mesial-distal con una simple presión, para desprender con confianza y ayudar a asegurar que esta visita del paciente sea una parte positiva de su tratamiento.

Aumento de la comodidad del paciente con colores para cualquier ocasión.

Bracket pequeño de bajo perfil con una superficie lisa y esquinas redondeadas que aumentan la comodidad del paciente. Los pacientes pueden “mezclarse o ser audaces” al elegir de más de veinte 3M™ AlastiK™ Easy-to-Tie Ligas transparentes o de color.





Clarity™

Soluciones estéticas para ortodoncia

Ejerza con claridad.

Nuestro portafolio completo de opciones de tratamiento estético natural están sustentados por la ciencia de 3M e impulsados por nuestra creatividad. La innovación es el eje de nuestra tecnología de vanguardia y le brinda la opción y el control que usted busca.

Nuestro compromiso es colaborar con los ortodoncistas para brindar soluciones de tratamiento estéticas, flexibles y a la medida, que muestren sus habilidades y aseguren resultados precisos. Juntos, podemos cambiar vidas creando sonrisas sanas y hermosas.



3M™ Clarity™ Soluciones estéticas para ortodoncia



3M™ Clarity™ Ultra Brackets Autoligantes

Bracket cerámico innovador y completamente estético diseñado para la comodidad del paciente y resultados confiables durante el tratamiento.



3M™ Clarity™ Advanced Brackets Cerámicos

Los *Brackets* Cerámicos Clarity Advanced otorgan estética brillante, diseño pequeño, desprendimiento predecible y aumento de la comodidad del paciente.



3M Cuidado Oral
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 USA
1-800-423-4588
3M.com/clarity

3M, APC, Clarity, Forsus, MBT, Victory Series y AlastiK son marcas registradas de 3M. © 3M 2021. Todos los derechos reservados.
70-2021-4916-0