

Applikation



1 Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den sterilen Verband. Entfernen Sie zuerst die mittlere Schutzfolie mit den beiden Fixierstreifen vom Verband. Erst danach die Schutzfolie vom Verband entfernen und die Klebefläche freilegen.




2 Positionieren Sie den transparenten Film mittig über der Einstichstelle. Achten Sie darauf, den Verband bei der Applikation nicht zu überdehnen.



3 Überlappen Sie das Klebevlies unterhalb der Katheterlumen.



4 Danach entfernen Sie vorsichtig den Applikationsrahmen, glätten den Verband von innen nach außen und modellieren ihn mit leichtem Druck an.

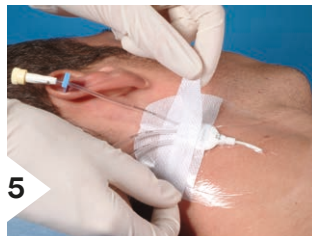

5 Befestigen Sie den ersten Fixierstreifen unter die Lumen und den zweiten Fixierstreifen oberhalb der Lumen.



6 Dokumentieren Sie den Verbandwechsel entsprechend der hausinternen Vorschriften und befestigen Sie den Dokumentationsstreifen am Verbandrand.

Entfernung



1 Entfernen Sie zuerst die Fixierstreifen.



2 Alternativ kann der transparente Teil des Verbands auch mittels Stretchtechnik entfernt werden.



3 Entfernen Sie den Verband langsam und in flachem Winkel in Richtung der Einstichstelle. Stabilisieren Sie dabei den Katheter mit der anderen Hand.



3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Tel +49 (0)2131 881 9260
3Mmedica.de@mmm.com
www.3M.de/medicalsolutions

3M Österreich GmbH
Health Care Business
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel +43 (0)186 68 60
medizin-at@mmm.com
www.3Mautria.at/medicalsolutions

3M (Schweiz) GmbH
Health Care Business
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
Tel +41 (0)44 724 90 90
innovation.ch@mmm.com
www.3Mschweiz.ch/medicalsolutions

www.3m.de/tegaderm

3M, 3M Science, Applied to Life, und Tegaderm sind eingetragene Marken oder Warenzeichen der 3M Company. © 3M 2021. Alle Rechte vorbehalten. (G) 2021-0062