

Applikation



1
Entnehmen Sie den Verband aus der Verpackung und entfernen Sie die Schutzfolie. Halten Sie den Verband an den nicht klebenden Haltetaschen fest.



2
Positionieren Sie das transparente Fenster mittig über der Einstichstelle so, dass die Schlüsselkerbe gut am Katheterhub positioniert werden kann.



3
Modellieren Sie den Verband mit leichtem Druck an.



4
Entfernen Sie den Applikationsrahmen vorsichtig in flachem Winkel und drücken Sie währenddessen den Verband mit den Fingern der anderen Hand leicht an.



5
Glätten Sie den Verband von der Mitte bis hin zum Rand mit leichtem Druck, um eine optimale Haftung sicherzustellen.



6
Befestigen Sie den breiten Fixationsstreifen über dem Konus und modellieren Sie diesen an.



7
Mit dem schmalen Fixationsstreifen befestigen Sie nun das distale Verbandende unterhalb des Konus.



8
Mit dem ausgefüllten Dokumentations- und Fixationsstreifen beenden Sie die Verbandanlage über der noch freien Stelle am Konus. Modellieren Sie abschließend alles gut an.

Hinweis: Der abgebildete Verband 1682 hat die Maße 5 cm x 5,7 cm, aber die Applikationstechnik ist identisch für 1680 3,8 cm x 4,5 cm.

3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Tel +49 (0)2131 881 9260
3Mmedica.de@mmm.com
www.3M.de/medicalsolutions

3M Österreich GmbH
Health Care Business
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel +43 (0)186 68 60
medizin-at@mmm.com
www.3Mautria.at/medicalsolutions

3M (Schweiz) GmbH
Health Care Business
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
Tel +41 (0)44 724 90 90
innovation.ch@mmm.com
www.3Mschweiz.ch/medicalsolutions

www.3m.de/tegaderm

Entfernung



1
Entfernen Sie zuerst die Fixierstreifen.



2
Danach können Sie den Verband langsam und in flachem Winkel entfernen.



3
Stabilisieren Sie dabei die Kanüle mit der anderen Hand.



4
Entfernen Sie den Verband immer in Richtung der Einstichstelle.