

Applikation



1 Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den sterilen Verband.



2 Ziehen Sie die Schutzfolie des Verbands ab und legen Sie die Klebefläche frei.



3 Positionieren Sie das transparente Fenster mittig über der Einstichstelle ohne den Verband dabei zu dehnen.



4 Modellieren Sie das Klebevlies am Ende der tiefen Kerbe gut an den Katheter an.



5 Entfernen Sie den Applikationsrahmen vorsichtig in flachem Winkel und drücken Sie währenddessen den Verband mit den Fingern der anderen Hand leicht an.



6 Befestigen Sie einen Fixierstreifen unter dem Katheterhub.



7 Danach den zweiten Fixierstreifen für zusätzliche Sicherheit über der Kanüle befestigen.



8 Befestigen Sie den Dokumentationsstreifen am Verbandrand.

Entfernung



1 Entfernen Sie zuerst den Dokumentations- und die Fixierstreifen.



2 Danach können Sie den Verband langsam und in flachem Winkel in Richtung der Einstichstelle entfernen. Stabilisieren Sie dabei die Kanüle mit der anderen Hand.

