

Applikation



1 Entnehmen Sie den Verband aus der Verpackung und entfernen Sie den ersten Fixierstreifen.



2 Fixieren Sie damit den Flügel des Katheters mit der abgebildeten Umschlagtechnik.



3 Positionieren Sie den transparenten Film über der Einstichstelle. Danach entfernen Sie vorsichtig den Applikationsrahmen, glätten den Verband von innen nach außen und modellieren ihn mit leichtem Druck an. Achten Sie darauf, den Verband bei der Applikation nicht zu überdehnen.



4 Den verbliebenen Fixierstreifen können Sie als Dokumentationsstreifen benutzen. Befestigen Sie mit diesem den distalen Teil des Verbands.

Entfernung

- 1 Entfernen Sie zuerst den Fixierstreifen.
- 2 Fassen Sie danach den distalen Teil des Verbands an und ziehen Sie diesen langsam und in flachem Winkel von der Haut in Richtung der Einstichstelle ab und entfernen Sie dann den verbliebenen Fixierstreifen.
- 3 Stabilisieren Sie dabei den Katheter mit der anderen Hand um eine Dislokation zu vermeiden.

Der transparente Teil des Verbands kann auch mittels Stretchtechnik entfernt werden.

