


Applikation



1 Tragen Sie 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz im Abstand von 2 cm rund um die Einstichstelle auf.




2 Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den sterilen Verband.

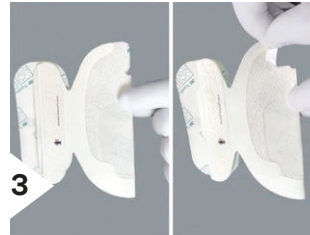


3 Vor dem Abziehen der Schutzfolie muss die Schlüsselochkerbe an der Perforation geöffnet werden. Ziehen Sie erst danach die Schutzfolie vom Verband ab.




4 Positionieren Sie das transparente Fenster über der Einstichstelle und glätten Sie den Verband von Innen nach Außen. Achten Sie darauf, den Verband nicht zu dehnen.

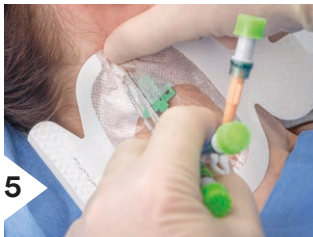


5 Modellieren Sie den Verband rund um die Schlüsselochkerbe und kleben Sie die Enden des Verbands leicht überlappend an.

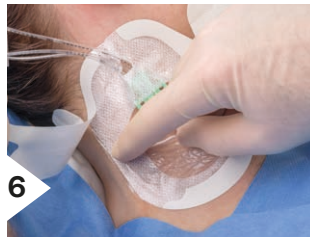

6 Entfernen Sie den Applikationsrahmen vorsichtig in flachem Winkel und drücken Sie währenddessen den Verband mit den Fingern der anderen Hand leicht an.

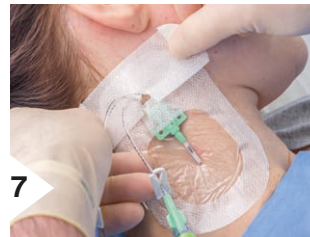

7 Befestigen Sie den breiten Fixierstreifen unterhalb der Katheterlumen.

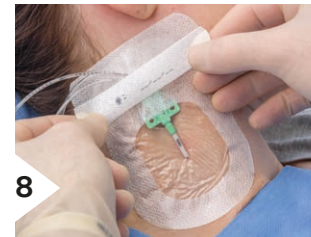

8 Nutzen Sie den Dokumentationsstreifen gemäß Ihrer hausinternen Vorschriften und sichern Sie Katheterlumen.


Entfernung



1 Entfernen Sie den Dokumentationsstreifen und öffnen Sie den Fixierstreifen an der Perforation.



2 Danach können Sie den Verband langsam und in flachem Winkel in Richtung der Einstichstelle entfernen. Stabilisieren Sie dabei den Katheter mit der anderen Hand um eine Dislokation zu vermeiden.

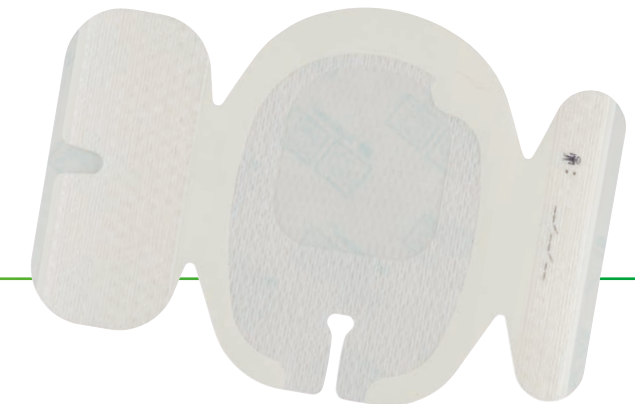

3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Tel +49 (0)2131 881 9260
3Mmedica.de@mmm.com
www.3M.de/medicalsolutions

3M Österreich GmbH
Health Care Business
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel +43 (0)186 68 60
medizin-at@mmm.com
www.3Mautria.at/medicalsolutions

3M (Schweiz) GmbH
Health Care Business
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
Tel +41 (0)44 724 90 90
innovation.ch@mmm.com
www.3Mschweiz.ch/medicalsolutions

Evaluated by...
ANTT
Aseptic Non Touch Technique
www.3m.de/tegaderm

3M, 3M Science, Applied to Life., Cavilon und Tegaderm sind eingetragene Marken oder Warenzeichen der 3M Company. © 3M 2021. Alle Rechte vorbehalten. (G) 2021-0062