

Półmaski filtrujące a osłony twarzy

Jaka jest różnica?

Istnieje wiele różnych rodzajów osłon twarzy, ale nie wszystkie z nich chronią użytkownika przed substancjami zanieczyszczającymi. Osłony twarzy, które zapewniają ochronę dróg oddechowych, nazywane są półmaskami filtrującymi.

Osłony twarzy i luźne dopasowanie



- Przeznaczone do ochrony środowiska pracy przed substancjami wydalanymi przez użytkownika.

Półmaski filtrujące



- Przeznaczone do ochrony użytkownika przed substancjami (cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu) w środowisku pracy.

Rodzaje półmasek filtrujących i osłon twarzy

	Osłona twarzy z tkaniny	Osłona twarzy jednorazowa	Półmaska medyczna	Półmaska filtrująca na twarz	Półmaski wielokrotnego użytku	System z wymuszonym przepływem powietrza z nagłowiem ochronnym lub kapturem
						
Znana również jako	Osłona twarzy wielokrotnego użytku	Maska jednorazowego użytku	Półmaska chirurgiczna	Jednorazowa półmaska filtrująca	Półmaska wielokrotnego użytku, półmaska lub maska pełnotwarzowa, półmaska, maska pełnotwarzowa, elastomerowa	PAPR, turbo, kaptur
Dopasowanie	Luźne	Luźne	Luźne	Ciasne	Ciasne	Luźne
Opis	Maska z tkaniny używana do zakrywania ust i nosa.	Maska zabiegowa jednorazowego użytku do zakrywania nosa i ust.	Maska chirurgiczna do zakrywania nosa i ust. Zapewnia również barierę dla płynów.	Półmaska jednorazowego użytku do zakrywania nosa i ust.	Półmaska wielokrotnego użytku z wymiennymi filtrami. Opcje zakrywania nosa i ust lub całej twarzy (w tym oczu)	Jednostka turboz wymuszonym przepływem powietrza używaną z nagłowiem lub kapturem w celu dostarczenia oczyszczonego powietrza.
Certyfikacja	Brak	Brak	MDR	Zatwierdzony CE	Zatwierdzony CE	Zatwierdzony CE
Przeznaczenie:	Może pomóc w powstrzymaniu śliny lub flegmy wydalonej przez użytkownika, tak jak podczas kaszlu lub kichania, gdy zakrywa się chusteczką do twarzy	Zaprojektowane, aby pomóc zredukować krople cieczy, które są wydane przez użytkownika.	Zaprojektowane, chronić przed rozpryskami i kroplami cieczy, które są wydane przez użytkownika. Bariera dla płynów w półmasce medycznej została zaprojektowana, aby chronić użytkownika przed rozpryskami płynów ustrojowych.	Zaprojektowana, aby pomóc chronić użytkownika przed potencjalnymi zanieczyszczeniami powietrza. Działa, gdy jest odpowiednio dobrana i noszona.	Zaprojektowana, aby pomóc chronić użytkownika przed potencjalnymi zanieczyszczeniami powietrza. Działa, gdy jest odpowiednio dobrana i noszona.	Zaprojektowana, aby pomóc chronić użytkownika przed potencjalnymi zanieczyszczeniami powietrza. Działa, gdy jest odpowiednio dobrana i noszona.
Pomoże zmniejszyć narażenie użytkownika na zagrożenie pyłami zawieszonymi w powietrzu, jeśli jest odpowiednio dobrana i noszona	Nie	Nie	Nie	Tak, FFP2 z certyfikatem CE co najmniej w 94% skuteczne w filtrowaniu cząstek stałych zgodnie z normą EN149:2001+A1:2009	Tak, filtry P2 z certyfikatem CE co najmniej w 94% skuteczne w filtrowaniu cząstek stałych zgodnie z normami EN140 i EN143. Różne filtry zapewniają ochronę przed różnymi rodzajami zanieczyszczeń.	Tak, systemy z wymuszonym przepływem powietrza z certyfikatem CE, wyposażone w wydajne filtry cząstek stałych zgodnie z normą EN12941 lub EN12942.



Dział Bezpieczeństwa Pracy
3M Poland sp. z o.o.
Kajetany, al. Katowicka 117
05-830, Nadarzyn
Poland
www.3m.pl/bhp

Aby uzyskać więcej informacji na temat półmasek oddechowych 3M, odwiedź www.3mpolska.pl/3M/pl_PL/bezpieczenstwo-pracy/ochrona-pracownikow/ochrona-drog-oddechowych/

Prosimy poddać recyklingowi.
Nadrukowano w Polsce.
3M to znaki towarowe firmy 3M.
© 3M 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.