

# Guide de sélection des pansements 3M™ V.A.C. Veraflo™

Ce guide peut être utilisé pour choisir le pansement en fonction du type de plaie, à utiliser conjointement avec la thérapie 3M™ Veraflo™.

	Pansement 3M™ V.A.C. Veraflo™ (Petit / Moyen modèles)	Pansement 3M™ V.A.C. Veraflo™ (Grand modèle)	Pansement 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse™	Pansement 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™
<b>Types de plaies</b>				
<b>Caractéristiques des plaies</b>	Plaies <b>ouvertes</b> , y compris les plaies avec <b>tunnellisations ou décollements peu profonds</b> où l'aspect distal est visible	Plaies <b>ouvertes importantes</b> , y compris les plaies avec <b>tunnellisations ou décollements peu profonds</b> où l'aspect distal est visible	Plaies <b>cavitaires</b> ou plaies présentant des <b>géométries complexes</b>	Plaies produisant des <b>exsudats fibrineux épais</b> , des <b>tissus nécrosés</b> , des <b>éléments infectieux</b> et autres <b>charges microbiennes</b> de la plaie
<b>Principaux objectifs de la thérapie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En conjonction avec la thérapie Veraflo, faciliter l'élimination des éléments infectieux et autres charges bactériennes</li> <li>Favoriser la production d'un tissu de granulation robuste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En conjonction avec la thérapie Veraflo, faciliter l'élimination des éléments infectieux et autres charges bactériennes</li> <li>Favoriser la production d'un tissu de granulation robuste dans les plaies de grande taille</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En conjonction avec la thérapie Veraflo, initier la thérapie et faciliter l'élimination des éléments infectieux et autres charges bactériennes</li> <li>Application facile sur les tunnellisations et les décollements</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En conjonction avec la thérapie Veraflo, initier la thérapie et faciliter l'élimination des éléments infectieux, notamment des exsudats fibrineux épais, des tissus nécrosés et autres charges microbiennes</li> <li>Constitue une option de nettoyage de la plaie pour les cliniciens lorsque la déterision chirurgicale doit être reportée ou se révèle impossible ou inappropriée<sup>1</sup></li> </ul>

	Pansement 3M™ V.A.C. Veraflo™ (Petit / Moyen modèles)	Pansement 3M™ V.A.C. Veraflo™ (Grand modèle)	Pansement 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse™	Pansement 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™
<b>Références</b>	<b>Petit modèle – ULTVFL05SM</b> <b>Moyen modèle – ULTVFL05MD</b>	<b>ULTVFL05LG</b>	<b>ULTVCL05MD</b>	<b>Moyen modèle – ULTVCC05MD</b> <b>Grand modèle – ULTVCC05LG</b>
<b>Formes</b>	Mousse prédécoupée en spirale	Bloc de mousse prédécoupé en deux couches	Forme tubulaire	Bloc de mousse prédécoupé en trois couches
<b>Caractéristiques d'application</b>	Simplicité d'application : <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensionnement sans ciseaux</li> <li>Zone prédécoupée pour l'application du tampon en cas de dérivation</li> <li>Application d'un tampon unique</li> </ul>	Simplicité d'application : <ul style="list-style-type: none"> <li>Idéal pour les plaies étendues mais peu profondes</li> <li>Fourni avec le kit de tubulure 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo™ pour une couverture étendue</li> </ul>	Souplesse d'application : <ul style="list-style-type: none"> <li>Idéal pour les plaies présentant des géométries complexes (par ex., tunnellisations, décollements et applications circonférentielles)</li> <li>Application d'un tampon unique</li> </ul>	Simplicité et souplesse d'application : <ul style="list-style-type: none"> <li>Couches fines pour une conformabilité accrue</li> <li>Couches multiples permettant différentes options d'application pour les plaies de profondeur variable</li> <li>Idéal pour les plaies sales nécessitant une thérapie active</li> <li>Application d'un ou deux tampons</li> </ul>
<b>Caractéristiques du pansement</b>	<b>Petit</b> : 11,2 × 7,7 × 1,8 cm par unité (2 unités spiralées) <ul style="list-style-type: none"> <li>Unité de 24 cm, une fois déroulée</li> <li>Unité de 18 cm, longueur disponible pour une déportation (sans la longueur de l'emplacement du PAD)</li> <li>2 feuilles de film adhésif moderne 3M™ V.A.C.®</li> <li>1 tampon 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C.™</li> <li>1 paquet de film protecteur cutané 3M™ Cavilon™</li> <li>1 règle jetable/étiquette de dénombrement des pièces de mousse</li> </ul> <b>Moyen</b> : 17,4 × 14,7 × 1,8 cm par unité (2 unités spiralées) <ul style="list-style-type: none"> <li>Unité de 80 cm, une fois déroulée</li> <li>Unité de 74 cm, longueur disponible pour une déportation (sans la longueur de l'emplacement du PAD)</li> <li>3 feuilles de film adhésif moderne 3M™ V.A.C.®</li> <li>1 tampon 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C.™</li> <li>2 paquets de film protecteur cutané 3M™ Cavilon™</li> <li>1 règle jetable/étiquette de dénombrement des pièces de mousse</li> </ul> <b>PLAGE DE VALEUR DE CONSIGNE POUR FILL ASSIST (ASSISTANT DE REMPLISSAGE)</b> <b>Petit</b> : 12 – 80 ml (1 unité) 26 – 160 ml (2 unités) <b>Moyen</b> : 38 – 240 ml (1 unité) 80 – 450 ml (2 unités)	25,6 × 15,0 × 1,6 cm par unité (2 unités ovales) <ul style="list-style-type: none"> <li>5 feuilles de film adhésif moderne 3M™ V.A.C.®</li> <li>1 tampon 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo™</li> <li>4 paquets de film protecteur cutané 3M™ Cavilon™</li> <li>1 règle jetable/étiquette de dénombrement des pièces de mousse</li> </ul> <b>PLAGE DE VALEUR DE CONSIGNE POUR FILL ASSIST (ASSISTANT DE REMPLISSAGE)</b> 55 – 350 ml (1 unité) 110 – 500 ml (2 unités)	1 tube spiralé (61 × 3,2 cm de diamètre) <ul style="list-style-type: none"> <li>3 feuilles de film adhésif moderne 3M™ V.A.C.®</li> <li>1 tampon 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C.™</li> <li>2 paquets de film protecteur cutané 3M™ Cavilon™</li> <li>1 règle jetable/étiquette de dénombrement des pièces de mousse</li> </ul> <b>PLAGE DE VALEUR DE CONSIGNE POUR FILL ASSIST (ASSISTANT DE REMPLISSAGE)</b> 65 – 130 ml (demi-tube) 130 – 250 ml (tube complet)	<b>Moyen</b> : 18,0 cm x 12,5 cm x épaisseurs variables (0,8 à 1,6 cm) <ul style="list-style-type: none"> <li>4 feuilles de film adhésif moderne 3M™ V.A.C.®</li> <li>1 tampon 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C.™</li> <li>4 paquets de film protecteur cutané 3M™ Cavilon™</li> <li>1 règle jetable/étiquette de dénombrement des pièces de mousse</li> </ul> <b>Grand</b> : 25,6 cm x 15,0 cm x épaisseurs variables (0,8 à 1,6 cm) <ul style="list-style-type: none"> <li>6 feuilles de film adhésif moderne 3M™ V.A.C.®</li> <li>1 tampon 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo™</li> <li>5 paquets de film protecteur cutané 3M™ Cavilon™</li> <li>1 règle jetable/étiquette de dénombrement des pièces de mousse</li> </ul> <b>POINTS DE DÉPART DU VOLUME DE REMPLISSAGE</b> <b>Moyen</b> : 85 ml (couche de comblement de 1,6 cm) ; 42 ml (couche de comblement de 0,8 cm) ; 24 ml (couche de contact avec la plaie de 0,8 cm) <b>Grand</b> : 150 ml (couche de comblement de 1,6 cm) ; 75 ml (couche de comblement de 0,8 cm) ; 42 ml (couche de contact avec la plaie de 0,8 cm)