



**Veraflo™**  
Therapy

**Quand une détersion au bloc opératoire est impossible, inappropriée ou différée vous avez maintenant une autre solution !**



La Thérapie 3M™ Veraflo™, associée au pansement 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™, permet de favoriser le nettoyage de la plaie et l'élimination d'éléments infectieux tels que des exsudats épais, de la fibrine ou des tissus nécrosés.

**De quoi avez-vous besoin pour commencer la thérapie ?**



Unité de Thérapie  
3M™ V.A.C.® Uitra




Réservoir



3M™ V.A.C. Veralink™  
Cassette



Solution  
topique saline

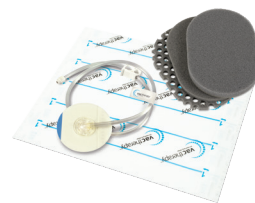

Kit Pansement  
3M™ V.A.C. Veraflo  
Cleanse Choice™

## Lancement de la Veraflo Thérapie

### Application du pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice

De la même manière que la thérapie V.A.C.®, pansez la plaie comme vous le feriez normalement. Veuillez vous assurer que la mousse alvéolée soit bien la couche primaire, au contact de la plaie.

### Fréquence de changement du pansement à adapter

Recommandation d'au moins trois changements de pansement par semaine (toutes les 48 à 72 heures).

### Paramètres de thérapie par défaut à ajuster en fonction de la prescription

Temps de contact 10 minutes

Temps de thérapie V.A.C.® de 3,5 heures, à -125 mmHg

A J7, évaluez la plaie.

## Une étude rétrospective :<sup>1</sup>

### Nouvelle mousse à utiliser avec la thérapie par pression négative avec instillation, pour éliminer l'exsudat épais.

Une analyse rétrospective des données de 21 patients, a été effectuée. Ces sujets présentaient 21 plaies complexes et larges, comprenant des zones de tissus dévitalisés et / ou de la fibrine jaune. Ils ont été traités dans un hôpital par plusieurs chirurgiens.

La Thérapie 3M™ V.A.C. Veraflo™ a été proposée avec les paramètres suivants :

Solution : saline

Temps de contact : 10 minutes



Temps de thérapie VAC : 3,5 heures

Pression : -125 mmHg

Nombre moyen de changements

de pansements par semaine : 2,9

Durée moyenne de la thérapie :

8,7 jours

#### Type de patients

- 11/21 (52,4%) ont bénéficié d'une détersion chirurgicale en amont de la mise en place de la TPNI avec le Pansement 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™.
- 10/21 (47,6%) n'ont pas eu de détersion chirurgicale en amont de la mise en place de la TPNI avec le Pansement 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ (ils ont été traités soit par détersion autolytique, soit par détersion mécanique à l'aide d'un scalpel ou d'une curette ou n'ont pas bénéficié d'une détersion).
- 15/21 (71,4%) ont présenté une infection osseuse, qui a été traitée.

#### Résultats

- 18/21 (85,7%) des plaies avaient **moins de 10%** de leur surface présentant de la **nécrose noire** non viable, après 1 à 3 changements de pansements en moyenne.
- 12/21 (57,1%) des plaies avaient **moins de 10%** de surface présentant un **résidu fibrineux jaune**, après 1 à 3 changements de pansement en moyenne.
- 20/21 (95,2%) des plaies ont bénéficié d'une **formation rapide de tissu de granulation** au niveau du lit de la plaie, directement en contact avec la mousse.

Comme pour toute étude de cas, les résultats et les enseignements ne doivent pas être interprétés comme une garantie ou une garantie de résultats similaires. Les résultats individuels peuvent varier selon la situation et l'état du patient. Photos et étude de cas : Photos et étude de cas fournis gracieusement par Luc Teot, MD, PhD.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant 3M.

#### Référence:

1. Teot L, Boissiere F, Fluieraru S. Novel foam dressing using negative pressure wound therapy with instillation to remove thick exudate. *Int Wound J* 2017;14:842-848.

Pansements 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ : Dispositif Médical de classe IIb, CE 2797.  
Réservoir V.A.C.® : Dispositifs Médicaux de classe Is, CE 2797. 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo™, Unité de Thérapie 3M™ V.A.C.® Ulta et cassettes 3M™ V.A.C. Veralink™ : Dispositifs Médicaux de classe IIa, CE. Ulta Hanger Arm Extension : Dispositif Médical de classe I, CE. KCI Manufacturing IDA Business & Technology Park Dublin Road Athlone, co. Westmeath Ireland.

**Remarque :** il existe des indications, contre-indications, mises en garde, précautions et informations de sécurité spécifiques applicables à ces produits et thérapies. Consulter un médecin et le mode d'emploi avant application. Ce document est destiné aux professionnels de santé.

© 2022 3M. Tous les droits sont réservés. 3M et les autres marques affichées sont des marques et/ou des marques déposées. Utilisation non autorisée interdite.  
PRA-PM-FR-00276 (01/22). OMG157928. Edition : Janvier 2022.

#### 3M France

1, Parvis de l'Innovation  
CS 20203 Cergy Pontoise Cedex  
95006 France  
Tél +33 (0) 130316161  
Fax +33 (0) 170704265

Web [https://www.3mfrance.fr/3M/fr\\_FR/notre-societe-fr/](https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/notre-societe-fr/)