



Anleitung zum Anlegen


3M™ E-A-R™ Flexible Fit Gehörschutzstöpsel

1. Vor Nutzung des Produkts muss der Anwender die Gebrauchsanweisung und Warnhinweise auf der Produktverpackung gelesen und verstanden haben.
2. Gehörschutzstöpsel vor jedem Gebrauch inspizieren. Gehörschutzstöpsel austauschen, wenn sie gerissen sind, ihre Flexibilität verloren haben, nicht mehr von selbst ihre ursprüngliche Form annehmen oder anderweitig beschädigt sind.
3. Nur saubere Spitzen der Gehörschutzstöpsel verwenden.

4. Bei diesem Gehörschutzstöpsel können Sie zwischen zwei Einföhrungsmethoden wählen. Jede Methode hat ihre eigene Dämmungsrate, die auf dem Karton aufgedruckt ist. Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, um zu ermitteln, welche Methode Sie anwenden müssen, um den für Ihre Lärmbelastung erforderlichen Schutz zu gewährleisten.



5. Üben Sie während des Einsetzens für einige wenige Sekunden Druck auf den Stiel aus. Für ein leichteres Einsetzen können Sie bei Bedarf die Richtung variieren, aus der Sie Druck auf den Stiel ausüben. Föhren Sie die gesamte konisch geformte Schaumstoffspitze in den Gehörgang ein, ruhig auch tiefer, wenn dies angenehm ist.

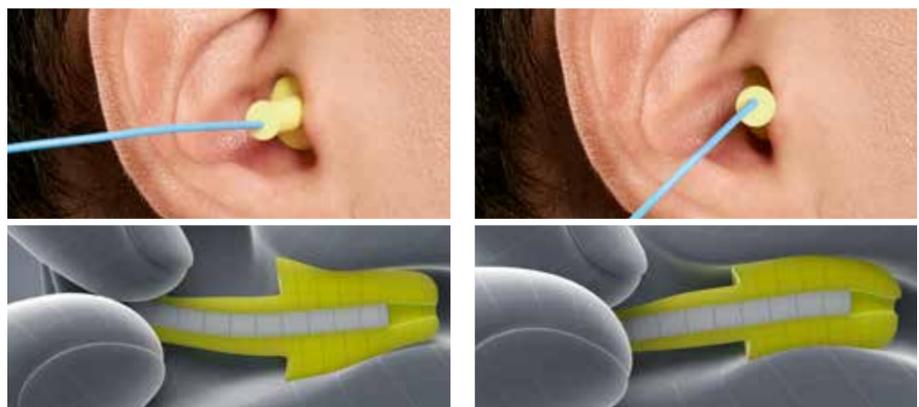

6. **DICHTSITZPRÜFUNG** nach Einföhren der Gehörschutzstöpsel:
 - ZIEHEN Sie behutsam am Stiel des Gehörschutzstöpsels. Der Gehörschutzstöpsel sollte sich nicht leicht aus dem Gehörgang herauslösen lassen. Falls doch, entfernen Sie den Stöpsel und föhren Sie ihn erneut ein.
 - HÖREN Sie sich ein gleichmäßiges lautes Geräusch mit beiden Gehörschutzstöpseln in den Ohren AN. Bedecken Sie beide Ohren gut mit der hohlen Hand. Das Geräusch sollte etwa genauso laut sein wie mit nicht bedeckten Ohren.