



2023年3月8日

有關3M呼吸防護產品查詢

類別	3M™ 醫用外科口罩		Nexcare™ 口罩		3M™ N95 口罩		
型號	T1926		掛耳式口罩	舒適保暖口罩	N95 防霧粒口罩	9205+ N95 防霧粒口罩	N95 醫用防護口罩
相關產品圖片							
1 用途	防止飛沫傳播		防止飛沫傳播	降低飛沫傳播機會，防霧保護	減少吸入空氣內的非油性微粒及飛沫	減少吸入空氣內的非油性微粒及飛沫，具有抗液體飛沫能力	減少吸入空氣內的非油性微粒及飛沫，具有抗液體飛沫能力
2 注意	口罩無法完全貼合面部，藍色表面在外面		口罩無法完全貼合面部，藍色表面在外面	口罩無法完全貼合面部，為舒適和保暖而設計	需要進行貼面測試	需要進行貼面測試	需要進行貼面測試
3 標準	EN14683 Type II/ ASTM level 1* BFE*: >98% PFE*: >99% 0.1 um Delta P*: <3.0 mm 防護*: 80 mmHg		BFE: 99% PFE: 99%	無	NIOSH N95 標準 (美國) 隔濾有害微粒不少於95%	NIOSH N95 標準 (美國) 隔濾有害微粒不少於95% 防霧能力測試 (Fluid resistance test)	NIOSH N95 標準 (美國) 隔濾有害微粒不少於95% 防霧能力測試 (Fluid resistance test), FDA認證
4 標準備註	<p>*ASTM = ASTM F2100-11 *BFE = 細菌過濾效率，一般細菌大小 3-5 微米 *Delta P = 壓力差，該值性，數值越低越好 *防護 = 測量在規定壓力下抵抗液體的能力 (level 1 = 80mmHg, level 2 = 120 mmHg, level 3 = 160 mmHg) *PFE = 微粒過濾效率，微粒大小 0.1 微米</p> <p>N95是美國國家職業安全及健康協會標準(NIOSH)的口罩等級，N95口罩可有效隔濾有害微粒不少於95%。 ASTM是美國材料和試驗協會，ASTM F2100-11是醫用口罩所用材料性能標準規範。醫用口罩所用材料可分為1, 2和3級。1級適合用於少量液體，液體噴霧或霧化液體，2和3級分別為適量和大量液體。主要區別是防霧。 EN14683是歐洲標準為醫用口罩要求和測試方法，分別為1,2和2k型。1型和2型主要區別為BFE，2型和2k型區別防霧和透氣性。</p>						
5 銷售渠道	3M特約經銷商: 健力醫療器材 Clinicon Medical - 2730-1883 雅各臣藥業 Jacobson Medical - 2596-1832 健本醫療用品 Healthy Medical - 8338-3333 或網上店HKTvmall (http://bit.ly/ZXMLLSO)		指定藥房、家品店及網上店HKTvmall (http://bit.ly/ZXMLLSO)	指定藥房、藥材、化妝品店、百貨、書局、家品店及網上店HKTvmall (http://bit.ly/ZXMLLSO)	五金街(https://tinyurl.com/zp8zbs4s) 恆和 eStore (https://tinyurl.com/z99999k) HKTvmall (https://tinyurl.com/wueacrb) Home Delight (https://tinyurl.com/262dvs5d) ASHOP (https://tinyurl.com/4pze8auk)	五金街 (https://tinyurl.com/35ksbvks) 恆和 eStore (https://tinyurl.com/3u8ee6mc) Home Delight (https://tinyurl.com/2utkxnr8) ASHOP (https://tinyurl.com/y7y7yvkx)	五金街 (https://tinyurl.com/zp9fu7mb) 恆和 eStore (https://tinyurl.com/zp8va2ua) Home Delight (https://tinyurl.com/yv4v6ewa) ASHOP (https://tinyurl.com/wejv9vd0)
6 建議零售價 (此乃3M建議的零售價，各銷售點可自行釐定其售價價格。)	HK\$65/盒(50個)		HK\$12/包(5個)	HK\$37/盒(1個)	8210: HK\$165/盒(20個) 9010CN: HK\$280/盒(50個)	HK\$4,630/箱(400個)	1860/1860S: HK\$300/盒(20個) 1870+: HK\$350/盒(20個)
7 現時口罩產品供應如何?	有貨		有貨	有貨	有貨	有貨	有貨
8 如何查閱口罩的日期?			保質期為3年	保質期為5年 (從包裝上生產日期起計算)		一般保質期為5年(從包裝上生產日期起計算) 請參考以下包裝盒上的使用日期	
9 如何分別口罩真偽?	每個口罩的右下方應印有3M標誌		包裝或產品上的 Nexcare品牌及批號	包裝或產品上的 Nexcare品牌及批號	建議客戶經由3M特約經銷商或供貨商或3M網上官方旗艦店採購3M™N95呼吸防護口罩，以確保購買、正貨及行貨。任何懷疑假冒或偽冒，請透過以下連結通報： https://engage.3m.com/covidfraud-bil_hk 或向海關部門反映。	任何懷疑假冒或偽冒，請透過以下連結通報： https://engage.3m.com/covidfraud-bil_hk 或向海關部門反映。	
10 佩戴口罩的正確步驟是怎樣?	<ol style="list-style-type: none"> 將口罩覆蓋鼻和口，金屬條向上。 口罩的藍色面朝外，金屬條在裏面。 將繩帶的位置正確，將口罩牢固固定在適當的位置。 口罩應覆蓋鼻、嘴和下巴。 金屬條應緊貼鼻樑。 		<ol style="list-style-type: none"> 將口罩兩側的黑色耳掛帶綁結。 白色裏布面置於口、鼻及下巴正反面。 兩邊耳掛帶輕扣於耳朵。 調整鼻樑片，將其與鼻樑緊貼合。 	<ol style="list-style-type: none"> 佩戴眼鏡人士應先取下眼鏡。 把兩條繩帶預先拉鬆 (8210適用)。 將口罩覆蓋鼻和口，金屬條向上。 將上兩條繩帶向上，越過頭部，放於後枕，位置在耳朵以上。 將下兩條繩帶向上拉過頭部，放於後枕，位置在耳朵以下。 用雙手食指及中指從上而下向於鼻樑位置的金屬條施壓，直至該部份完全貼近面部，有效密封空氣。 正壓檢查(針對沒有呼吸閥的口罩)：以雙手完全覆蓋口鼻，然後呼氣，口罩應該微微隆起，如空氣從口鼻邊緣漏出，表示佩戴不當，請重新調整口鼻位置或調校金屬條。 負壓檢查(針對沒有呼吸閥的口罩)：以雙手完全覆蓋口鼻，然後呼氣，口罩應該微微凹陷，如空氣從口鼻邊緣漏入，表示佩戴不當，請重新調整口鼻位置或調校金屬條。 			
11 佩戴口罩前後應注意什麼?	<ol style="list-style-type: none"> 個人面部和手的清潔。 檢查並確保保口罩沒有損壞，留意保質期，和包裝是否妥當。 移除口罩時請勿觸摸口罩的外表面。 用過的口罩應即時棄置在有害垃圾筒內。 之後立即洗手或用酒精擦手。 		<ol style="list-style-type: none"> 個人面部和手的清潔。 檢查並確保保口罩沒有損壞，留意保質期，和包裝是否妥當。 清潔方式可用中性清潔劑加水稀釋後，將口罩放入，經親手揉搓、洗滌，並放置陰涼處晾乾即可。 	<ol style="list-style-type: none"> 個人面部和手的清潔。 自己身體健康情況。 檢查並確保保口罩沒有損壞，留意保質期，和包裝是否妥當。 移除口罩時請勿觸摸口罩的外表面。 用過的口罩應即時放入封閉的垃圾筒中。 之後立即洗手或用酒精擦手。 			
12 什麼人士不適合使用?	對口罩物料過敏		對口罩物料過敏	以下情況不建議佩戴口罩: 1. 空氣不流通、呼吸不順或睡眠中 2. 三歲以下幼童因肺活量較低	以下情況不適合佩戴口罩，或使用前諮詢醫護人員： 1. 患上呼吸系統疾病，例如哮喘、肺炎等； 2. 懷孕； 3. 如佩戴後身體感到不適，例如呼吸困難、頭暈等。		
13 佩戴 N95 和醫用外科口罩可幫助預防傳染病嗎?	正確地使用3M™N95和醫用外科口罩對預防傳染病有一定程度的幫助，而醫護人員應選用兼具防護塗層的型號以提升防護效能。		一般舒適和保暖作用	正確地使用3M™N95和醫用外科口罩對預防傳染病有一定程度的幫助，而醫護人員應選用兼具防護塗層的型號以提升防護效能。			
14 有沒有尺碼之分?	同一型號的口罩並沒有尺碼之分，如個別人士對口罩尺碼有特別要求，可向3M經銷商代表查詢。		兒童及成人	兒童及成人(中碼及大碼)	同一型號的口罩並沒有尺碼之分，如個別人士對口罩尺碼有特別要求，可向3M經銷商代表查詢。		
15 儲存應注意什麼?	1. 避免在高溫和濕度的環境下儲存。2. 整潔的儲存環境和器具。3. 記錄購買日期或保留發票。						
16 如何處理使用過的口罩?	避免直接接觸使用過的口罩，應該用膠袋包裹然後棄置在有害垃圾筒內。						
17 口罩使用時間為多久?何時需要更換?	因個人使用情況及環境而定，但當發現呼吸困難或不適，便應立即離開高風險環境(例如病房或空氣混濁的地方)及脫除口罩。當發現有以下其中一項情況，亦需立即更換新口罩：1. 當口罩受污染如有血漬或飛沫等物；2. 當口罩損毀。						

其他相關查詢

18 現時消毒產品供應如何?	3M™ Avagard™ 快速免過水消毒洗手液於 HKTvmall (https://bit.ly/3aCS811) 有售，或可聯絡3M特約經銷商： 健力醫療器材有限公司 Clinicon Medical Limited - 2730-1883 雅各臣藥業 Jacobson Medical (HK) Ltd - 2596-1832 健本醫療用品有限公司 Healthy Medical - 8338-3333						
19 現時3M™ 護目鏡供應如何?	3M™ 護目鏡貨存將會不定期更新，你可於以下銷售點查詢。 網上銷售點： 五金街 https://bit.ly/3aTWVHu 恆和 eStore https://bit.ly/2u2FOGQ 及各大五金店均有代售。						
20 什麼環境下不適宜使用 N95 口罩?	在含氧量低於19.5%的環境中，切勿使用。						
21 小童是否適合使用N95 口罩?	3M現時供應的N95規格口罩只為配合職業安全工作而設，口罩大小未必能配合小童面型，而影響防護效能。故不建議小童使用3M現時供應的N95規格口罩。						