

3M Science.
Applied to Life.™*



Votre vie peut changer en un instant.

Gérez les petites plaies peu exsudatives grâce à la TPN portable, le système de thérapie 3M™ Snap™.

Questions fréquentes.



*3M Science. Au Service de la Vie.

Système de thérapie 3M™ Snap™

Sangle de la thérapie 3M™
Snap™ (facultative)

Technologie
Biolock™

Tubulure

Clé d'activation

Fenêtre de décharge de pression


Fenêtre du réservoir

Indicateur de capacité (vert)

Raccord de la tubulure

Mousse

Pansement
hydrocolloïde

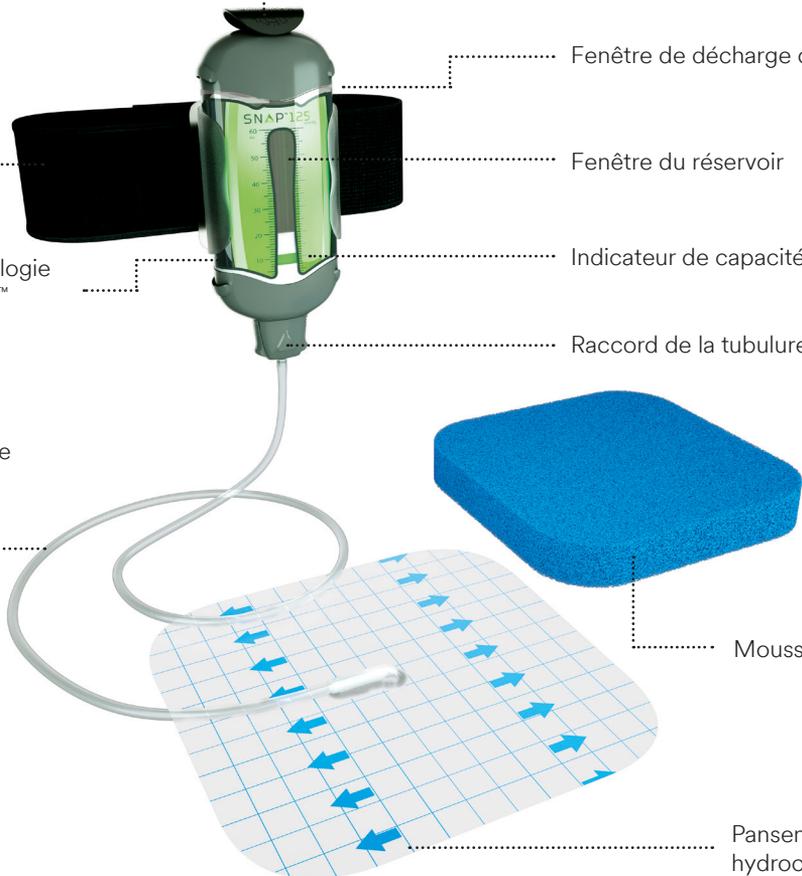

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le système de thérapie 3M™ Snap™ ?

Le système de thérapie Snap est un système de thérapie par pression négative de petite taille, portable et simple à utiliser. Le système de thérapie Snap est mécanique, complètement silencieux et conçu pour permettre l'élimination des excès de liquide, ce qui favorise la cicatrisation des plaies.

Pendant combien de temps vais-je bénéficier d'une thérapie avec le système de thérapie 3M™ Snap™ ?

La durée de la thérapie peut varier en fonction du type de plaie et du délai jugé nécessaire par votre professionnel de santé pour obtenir les résultats souhaités. Quelle que soit la durée totale de la thérapie, votre pansement devra être remplacé au moins deux fois par semaine.

Dois-je utiliser le système de thérapie pendant la nuit ?

En règle générale, il est préférable de garder le système à pression négative toute la nuit ; vous devez toutefois demander l'avis de votre professionnel de santé.

Est-il possible de prendre un bain ou une douche avec le système de thérapie 3M™ Snap™ ?

Les patients peuvent prendre des douches ou des bains avec le système de thérapie Snap. En cas de bain, ne pas immerger le système de thérapie Snap dans l'eau.

Ressentirai-je une douleur lorsque le système de thérapie 3M™ Snap™ sera mis en place ?

Le niveau de confort est propre à chaque utilisateur. Lors de l'application de la pression négative, il est possible que vous ressentiez une légère sensation de tiraillement sur le site du pansement. En cas de gêne ou de douleur, parlez-en à votre professionnel de santé.

Des réactions allergiques ?

Veillez contacter votre professionnel de santé si vous présentez un ou plusieurs des symptômes suivants : démangeaisons, rougeurs de la peau ou gonflement autour du pansement.



Questions fréquentes

Comment savoir si le système fonctionne ?

Le système de thérapie 3M™ Snap™ est en fonctionnement et activé si :

- l'indicateur de capacité vert est visible et stationnaire (fig. 6)
- le pansement 3M™ Snap™ a une apparence « comprimée »
- le pansement 3M™ Snap™ est dur au toucher

REMARQUE : inspecter visuellement le système au moins une fois toutes les 8 heures.



Fig. 6

Quand faut-il remplacer la cartouche pour thérapie 3M™ Snap™ ?

Remplacez la cartouche de thérapie Snap lorsque l'indicateur de décharge de pression rouge est visible (fig. 7) et que la cartouche pour thérapie Snap est remplie d'exsudat. A noter que la cartouche peut être changée indépendamment du pansement (durée de vie jusqu'à 7 jours). Suivez les étapes indiquées à la page 6 si un traitement par le système de thérapie Snap est souhaité ou indiqué par votre professionnel de santé.

*Si l'indicateur de pression rouge est visible, mais que la cartouche de thérapie Snap n'est pas remplie, réinitialisez la cartouche de thérapie Snap à l'aide de la clé d'activation. Consultez le mode d'emploi ou bien contactez votre professionnel de santé.



Fig. 7

**Pour vous permettre
de vivre votre vie,
sans limites.**



Questions fréquentes

Comment remplacer la cartouche de thérapie 3M™ Snap™ ?



1 Retirez la cartouche de thérapie Snap de sa sangle de transport.



2 Pincez les boutons de retrait situés sur le raccord de la tubulure et retirez le raccord de la cartouche de thérapie Snap.



3 Introduisez le raccord de la tubulure dans la nouvelle cartouche pour thérapie Snap.



4 Enfoncez la clé d'activation pour la libérer et la retirer de la nouvelle cartouche pour thérapie Snap.



5 Remettez la cartouche de thérapie Snap dans sa sangle de transport.

Résolution des problèmes

Problème	Cause possible	Solution possible
<p>Le pansement n'est pas étanche et l'indicateur de décharge de pression rouge est visible</p> <p>OU</p> <p>L'indicateur de capacité vert ne reste pas stationnaire dans la fenêtre du réservoir</p>	<ul style="list-style-type: none">• Il est possible que les raccords de la tubulure ne soient pas correctement branchés• Il peut y avoir une fuite entre l'hydrocolloïde et la peau	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que les raccords de la tubulure soient correctement branchés• Lissez le pansement avec les doigts pour aplanir les plis• Recollez les bords du pansement à l'aide d'un film ou d'un champ adhésif
<p>Le pansement n'est pas étanche et l'indicateur de capacité vert est stationnaire</p>	<ul style="list-style-type: none">• Il est possible que la tubulure soit obstruée• Le pansement peut être obstrué	<ul style="list-style-type: none">• Examinez la tubulure pour détecter une occlusion ou des pliures éventuelles. Le cas échéant, repositionnez la tubulure ou remplacez le kit de pansement 3M™ Snap™• Il peut y avoir une occlusion au niveau du pansement. Remplacez le pansement

En cas de doute, contactez votre professionnel de santé.

Précautions générales

Contactez votre professionnel de santé en cas de fuites du pansement 3M™ Snap™. Si vous ne pouvez pas consulter votre professionnel de santé dans les 24 heures, retirez la cartouche de thérapie 3M™ Snap™, le pansement Snap et tous les autres composants du pansement et recouvrez la plaie d'une compresse de gaze stérile ou d'un autre pansement selon les consignes de votre professionnel de santé.

Contactez immédiatement votre professionnel de santé si vous développez des signes d'infection tels qu'un gonflement accru, de la fièvre, de la douleur ou une rougeur dans la zone de la plaie. Retirez la cartouche de thérapie Snap, le pansement Snap et tous les autres composants du pansement et recouvrez la plaie d'une compresse de gaze stérile ou d'un autre pansement selon les consignes de votre professionnel de santé.

Qui contacter :

Pour plus d'informations sur le système de thérapie 3M™ Snap™, veuillez contacter votre représentant 3M local.

Important

Consultez le mode d'emploi du système de thérapie Snap fourni avec chaque kit de pansements 3M™ Snap™ pour obtenir des informations de sécurité et des instructions complètes. Un guide à l'intention du patient/du personnel soignant est également fourni avec chaque cartouche de thérapie 3M™ Snap™.

Ce document ne constitue pas un mode d'emploi complet.

REMARQUE : il existe des indications, des contre-indications, des mises en garde, des précautions et des informations de sécurité propres à ces produits et thérapies. Veuillez consulter un clinicien et vous reporter au mode d'emploi du produit avant toute utilisation. Ce document est destiné aux professionnels de santé.



3M France

1, Parvis de l'Innovation
CS 20203 Cergy Pontoise Cedex
95006 France

Tél +33 (0) 130316161
Fax +33 (0) 170704265

[www.3Mfrance.fr/3M/fr_FR/
notresociete-fr/](http://www.3Mfrance.fr/3M/fr_FR/notresociete-fr/)

Cartouches Thérapie 3M™ Snap™ : Dispositifs Médicaux de Classe IIa, CE 2797.
Pansements Thérapie 3M™ Snap™ : Dispositifs Médicaux de classe IIb, CE 2797.
Hydrocolloïde 3M™ Snap™ SecurRing™ : Dispositif Médical de classe Is, CE 2797.
Sangle Thérapie 3M™ Snap™ : Dispositif médical de classe I, CE. KCI
Manufacturing IDA Business & Technology Park Dublin Road Athlone, co.
Westmeath Ireland. Edition : Janvier 2022.

© 2022 3M. Tous droits réservés. 3M et les autres marques mentionnées sont des marques et/ou des marques déposées. Utilisation interdite sans autorisation. 70-2011-8273-3 PRA-PM-EU-00248 (05/21). OMG262718.