

**ALERTE DE CONTREFAÇON – PAS UN RAPPEL DE PRODUITS**

21 octobre 2021

Cher/Chère client(e) de 3M estimé(e),

Récemment, nous avons reçu de plus en plus de déclarations de fraude liées aux trois modèles des appareils de protection respiratoire chirurgicaux 3M suivants :

- Appareil de protection respiratoire contre les particules pour soins de santé et masque chirurgical 3M<sup>MC</sup> 1860;
- Appareil de protection respiratoire contre les particules pour soins de santé et masque chirurgical 3M<sup>MC</sup> 1860S; et
- Appareil de protection respiratoire contre les particules pour soins de santé et masque chirurgical Aura<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> 1870+.



Il s'agit notamment de rapports sur des produits faux ou contrefaits, ainsi que d'offres frauduleuses où le produit est offert, mais n'est pas livré. Nous avons travaillé avec les autorités policières pour éliminer ces appareils de protection respiratoire chirurgicaux contrefaits du marché. Ces mesures policières ont abouti à la saisie de millions d'appareils de protection respiratoire chirurgicaux contrefaits de modèles 1860, 1860S et 1870+.

Lors de l'évaluation des offres pour ces appareils de protection respiratoire, veuillez tenir compte de certains signes courants de contrefaçon :

- Tous les Appareils de protection respiratoire 3M, modèles 1860, 1860S et 1870+ importés aux États-Unis de tout autre pays sont susceptibles d'être des contrefaçons. 3M n'importe pas actuellement ces modèles d'appareils de protection opératoire aux États-Unis. Si ces modèles vous ont été proposés en dehors des États-Unis, ils doivent être considérés comme des contrefaçons.
- Tous les Appareils de protection respiratoire 3M, modèles 1860, 1860S et 1870+, exportés de la Chine ou de Hong Kong devraient être considérés comme des produits contrefaits. Nous ne fabriquons pas ces appareils de protection respiratoire en Chine ou à Hong Kong.

- Ne vous fiez pas aux rapports de certification TUV, SGS ou similaires. Tous les envois d'Appareils de protection respiratoire 3M, modèles 1860, 1860S et 1870+ accompagnés d'un rapport de certification TUV ou SGS (ou de rapports de tiers semblables) sont très probablement contrefaits.
- 3M n'utilise pas de « sceau du Pérou » ou d'autres sceaux semblables (exemples à droite). Les appareils de protection respiratoire portant ces sceaux sont probablement des contrefaçons.



En ce qui concerne les Appareils de protection respiratoire chirurgicaux, modèles 1860, 1860S et 1870+, nous avons identifié des produits contrefaits portant les codes de lot suivants :

	Codes de lot
Modèle 1860	B15180, B18077, B19022, B19029, B19063, B19206, B19240, B19130, B19133, B19155, B19161, B19206, B19267, B19314, B19345, B19355, B20010, B20011, B20013, B20014, B20016, B20018, B20019, B20020, B20021, B20022, B20025, B20035, B20060, B20100, B20119, B20132, B20134, B20150, B20174, B20183, B20235, B20237, B20245, B20266, B20281, B20322, B20351, B20670, B20679, B21013, B21021, B21041, B27233, R12216, R15236, R19333, R20008, R20025, R20051, R20102, R20138, R20144, R20150, R20155, R20183, R20190, R20265, R20271, R20294, R20328, R21036, R30868
Modèle 1860S	B19155, B19791, B20020, B20522, B20541, B20659, B20670, B20679, B20791, R20522, R20545, R20641
Modèle 1870+	C192331, C193041, C190241, C193361, C200771, C200221



Veuillez noter qu'il peut y avoir des produits contrefaits dont le code de lot n'est pas indiqué ici et que d'autres codes de lot peuvent être ajoutés au fil du temps.

Si vous possédez des appareils de protection respiratoire portant l'un de ces codes de lot, veuillez immédiatement évaluer la façon dont vous avez acquis ces produits. Si vous les avez achetés d'un vendeur qui n'est pas un distributeur autorisé de 3M, il y a un risque important

qu'ils soient contrefaits et qu'ils ne doivent pas être utilisés. Nous recommandons fortement que les Appareils de protection respiratoire 3M ne soient achetés que par l'entremise de distributeurs autorisés de 3M ou de mécanismes de passation de marchés existants (c.-à-d. la Classification fédérale des approvisionnements), car cela donnera la plus grande assurance de recevoir des produits authentiques.

**Veillez communiquer avec notre ligne d'assistance antifraude** au 1 800 426-8688 ou visitez notre site Web [3M.com/covidfraud](https://www.3m.com/covidfraud) :

- Si vous envisagez une offre pour un produit qui soulève une ou plusieurs de ces préoccupations,
- Si vous avez acheté un produit auprès d'un vendeur qui n'est pas un distributeur autorisé de 3M, ou qui soulève une ou plusieurs de ces préoccupations et que vous souhaitez authentifier le produit,
- Pour vérifier si un vendeur qui vous propose ou vous a vendu ces produits est un distributeur autorisé de 3M, ou
- Si vous avez d'autres questions sur les appareils de protection respiratoire chirurgicaux des modèles 1860, 1860S ou 1870+ ou d'autres produits de protection respiratoire 3M.

Vous trouverez de plus amples renseignements, y compris des conseils supplémentaires pour vous aider à identifier les appareils de protection respiratoire contrefaits, sur notre site Web à [3M.com/covidfraud](https://www.3m.com/covidfraud).

Nous vous remercions de votre soutien continu.