



# Tegaderm™

Lösungskonzepte für die Wundversorgung



## 3M™ Tegaderm™ Absorbent

### Produktbeschreibung

Tegaderm Absorbent ist ein transparenter Hydroaktivverband der die absorbierenden Eigenschaften eines hydroaktiven Wundverbandes mit dem besonderen Vorteil der Transparenz verbindet. Für kontrollierte Wundbeobachtung ohne Verbandwechsel.

### Anwendungsgebiete

Für schwach bis mäßig exsudierende, oberflächliche bis tiefe, akute wie chronische Wunden.

### Eigenschaften

- Bleibt transparent, ermöglicht Wundbeobachtung während der Tragedauer
- Nimmt deutlich mehr Exsudat auf als Hydrokolloide
- Absorbiert über Diffusion, keine Gel Reste in der Wunde
- Sehr dünner und glatter Kleberand verhindert vorzeitiges Aufrollen des Randes bei starken Scherkräften (z. B. bei unruhigen Patienten)
- Hydrophiler, hypoallergener Klebstoff des Kleberandes klebt auch bei eher feuchten Hautverhältnissen
- Klebstofffreie Haltetaschen für perfektes Arbeiten mit Handschuhen

### Anwendung

- Haut sollte trocken und fettfrei sein
- Trägerpapier entfernen, Transparenz ermöglicht exakte Positionierung über der Wunde, ohne Spannung an modellieren und gut andrücken, um eine optimale Haftung des Kleberandes auf der Haut zu erreichen
- Nicht einschneiden
- Zur Entfernung flach über die Haut abziehen oder die Haftung durch flache Überdehnung am Kleberand aufheben (dabei die Haut durch Andrücken unterstützen)
- Tegaderm Absorbent kann je nach Zustand der Wunde und des Verbandes auch mehr als 7 Tagen auf der Wunde bleiben

### Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung Verband	Abmessung Wundaufgabe	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	🇨🇭 Pharmacode	🇨🇭 MiGeL
90800	7,6 × 9,5 cm, oval	3,8 × 5,7 cm	5	2929898	3071348	7772693	35.05.02.02.1
90801	11,1 × 12,7 cm, oval	6 × 7,5 cm	5	2930335	3071354	3016332	35.05.02.03.1
90802	14,9 × 15,2 cm, quadratisch	10 × 10 cm	5	2931889	3071377	3017751	35.05.02.04.1
90803	14,2 × 15,8 cm, oval	8,5 × 10,7 cm	5	2931895	*	3016349	35.05.02.04.1
90805	20 × 20,3 cm, quadratisch	15 × 15 cm	5	2932618	*	3016355	35.05.02.06.1

\*Produkt erhältlich, keine PZN Nummer verfügbar

3M Deutschland GmbH • Telefon +49 (0)2131 881 9260 • 3Mmedica.de@mmm.com • www.3M.de/medicalsolutions

3M Österreich GmbH • Telefon +43 (0)186 686-0 • Medizin-at@mmm.com • www.3Mmaustria.at/medicalsolutions

3M (Schweiz) GmbH • Telefon Tel +41 (0)44 724 90 90 • Innovation.ch@mmm.com • www.3Mschweiz.ch/medicalsolutions