



3M™ Bair Hugger™ Universal Warming Gown.

Verwarmingsjas gemaakt van Thinsulate™
isolatiemateriaal – Workflowbeschrijving.



3M™ Bair Hugger™ Universal Warming Gown, verwarmingsjas gemaakt van Thinsulate™ isolatiemateriaal.

Deze innovatieve verwarmingsjas voor eenmalig gebruik is eenvoudig te gebruiken, compatibel met de meeste vormen van chirurgie, en ontworpen om een hoge mate van warmteoverdracht te bieden voor efficiënte opwarming voor de ingreep. De jas profiteert van het isolatievermogen van 3M™ Thinsulate™ isolatiemateriaal om de opgeslagen warmte beter vast te houden en warmteverlies te reduceren, zelfs wanneer actieve verwarming niet mogelijk is.



Vóór de operatie.

De jas aantrekken

Laat uw patiënt de verwarmingsjas zo aantrekken dat de opening zich aan de achterkant bevindt. De multipositionele verwarmingsdeken moet in de binnenkant van de jas blijven totdat deze tijdens de operatie nodig is.



Prewarming


Steek de slang van de verwarmingsunit in de onderste slangaansluiting van de verwarmingsjas. Gebruik een draaiende beweging om ervoor te zorgen dat de slang goed aansluit. Ondersteun de slang (met de slangklem) om ervoor te zorgen dat de slang stevig is bevestigd.*



* Behandel patiënten niet alleen met de slang van de Bair Hugger-verwarmingsunit. Bevestig de slang altijd aan een Bair Hugger verwarmingsjas of multipositionele verwarmingsdeken alvorens verwarmingstherapie toe te dienen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voordat u het product gebruikt.

Transport of perioden zonder actieve verwarming

De verwarmingsjas isoleert de patiënt om te helpen warmte vast te houden en het warmteverlies te reduceren, zelfs tijdens onderbrekingen in verwarming wanneer geen stopcontact beschikbaar is voor actieve verwarming.

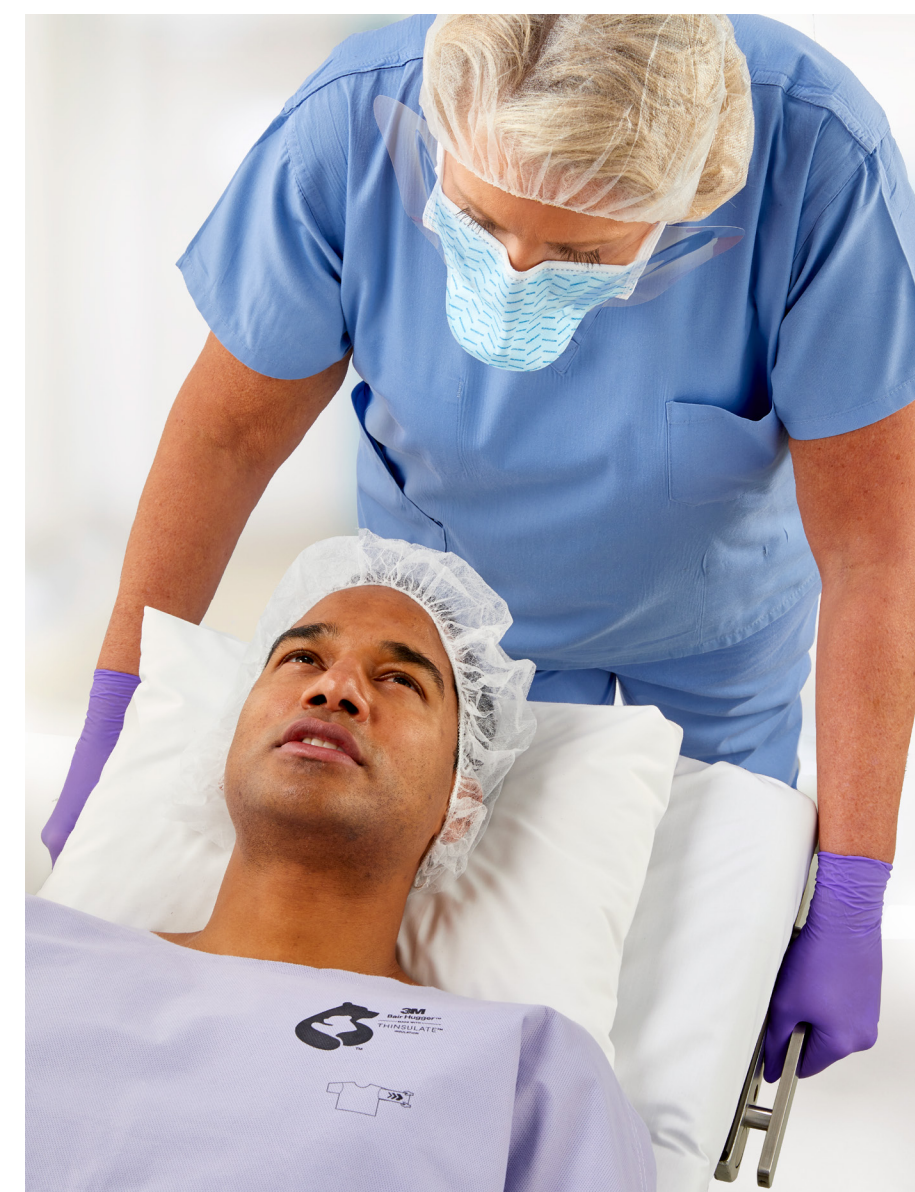

Verwarming van bovenlichaam.

1 Haal de deken uit de pocket en plaats deze op de patiënt

Maak de jas los achter in de nek en neem de multipositionele verwarmingsdeken uit de pocket in het bovenste deel van de jas. Leg de verwarmingsdeken op de patiënt.



2 Maak de mouwen van de jas los en schuif deze over het onderlichaam

Maak de mouwen van de verwarmingsjas los en vouw de jas omlaag over het onderlichaam van de patiënt zodanig dat het geperforeerde deel van de deken direct op de patiënt ligt en contact maakt met de huid.



3 Bevestig de deken

Verwijder de schutlaag van de kleefstrip en bevestig de deken op de patiënt. Trek de geperforeerde stroken van beide zijden van de verwarmingsdeken en gebruik deze om de deken op zijn plaats vast te zetten.*



* Plaats de verwarmingsjas niet rechtstreeks over een diathermieplaat of over een transdermale medicatiepleister. Breng fixatiehulpmiddelen voor de patiënt (b.v. veiligheidsbanden) niet aan over de verwarmingsjas of verwarmingsdeken tijdens actieve verwarming.

4 Sluit de slang aan en maak deze vast

Steek het uiteinde van de slang van de verwarmingsunit in de slangaansluiting met een draaiende beweging om ervoor te zorgen dat de slang goed aansluit. Zet de slang vast met de slangklem. Selecteer de gewenste temperatuur op de verwarmingsunit.*




*Plaats de slangaansluiting die u wilt gebruiken niet boven het liesgebied.



Verwarming van onderlichaam.

1 Maak de mouwen van de jas los

Maak de jas los achter de nek en het middel, en maak de mouwen van de verwarmingsjas los.

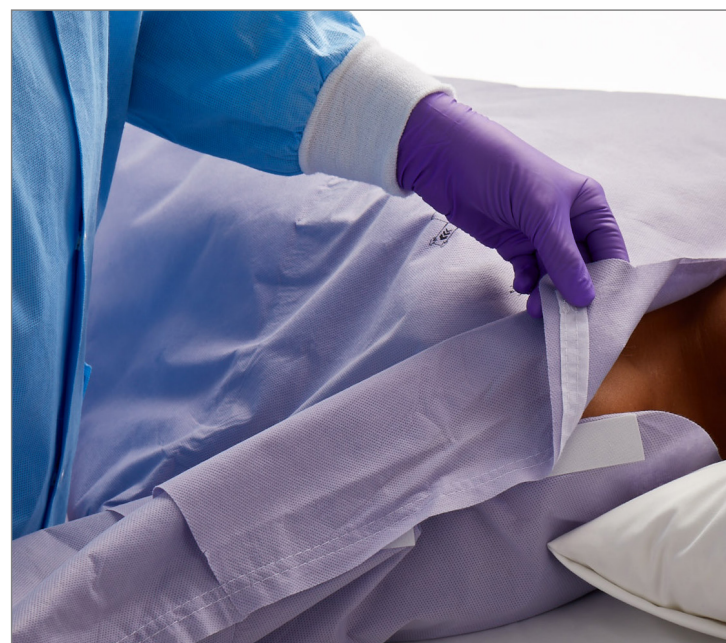

2 Schuif de jas over het onderlichaam

Schuif de jas omlaag over het onderlichaam van de patiënt.*



* Steek de jas of linten niet direct onder de patiënt en vooral niet onder benige uitsteeksels.

3 Maak de jas vast

Stop overtollig jasmateriaal losjes in of zet het vast onder het matras.*



* Als de jas is ingestopt, moet deze los genoeg zijn zodat de luchtkanalen ruimte hebben voor de ingeblazen lucht wanneer de verwarmings slang wordt aangesloten en ingeschakeld.

4 Sluit de slang aan en maak deze vast

Steek het uiteinde van de slang van de verwarmingsunit in de onderste slangaansluiting van de jas en zet de slang vast met de slangklem. Selecteer de gewenste temperatuur op de verwarmingsunit.*



* Voer geen actieve verwarming uit wanneer de verwarmingsjas of verwarmingsdeken direct op de voeten wordt gebruikt. Plaats de slangaansluiting die u wilt gebruiken niet boven het liesgebied.



Chirurgische positie.

Rugligging



Zijligging



Buikligging



Lithotomie



Robotica



Strandstoel



Na de operatie.

Transport

De verwarmingsjas met isolatie blijft op de patiënt tijdens het overbrengen van de patiënt naar de uitslaapruimte.



Opnieuw aansluiten

Als verdere actieve verwarming is vereist, sluit u de slang van de verwarmingsunit aan op de slangaansluiting van de verwarmingsjas en selecteert u de gewenste temperatuurinstelling.*



*Sluit de verwarmingsjas of verwarmingsdeken niet aan op de verwarmingsunit als het materiaal sneetjes of scheurtjes vertoont, want dan zijn de luchtkanalen mogelijk beschadigd.

Bewaking

Ga door met temperatuurbewaking tijdens het uitslapen.*



*In afwezigheid van continue bewaking, controleert u de temperatuur en huidreacties van patiënten die niet in staat zijn te reageren of communiceren en/of die geen temperatuur kunnen voelen ten minste elke 15 minuten of in overeenstemming met het protocol van uw instelling.





3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft

3Mmedical.nl@mmm.com
www.3M.nl/medical

3M Belgium BVBA/SPRL
Hermeslaan 7
1831 Diegem

3Mmedical.be@mmm.com
www.3M.be/medical

3Mbelgie.be/normothermie
3M.nl/normothermie

Opmerking: Voor deze producten en behandelingen bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een arts en de gebruiksaanwijzing van het product voordat u het product gebruikt. Uitsluitend op voorschrift.

3M, Bair Hugger, Thinsulate en de andere getoonde merken zijn merken en/of geregistreerde handelsmerken. Onrechtmatig gebruik verboden. Recycleer s.v.p. © 3M 2021. Alle rechten voorbehouden. OMG141081.