



Prevena™
Thérapie de l'incision

Voyants et alarmes de l'Unité de thérapie PREVENA™125



Voyant d'avertissement

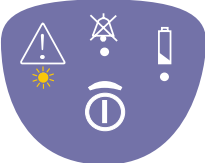
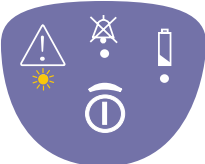
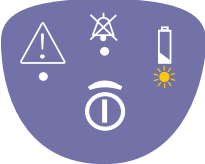

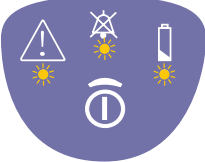


Alarme sonore (interrompue)

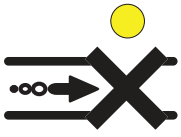
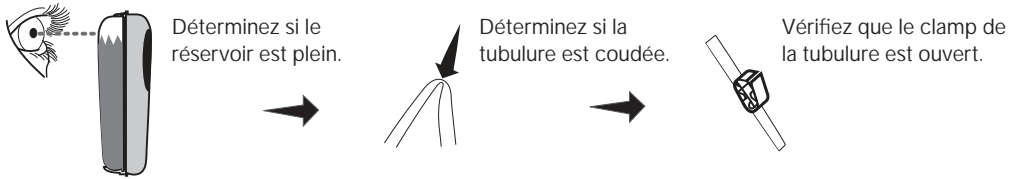

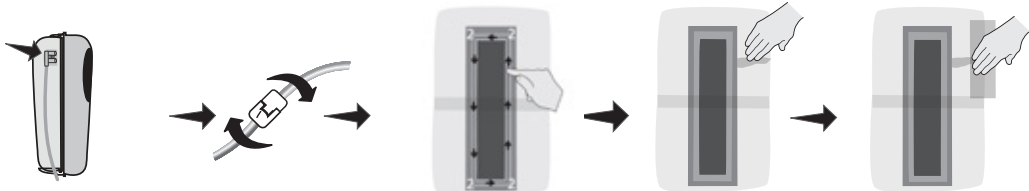
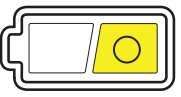
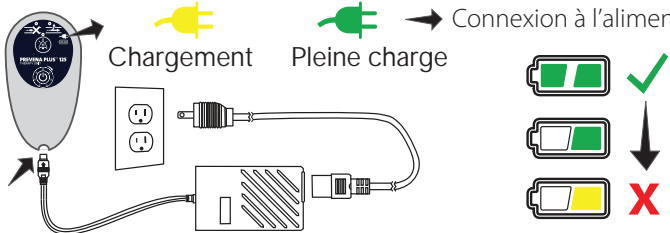






Niveau de charge de la batterie

Ceci est un guide rapide. Pour plus d'informations, consultez le Guide du clinicien du Système PREVENA™.

Type d'alarme	Résolution du problème
<p>Alarme de prise d'air Un signal sonore, un voyant jaune fixe.</p> 	<p>Pour vérifier l'application correcte du Pansement pour incision PREVENA™, l'Unité de thérapie PREVENA™125 est dotée de la Fonctionnalité VISICHECK™. Appuyez deux fois sur le bouton Marche/Arrêt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un voyant: excellent - Deux voyants: bon - Trois voyants: minime <p>Si la Fonctionnalité VISICHECK™ indique un problème de prise d'air «Minime», procédez comme suit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que le réservoir est verrouillé dans l'unité - Vérifiez que les connecteurs de tubulure sont complètement engagés et verrouillés. - À l'aide d'un doigt, lissez les éventuels plis dans l'adhésif - Utilisez les Bandelettes adhésives PREVENA™ (disponibles dans l'emballage du pansement) pour assurer une bonne étanchéité - Appuyez doucement, mais fermement, sur les bords du pansement
<p>Alarme de réservoir plein Deux signaux sonores, un voyant jaune fixe.</p> 	<p>Vérifiez le niveau de liquide du réservoir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si le réservoir n'est pas plein, vérifiez que la tubulure n'est ni coudée ni pincée 2. Si le réservoir est plein, mettez l'unité hors tension 3. Composer le 1 800 668-5403
<p>Alarme de batterie faible Faible : un signal sonore long, un voyant jaune fixe. Critique : un signal sonore, répété rapidement et dont le volume augmente, deux voyants jaunes fixes.</p> 	<p>Cette unité de thérapie est fournie avec trois piles AA.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maintenez le bouton enfoncé pendant cinq secondes pour éteindre l'unité 2. Poussez le couvercle situé à l'arrière de l'unité en appuyant dessus pour l'ouvrir 3. Placez trois piles AA (de préférence au lithium) 4. Pour fermer le couvercle, poussez-le en appuyant dessus 5. Maintenez le bouton enfoncé pendant deux secondes pour mettre l'unité sous tension
<p>Alarme d'erreur du système Un signal sonore, répété rapidement et dont le volume augmente, deux voyants jaunes fixes.</p> 	<p>Réinitialisez l'unité de thérapie, en procédant comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maintenez le bouton enfoncé pendant cinq secondes pour éteindre l'unité 2. Maintenez le bouton enfoncé pendant deux secondes pour remettre l'unité sous tension 3. Si l'unité de thérapie ne fonctionne toujours pas, composer le 1 800 668-5403
<p>Fin de la durée de vie du dispositif Trois voyants indiquent que le cycle de vie est terminé. Un signal sonore répété est émis pendant 15 secondes, puis l'unité s'éteint</p> 	<p>Contactez le représentant 3M (1800 668-5403)</p> <p>Cycle de vie = 192 heures (huit jours)</p>

Voyants et alarmes de l'Unité de thérapie PREVENA PLUS™ 125

Type d'alarme	Résolution du problème
<p>Alerte de blocage</p>  <p>L'alarme sonore de blocage émet deux signaux sonores toutes les 15 secondes.</p>	 <p>Déterminez si le réservoir est plein.</p> <p>Déterminez si la tubulure est coudée.</p> <p>Vérifiez que le clamp de la tubulure est ouvert.</p>
<p>Alarme de prise d'air</p>  <p>L'alarme de prise d'air émet deux signaux sonores toutes les 15 secondes.</p>	 <p>Vérifiez que le réservoir est correctement enclenché dans l'unité de thérapie. Lorsque le réservoir est installé, un dé clic se fait entendre.</p> <p>Vérifiez que les connecteurs de la tubulure sont bien enclenchés et verrouillés.</p> <p>Appuyez sur toute la longueur de la partie adhésive, à l'aide du film adhésif, afin d'assurer l'étanchéité du pansement.</p> <p>Lissez avec les doigts afin d'éliminer les plis éventuels.</p> <p>Utilisez les Bandelettes adhésives PREVENA™ ou le film adhésif restant au niveau du bord extérieur du film afin d'assurer l'étanchéité.</p>
<p>Alarme de batterie faible</p>  <p>L'alarme émet deux signaux sonores toutes les quatre minutes.</p>	 <p>Connexion à l'alimentation</p> <p>Chargement Pleine charge</p> <p>Pleine charge (environ neuf heures restantes).</p> <p>Batterie à moitié chargée (environ deux à sept heures restantes).</p> <p>Charge faible (environ deux heures de thérapie restantes). Chargez immédiatement l'unité pour éviter l'interruption de la thérapie.</p>
<p>Alarme d'erreur du système</p>  <p>Tous les voyants clignotent et deux signaux sonores se répètent toutes les 15 secondes.</p>	<p>Arrêtez puis redémarrez l'unité de thérapie.</p>  <p>Arrêt Marche</p> <p>Continuez la thérapie.</p> <p>Composer le 1 800 668-5403</p>
<p>Bouton d'interruption d'alarme</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez pendant trois secondes au centre du bouton d'interruption d'alarme pour interrompre l'alarme sonore pendant deux minutes Une fois activé, le bouton d'interruption d'alarme s'allume pour indiquer que l'interruption de l'alarme a été demandée. L'alarme sonore se répétera ensuite au bout de deux minutes, à moins que le problème ne soit résolu
<p>Fin de la thérapie</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Un voyant jaune fixe situé au-dessus de l'indicateur de cycle de vie de la thérapie s'allume L'unité de thérapie émet huit signaux sonores suivis d'un signal sonore continu de cinq secondes, ensuite, l'unité de thérapie s'éteint Si l'unité de thérapie arrive en fin de cycle et que l'utilisateur tente de l'allumer, une alarme retentit pendant trois secondes, puis s'éteint Prévenez le médecin référent ou le personnel soignant à la fin du traitement



Offert au Canada auprès des distributeurs autorisés de 3M-KCI.
KCI USA, Inc., une société de la Compagnie 3M
KCI est détenue et exploitée par la Compagnie 3M

KCI Medical Canada Inc.
75, promenade Courtneypark O.,
local 4
Mississauga (Ontario)
L5W 0E3

KCI USA, INC.
12930 IH 10 West
San Antonio, TX
78249

Remarque: Il existe des indications, des contre-indications, des mises en garde, des précautions et des renseignements de sécurité spécifiques pour ces produits et traitements. Veuillez consulter un clinicien et les directives d'utilisation du produit avant l'utilisation. Ce matériel est destiné aux professionnels de la santé.

3M et Prevena sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2022, 3M. Tous droits réservés. Les autres marques indiquées sont des marques et/ou des marques déposées. Toute utilisation non autorisée est interdite. 2204-23874 F.