

1 Bestimmen Sie die zu erwartende Menge an Exsudat bis zum nächsten geplanten Verbandwechsel
Beurteilen Sie, ob die Haut fragil oder intakt ist.


	Geringe bis starke Exsudation 	Mäßige bis sehr starke Exsudation 
Fragile Haut	<p>Portfolio 3M™ Tegaderm™ Foam Schaumverbände</p>  <p> 3M™ Tegaderm™ Silicone Foam, Silikon-Schaumverband mit Hafrand 3M™ Tegaderm™ Silicone Foam, Silikon-Schaumverband ohne Hafrand 3M™ Tegaderm™ Foam hochleistungsfähiger, nicht klebender Schaumverband </p> <p>Der Verband hilft zu erkennen, wann der richtige Zeitpunkt für den Wechsel ist.</p>  <p>Ok Ok Jetzt wechseln</p>	<p>3M™ Kerramax Care™ Superabsorbierende Wundauflage</p>  <p> 10 × 10 cm 13,5 × 13,5 cm 10 × 22 cm 20 × 22 cm 20 × 30 cm 20 × 50 cm </p>  <p> 92 ml* 177 ml* 221 ml* 404 ml* 723 ml* 1310 ml* </p>
Intakte Haut	<p>3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive Hochleistungsfähiger Schaumverband</p> 	<p>3M™ Kerramax Care™ Superabsorbierende Wundauflage mit Hafrand</p> 


2 Schützen Sie den Wundbereich mit 3M™ Cavilon™ Reizfreiem Hautschutz

3 Gegebenenfalls Kompressionstherapie in Erwägung ziehen (Verbandoptionen ohne Hafrand sind zu empfehlen)


Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Produkt	Abmessung	Stk./Pkg.	PZN 
3M™ Tegaderm™ Silicone Foam, Silikon-Schaumverband				
90631	Ohne Haftrand	10 × 10,8 cm	10	16394828
90632	Ohne Haftrand	15 × 15 cm	10	12530370
90640	Mit Haftrand	7,5 × 7,5 cm	10	16394840
90641	Mit Haftrand	10 × 10 cm	10	16398565
90642	Mit Haftrand	15 × 15 cm	10	16398571
90643	Mit Haftrand	5 × 5 cm	10	12530306
90646	Ferse und Kontur	16,5 × 16,5 cm	5	12530312
90647	Sakral klein	15 × 17 cm	10	12530329
90648	Sakral groß	18,5 × 22 cm	5	12530341

Artikel-Nr.	Abmessung Wundauflage	Abmessung Verband	Stk./Pkg.	PZN 
3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive, hochleistungsfähiger Schaumverband				
90610 (quadratisch)	5 × 5 cm	8,8 × 8,8 cm	10	16394722
90611 (oval)	6 × 7,6 cm	10 × 11 cm	10	16394739
90612 (quadratisch)	10 × 10 cm	14,3 × 14,3 cm	10	16394745
90613 (oval)	10 × 11 cm	14,3 × 15,6 cm	5	16394751
90614 (mini oval)	3,1 × 3,8 cm	6,9 × 7,6 cm	10	16394768
90615 (Kleeblatt-Form)	2,5 × 2,5 cm	6,9 × 6,9 cm	10	16394774
90616 (oval)	14 × 17,1 cm	19 × 22,2 cm	5	16394805
90619 (Fersen/Ellenbogen)	7,6 × 7,6 cm	13,9 × 13,9 cm	5	16394811

Artikel-Nr.	Abmessung	Stk./Pkg.	PZN 
3M™ Tegaderm™ Foam, hochleistungsfähiger, nicht klebender Schaumverband			
90600	5 × 5 cm	10	16394656
90601	10 × 10 cm	10	16394662
90602	10 × 20 cm	5	16394679
90603	20 × 20 cm	5	16394685
90604 (Drainageverband)	8,8 × 8,8 cm	10	16394691

Artikel-Nr.	Abmessung	Stk./Pkg.	PZN 
3M™ Kerramax Care™ Superabsorbierende Wundauflage			
PRD500-025	5 × 5 cm	10	11158419
PRD500-065	6,5 × 8 cm	10	15882661
PRD500-050	10 × 10 cm	10	11140365
PRD500-050-B50	10 × 10 cm	50 (bulk pack)	12548737
PRD500-120	10 × 22 cm	10	11140371
PRD500-120-B50	10 × 22 cm	50 (bulk pack)	12548766
PRD500-240	20 × 22 cm	10	11140388
PRD500-240-B30	20 × 22 cm	30 (bulk pack)	12548772
PRD500-380-B10	20 × 30 cm	10	14056346
PRD500-380-B30	20 × 30 cm	30 (bulk pack)	12548789
PRD500-600-B10	20 × 50 cm	10	14056323

Artikel-Nr.	Abmessung Wundauflage	Abmessung Verband	Stk./Pkg.	PZN 
3M™ Kerramax Care™, Superabsorbierende Wundauflage mit Haftrand				
CWL1000	6,5 × 8,5 cm	16 × 16 cm	5	11140425
CWL1001	8 × 18 cm	16 × 26 cm	5	11140431
CWL1002	18 × 17 cm	26 × 26 cm	5	11140448

*Lodhi, N. & Warde, D. Free-swell absorbency and absorbency under compression testing of Kerramax Care (all SKUs) – internal report CHC R839. Crawford Healthcare Ltd. Knutsford, UK: 2019.

3M, Kerramax Care und Tegaderm sind eingetragene Warenzeichen der 3M Company. © 3M 2022. Alle Rechte vorbehalten. OMG356725, EB12-0217, 59d6aad05144