
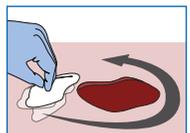
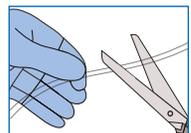
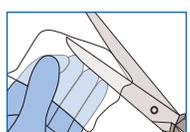


## Guide d'application du pansement du système de thérapie 3M™ Snap™\*\*

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><b>1</b> Préparer le lit de la plaie et la peau périlésionnelle en suivant le protocole hospitalier.</p>  |    | <p><b>8</b> Retirer le feuillet protecteur du pansement 3M™ Snap™ et placer ce dernier sur la plaie. Puis le lisser.</p>  |    |
| <p><b>2</b> Si nécessaire, appliquer un produit de protection cutanée sur la peau entourant la plaie et laisser sécher.</p>  |    | <p><b>9</b> Si nécessaire, couper la tubulure du pansement afin de l'ajuster à la longueur souhaitée (découper en respectant un «angle droit» et non en biais).</p>   |    |
| <p><b>3</b> En cas de besoin, utiliser un pansement interface non-adhérent, à mailles étroites en le découpant au préalable à la taille de la plaie et en veillant à n'utiliser qu'une seule couche (ne pas superposer). Puis le placer sur le lit de la plaie.</p>  |    | <p><b>10</b> Insérer entièrement la tubulure dans le raccord.</p>   |    |
| <p><b>4</b> Découper la mousse afin qu'elle corresponde à la taille et à la forme de la plaie.</p>   |   | <p><b>11</b> Connecter la cartouche de thérapie 3M™ Snap™ au raccord de la tubulure.</p>  |   |
| <p><b>5</b> Placer la mousse dans la cavité de la plaie. Noter que cette dernière doit remplir la cavité.</p>  |  | <p><b>12</b> Pour activer la cartouche de thérapie Snap, appuyer sur la clé d'activation/de réinitialisation afin de la libérer, puis retirer la clé de la cartouche de thérapie Snap. Selon la taille du pansement, la cartouche peut nécessiter plusieurs amorçages.</p>  |  |
| <p><b>6</b> Retirer l'hydrocolloïde 3M™ Snap™ SecurRing™ de l'emballage. Décoller la protection antiadhésive des deux côtés.</p>   |  | <p><b>13</b> Contrôler le fonctionnement de la pression négative. Le système de thérapie 3M™ Snap™ fonctionne correctement si :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ l'indicateur de capacité vert est visible et stationnaire dans la fenêtre du réservoir ;</li> <li>▶ le pansement présente un aspect « aspiré/comprimé » ;</li> <li>▶ le pansement est dur au toucher.</li> </ul> |  |
| <p><b>7</b> Modeler et étirer doucement l'hydrocolloïde 3M™ Snap™ SecurRing™ afin qu'il s'adapte aux contours extérieurs de la plaie, en laissant environ 1 cm de peau saine entre l'hydrocolloïde Snap SecurRing et le bord de la plaie. Si la surface de la plaie est importante, il est possible d'utiliser plusieurs anneaux, en les collant les uns aux autres.</p> |  | <p><b>14</b> Fixer la cartouche de thérapie Snap à un membre ou à la ceinture du patient à l'aide de la sangle de thérapie 3M™ Snap™ (le cas échéant).</p>  |  |

### Problème

Il n'y a **pas** de joint étanche sur le pansement et l'indicateur de décharge de pression **rouge** est visible **ou** l'indicateur de capacité **vert** ne reste pas stationnaire dans la fenêtre du réservoir.

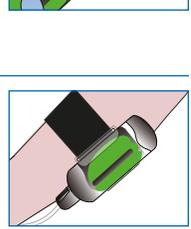

### Causes possibles

Les raccords de la tubulure ne sont peut-être pas correctement branchés **et/ou** il y a peut-être une fuite entre l'hydrocolloïde et la peau.



### Solutions possibles

- ▶ Vérifier que les raccords de la tubulure soient correctement branchés
- ▶ Lisser le pansement avec les doigts pour lisser les plis
- ▶ Ajouter du film adhésif pour que les angles du pansement soient bien étanches

Il n'y a **pas** de joint étanche sur le pansement (le pansement semble ne pas avoir été aspiré) et l'indicateur de capacité **vert** est stationnaire.



Il est possible que la tubulure soit obstruée.



- ▶ Examiner la tubulure pour détecter une occlusion ou des pluries éventuelles. Le cas échéant, repositionner la tubulure ou remplacer le pansement Snap
- ▶ Il peut y avoir une occlusion au niveau du pansement ; remplacer le pansement

\*Au Service de la Vie. \*\*Pour voir les informations de sécurité et les instructions d'utilisation complètes, se référer à la notice d'utilisation du produit.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local.

**Remarque : il existe des indications, des contre-indications, des mises en garde, des précautions et des informations de sécurité propres à ces produits et thérapies. Consultez un médecin et reportez-vous au mode d'emploi du produit avant toute utilisation. Ce document est destiné aux professionnels de santé.**

Cartouches Thérapie 3M™ Snap™ : Dispositifs Médicaux de Classe IIa, CE 2797. Pansements Thérapie 3M™ Snap™ : Dispositifs Médicaux de classe IIb, CE 2797. Hydrocolloïde 3M™ Snap™ SecurRing™ : Dispositif Médical de classe Is, CE 2797. Sangle Thérapie 3M™ Snap™ : Dispositif médical de classe I, CE. KCI Manufacturing IDA Business & Technology Park Dublin Road Athlone, co. Westmeath Ireland. Edition : Décembre 2021.

© 2022 3M. Tous droits réservés. 3M et les autres marques mentionnées sont des marques et/ou des marques déposées. Utilisation interdite sans autorisation. PRA-PM-EU-00500 (12/21). OMG260082.