



FUTURO™ ECHARPE

46204



SOUTIEN
LÉGER



MATÉRIAU
RESPIRANT

Utilisation prévue: Pour aider à soutenir le coude et le bras.

Composition: Polyester, POM, PVC, Coton, Mousse Polyuréthane.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

Aide à soutenir le poids du bras.

INDIQUÉ POUR:

Soutien pendant la convalescence à la suite d'une fracture, d'une entorse, d'une intervention chirurgicale ou pour un soutien général du bras

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- ① Le coussinet confortable procure un amortissement à l'épaule.
- ② Boucle à ouverture rapide.
- ③ La boucle pour le pouce maintient la main dans une position confortable et aide à réduire la fatigue.

TAILLES:

Référence	PHC	Tailles
46204	7840987	Réglable

MODE D'EMPLOI:



Ouvrir l'écharpe. Mettre le bras avec le coude dans l'angle.



Placer la sangle dans votre dos sur l'épaule opposée. Accrocher la sangle dans la boucle. Le bras doit reposer à l'horizontal.



Insérer le pouce dans la boucle. Positionnez le coussinet sur l'épaule pour plus de confort. Pour l'enlever, passez simplement la sangle par dessus votre tête. Il n'est pas nécessaire de déboucler une fois que l'écharpe est correctement ajustée.

3M (Schweiz) GmbH
Consumer Health Care
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
www.3mschweiz.ch/futuro

