



# FUTURO™ COLLIER CERVICAL

09027



MATÉRIAU  
RESPIRANT

Utilisation prévue : Lors d'une utilisation selon la prescription de votre médecin: nerfs coincés ou raideur du cou, confort requis après une blessure par coup de lapin.

Composition: Polyuréthane, Acrylique Modal, Nylon, Coton, Polyester.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

Fournit le confort requis et aide à soutenir un cou raide ou blessé.

## INDIQUÉ POUR:

Lors d'une utilisation selon la prescription de votre médecin : nerfs coincés ou raideur de cou. Confort requis après une blessure par coup de lapin.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:


- ① Réglable en circonférence et en hauteur pour un ajustement personnalisé.
- Confortable pour une utilisation de jour ou de nuit.

## TAILLES:



Référence	PHC	CM
09027	7840991	Circonférence: 27.9-50.8 Hauteur: 6.35-12.7

## MODE D'EMPLOI:

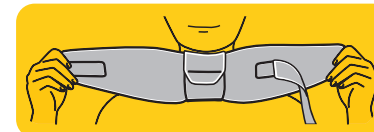

Pour appliquer la minerve, tenez-la avec les deux mains, en positionnant le rabat de la jugulaire centrale face à vous et l'attache à crochets dans la main droite, face à l'extérieur du col. Placez le col devant le cou, la jugulaire centrée sous le menton.



Enroulez l'extrémité gauche de la minerve autour de l'arrière du cou, et fixez-la à la partie opposée.



Étirez ensuite la bande de velours souple à partir du côté gauche pour qu'elle se chevauche et fixez fermement la bande de l'attache à crochets. Ajustez les fixations jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable.



En maintenant le col fermement en place, détachez le rabat de la jugulaire. Serrez ou desserrez la jugulaire pour adapter la minerve confortablement mais avec un soutien ferme sous le menton. Ré-attachez ensuite.

3M (Schweiz) GmbH  
Consumer Health Care  
Eggstrasse 91  
8803 Rüschlikon  
[www.3mschweiz.ch/futuro](http://www.3mschweiz.ch/futuro)

