



FUTURO™ HALSKRAUSE

09027



Bietet den erforderlichen Komfort und hilft, einen steifen oder verletzten Nacken zu unterstützen.

IDEAL GEEIGNET FÜR:

Bei Anwendung wie von Ihrem Arzt verschrieben: festsitzende Nerven oder Nackensteifigkeit. Komfort nach einem Schleudertrauma erforderlich.

EIGENSCHAFTEN:


- ① Im Umfang und in der Höhe verstellbar für eine individuelle Passform.
- Bequem für den Einsatz am Tag oder in der Nacht.

GRÖSSE:



Artikelnummer	PHC	CM
09027DABI	7840991	Umfang: 27.9-50.8 Höhe: 6.35-12.7

TRAGEANWEISUNG:

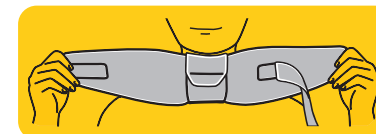

Um die Halskrause anzubringen, halten Sie sie mit beiden Händen fest und positionieren Sie den Riemen des zentralen Kinnriemens in der rechten Hand mit Blick auf die Außenseite des Kragens. Legen Sie den Kragen vor den Hals, den Kinnriemen mittig unter das Kinn.



Enroulez l'extrémité gauche de la minerve autour de l'arrière du cou, et fixez-la à la partie opposée.



Wickeln Sie das linke Ende des Halskragens um den Nacken und befestigen Sie es am gegenüberliegenden Teil



Halten Sie den Kragen fest an Ort und Stelle und lösen Sie den Gurt vom Kinnriemen. Ziehen Sie den Kinnriemen fest oder lösen Sie ihn, damit die Halskrause bequem, aber mit festem Halt unter dem Kinn platziert wird. Dann wieder mit dem Klettverschluss fixieren.

Verwendungszweck: Bei Verwendung wie von Ihrem Arzt verschrieben: steifer Nacken, Komfort nach einem Schleudertrauma erforderlich.

Zusammensetzung: Polyurethan, Acryl Modal, Nylon, Baumwolle, Polyester.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

3M (Schweiz) GmbH
Consumer Health Care
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
www.3mschweiz.ch/futuro

