



FUTURO™ ARMSCHLINGE

46204

**GERINGER
STÜTZGRAD**



ATMUNGSAKTIVES
MATERIAL

Verwendungszweck: Zur Unterstützung des Ellbogens und des Arms.

Zusammensetzung: Polyester, POM, PVC, Baumwolle, Polyurethanschaum.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

Hilft, das Gewicht des Arms zu stützen.

IDEAL FÜR:

Unterstützung während der Schonungsphase nach einem Bruch, einer Verstauchung, einer Operation oder zur allgemeinen Unterstützung des Arms.

EIGENSCHAFTEN:

- ① Das bequeme Polster sorgt für eine Polsterung der Schulter.
- ② Schnell zu öffnende Schnalle.
- ③ Die Daumenschleife hält die Hand in einer bequemen Position und hilft, Ermüdungserscheinungen zu reduzieren.


GRÖSSE:

Artikelnummer	PHC	Grösse
46204	7840987	Anpassbar

TRAGEANWEISUNG:



Öffnen Sie die Schlinge. Den Arm mit dem Ellbogen in den Winkel legen.

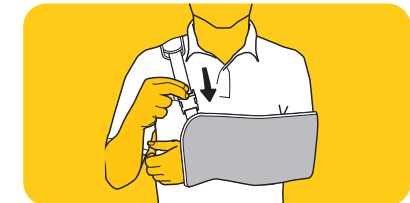

Legen Sie den Gurt auf Ihrem Rücken über die gegenüberliegende Schulter. Hängen Sie den Gurt in die Schnalle ein. Der Arm sollte waagerecht liegen.



Führen Sie den Daumen in die Schnalle ein. Positionieren Sie das Polster für mehr Komfort auf der Schulter. Um es abzunehmen, ziehen Sie den Gurt einfach über Ihren Kopf. Wenn der Schal richtig sitzt, brauchen Sie ihn nicht mehr zu lösen.

3M (Schweiz) GmbH
Consumer Health Care
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
www.3mschweiz.ch/futuro

