



FUTURO™ HANDGELENK-SCHIENE

10770

 MITTLERER
STÜTZGRAD



ATMUNGSAKTIVES
MATERIAL

Empfohlene Anwendungen: Bietet Unterstützung bei steifen, schwachen oder verletzten Handgelenken.

*Ärzte empfehlen oft die Anwendung einer festen Handgelenkbandage während der Behandlung des Karpaltunnelsyndroms und anderer schmerzhafter Handgelenkbeschwerden.

Zusammensetzung: Aluminium, Polyester, Polyurethane, Nylon, Spandex.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

**Stabilisierung und Unterstützung
bei schmerzenden, schwachen oder
verletzten Handgelenken.**

IDEAL GEEIGNET FÜR:

Unterstützung bei häufigen Verletzungen wie Verstauchungen, Zerrungen und Symptome des Karpaltunnelsyndroms*

EIGENSCHAFTEN:

- 1 Tief geschnittenes, ergonomisches Design für freie Fingerbeweglichkeit.
- 2 Stütze der Handfläche bietet mittlere Stabilität.
- 3 Schlauchform mit drei Verschlüssen für passgenauen Sitz.

GRÖSSE:

Artikelnummer	PZN	CM
10770	5680778	14-21.5

Handgelenkumfang an der schmalsten Stelle messen.



TRAGEANWEISUNG:



Öffnen Sie die Verschlüsse. Stecken Sie die Hand in die Bandage und positionieren Sie die Metallschiene entlang der Handfläche.



Schließen Sie das mittlere Band und dann die Bänder daneben.

Zur Verwendung an der linken Hand: Ziehen Sie die Schiene aus dem Fach. Halten Sie die Schiene gerade, drehen Sie die Bandage um 180 Grad und stecken Sie die Schiene in das Fach auf der anderen Seite. Stecken Sie das Ende der Schiene ein.



Stellen Sie alle Bänder so ein, dass Sie ein festes, aber bequemes Tragegefühl haben.

3M Österreich GmbH
Consumer Health Care, Euro Plaza, Gebäude J
Kranichbergstrasse 4, 1120 Wien
www.futuro.de

3M