



FUTURO™ Unterstützende Bauchbandage

46200-01



Stützt und hebt den Bauch

IDEAL GEEIGNET FÜR:
Grundlegende postoperative Unterstützung

EIGENSCHAFTEN:

- 1 Umhüllendes, stromlinienförmiges Design mit verstellbaren Befestigungselementen für individuelle Passform.
- 2 Weiches Futter für Komfort.

GRÖSSE:



Artikelnummer	PZN	Grösse	CM
46201	5680755	M	81.3-106.7
46200	5680749	L	106.7-132.1




ATMUNGSAKTIVES
MATERIAL

Verwendungszweck: Unterstützung für einen schlaffen Bauch.

Zusammensetzung: Polyester, Nylon, Elasthan, Baumwolle, Polyuréthane.
Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf. 3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

TRAGEANWEISUNG:

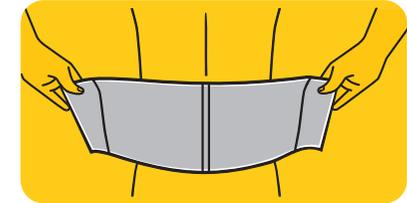

Öffnen Sie den Gürtel und legen Sie ihn auf ein Bett, die weiche Seite und das FUTURO-Etikett oben auf der gegenüberliegenden Seite.

Legen Sie sich hin und positionieren Sie den Gürtel unter Ihrem Rücken. Greifen Sie den Gürtel und dehnen Sie es auf den Bauch.



Atmen Sie vollständig aus und ziehen Sie mit der rechten Hand die rechte Seite des Gurtes am Klettverschluss und befestigen Sie den Verschluss. Die Passform sollte fest, aber bequem sein. Wenn nötig, dehnen Sie den Gürtel, um Falten zu entfernen.

3M Österreich GmbH
Consumer Health Care, Euro Plaza, Gebäude J
Kranichbergstrasse 4, 1120 Wien
www.futuro.de

