Découper le long des lignes

Checklist de départ du patient ordonné par le clinicien


Le Pansement pour incision PREVENA™ a été posé le	/	/	
Le pansement doit être retiré le			
par			

S'ASSURER que le Pansement pour incision PREVENA[™] est bien étanche

DÉTERMINER si des sécrétions s'écoulent toujours de l'incision et si des réservoirs supplémentaires sont nécessaires

IDENTIFIER l'Unité de thérapie PREVENA™ appropriée pour le patient et les réservoirs correspondants



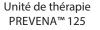





Unité de thérapie PREVENA PLUS™ 125

VÉRIFIER le bloc d'alimentation :

- L'Unité de thérapie PREVENA™ 125 fonctionne avec des piles AA.
- L'Unité de thérapie PREVENA PLUS™ est équipée d'une batterie offrant environ neuf heures d'autonomie en une charge.

RENVOYER le patient à son domicile en lui fournissant :

- des réservoirs supplémentaires ;
- le Guide du patient concernant la Thérapie PREVENA™;
- un cordon d'alimentation (Unité de thérapie PREVENA PLUS™ uniquement)
- des bandelettes adhésives/du film adhésif supplémentaire.

CONSULTER les ressources du patient

Remarques:_		

INFORMATIONS IMPORTANTES

Patients: il est important d'aborder les avantages et risques potentiels d'une thérapie spécifique avec votre médecin pour déterminer si elle vous convient. Veuillez consulter votre médecin traitant concernant les questions spécifiques et les informations importantes relatives aux indications, contre-indications, avertissements, précautions et au fonctionnement de votre Unité de thérapie PREVENA™.

REMARQUE: des indications, contre-indications, mises en garde, précautions et informations de sécurité spécifiques sont applicables à ces thérapies et produits. Consultez un clinicien et lisez les instructions d'utilisation du produit avant toute application. Ce document est destiné aux professionnels de santé. La thérapie PREVENA™ est un dispositif médical de classe IIa. Marquage CE2797.

©Copyright 2020 3M. Tous droits réservés. 3M et les autres marques figurant dans ce document sont des marques et/ou des marques déposées. Utilisation non autorisée interdite.

PRA-PM-FR-00196 (06/20)



3M France Division Solutions Médicales 1 Parvis de l'Innovation - CS20203 95006 Cergy-Pontoise Cedex Tél +33 (0)1.30.31.61.61 www.3MFrance.fr/medical





pour la prise en charge de votre incision chirurgicale Votre médecin a choisi le Système PREVENA™ pour protéger votre incision. Il offre les avantages suivants :



Maintenir ensemble les bords de l'incision



Protéger contre les sources d'infection extérieures




Éliminer les liquides du site de l'incision

La protection de votre incision est essentielle à votre convalescence

- Une **incision** est une ouverture dans la peau et le tissu de l'organisme réalisée au cours d'une intervention chirurgicale, puis fermée à l'aide de produits comme des sutures chirurgicales, des agrafes ou de ces deux méthodes.
- Les incisions cicatrisent aussi bien à la surface de la peau qu'en dessous.
- Le soin de votre incision est une étape essentielle qui pourra avoir un impact sur la durée de votre convalescence et votre qualité de vie.

La Thérapie PREVENA™:

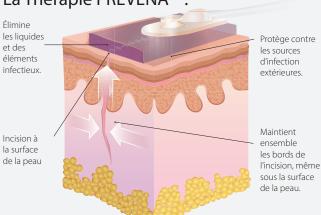

FAQ

Combien de temps dois-je garder le dispositif de Thérapie PREVENA™ sur mon incision ?

 Portez le système pendant toute la durée prescrite par votre médecin. L'unité de thérapie s'éteindra une fois la thérapie terminée.

Mon pansement pour incision devra-t-il être remplacé ?

 Généralement, le pansement n'est pas changé. Suivez les instructions de votre médecin.

Que faire lorsque le Système PREVENA™ émet des alarmes ?

 L'unité de thérapie émet des alarmes visuelles et sonores pour vous alerter d'un problème potentiel, comme une batterie faible ou une fuite d'air. La plupart des problèmes se résolvent facilement. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide du patient de la Thérapie PREVENA™.

Où puis-je obtenir des informations supplémentaires ?

- Le Guide du patient concernant la Thérapie PREVENA™ contient des informations de sécurité et des détails plus complets sur l'utilisation de votre dispositif de Thérapie PREVENA™
- Contactez votre médecin pour toute question médicale. En cas d'urgence, appelez votre ligne d'assistance médicale nationale.

Comment porter votre Unité de thérapie PREVENA™

Vous devez porter l'unité portative **en permanence** pendant la durée prescrite par votre médecin. Suivez les instructions contenues dans cette brochure en ce qui concerne l'utilisation la nuit ou sous la douche. L'unité peut être portée sous les vêtements, et elle est fournie avec une sacoche de transport dotée de lanières ajustables que vous pouvez utiliser de plusieurs façons.



En quoi consiste la Thérapie PREVENA™?

La Thérapie PREVENA™ est un système portable et jetable qui utilise le phénomène de **pression négative** (à l'instar d'un aspirateur) pour protéger une incision.

Présentation du Système PREVENA™

Après votre intervention chirurgicale, vous recevrez le Système PREVENA PEEL & PLACE™ ou le Système PREVENA PLUS™. Ces deux déclinaisons du Système PREVENA™ fonctionnent de la même manière, à quelques détails près.

Composants de votre système :

- Une unité de thérapie appliquant une pression négative sur le pansement
- Un pansement doté d'une protection étanche placé sur votre incision
- Une tubulure de connexion.
- Un réservoir qui recueille le liquide
- Un chargeur de batterie (L'Unité de thérapie PREVENA PLUS™ fonctionne avec une batterie rechargeable)
- Une sacoche de transport avec lanières réglables



REMARQUE : le Système PREVENA™ peut être utilisé sur différents types d'incision. La taille et l'emplacement de votre incision peuvent ne pas correspondre à l'illustration ci-dessus.

Entretien de votre Unité de

Unité de thérapie PREVENA PLUS™ 125

Système:

Placez votre unité de thérapie dans un endroit sûr, de sorte que :

- la tubulure ne soit pas tordue ou pincée;
- l'unité ne risque pas de tomber d'une table ou sur le sol.



Douche:

Si votre médecin vous y autorise, vous pouvez prendre une douche rapide et superficielle. Ne dirigez pas le jet de la douche directement sur l'unité de thérapie.

N'immergez pas le pansement dans l'eau. Avant la douche, déconnectez le pansement de l'unité de thérapie.

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que la thérapie s'arrête.
- Fermez le clamp situé sur la tubulure de connexion, le cas échéant.
- 3. Débranchez la tubulure de l'unité de thérapie.
 - Lors du séchage avec une serviette, prenez soin de ne pas déplacer le pansement.

Consultez le Guide du patient concernant la thérapie PREVENA PLUS™ pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Batterie:

- Cette unité de thérapie comporte une batterie rechargeable associée à un chargeur.
- Emportez le chargeur si vous sortez pendant de longues périodes.
- À des fins pratiques, envisagez de charger la batterie de l'unité de thérapie lorsque vous dormez.

thérapie PREVENA™

Unité de thérapie PREVENA™ 125

Système:

Placez votre unité de thérapie dans un endroit sûr, de sorte que :

- la tubulure ne soit pas tordue ou pincée;
- l'unité ne risque pas de tomber d'une table ou sur le sol.



Douche:

Si votre médecin vous y autorise, vous pouvez prendre une douche rapide et superficielle. Ne dirigez pas le jet de la douche directement sur l'unité de thérapie.

N'immergez pas le pansement dans l'eau.

 Lors du séchage avec une serviette, prenez soin de ne pas déplacer le pansement.

Consultez le Guide du patient concernant la Thérapie PREVENA™ pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Batterie:

- Cette unité de thérapie est fournie avec trois piles de taille AA et ne peut pas être rechargée.
- Il est recommandé de disposer de piles de rechange. Lorsque les piles sont vides, consultez les informations sur le remplacement des piles dans le Guide du patient concernant la Thérapie PREVENA™.

Votre pansement et la Thérapie PREVENA™

Ne pas tenter de retirer ni de soulever le pansement pour regarder dessous pendant toute la durée du traitement.