

3M™ Fikseringsenhet til nasalsonder


Utviklet for å gi pålitelig fiksering, slik at nasogastriske sonder holdes på plass ved hjelp av en brukervennlig løsning. Løsningen bidrar til en praksis som hindrer trykkskade og gir minimal risiko for hudskade knyttet til medisinsk klebestoff (MARS1).

Ikke-klebende del ved neseroten

Bidrar til at sonden får henge fritt, slik at kontakten mellom sonden og pasientens hud reduseres.

Gjennomsiktig for bedre innsyn

Sjekk huden for komplikasjoner, og hold øye med sondens plassering uten å ta av bandasjen.

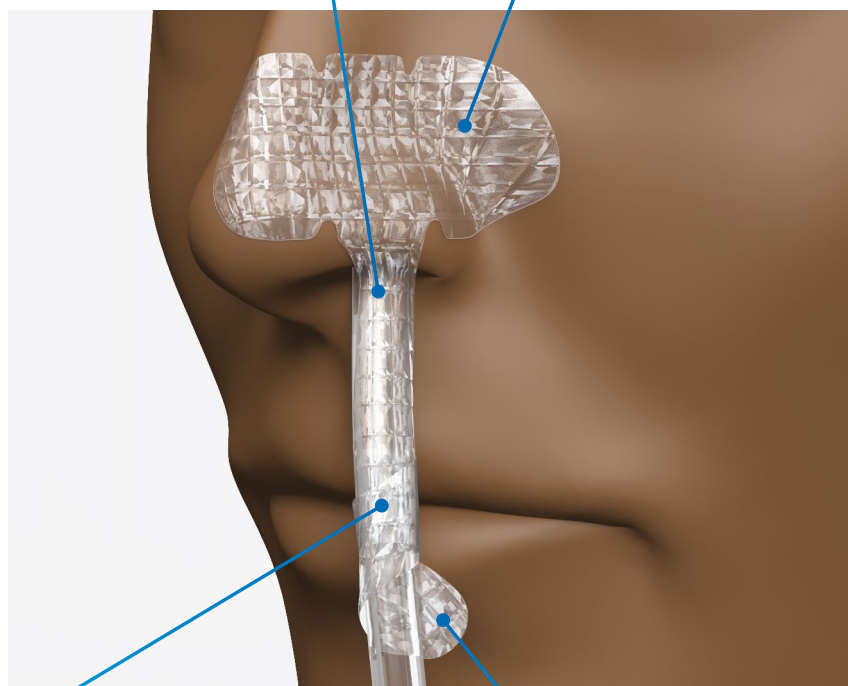

Bakside av fibernet

Gir ekstra styrke.

Ikke-klebende flik for fjerning

Enkel fjerning av bandasjen i sin helhet.



Hudvennlige egenskaper: Fjæren viser til produkter som gir en sterk og sikker fiksering, samtidig som hudskade minimeres.

Pålitelig fiksering

Unikt klebestoff som fikserer nasogastriske sonder på tørr hud og som kan sitte på i opptil 48 timer med minimal forskyvning, selv etter at det blir vått og fett.

Lett å bruke

Todelt beskyttelsespapir gjør det enkelt å applikere med hansker – ikke-klebende flik i enden gjør det enkelt å fjerne. Støtter standardisering av teknikk.

Hudvennlig

Ikke-sensibiliserende klebestoff har lav risiko for å gi dermatitt og minimerer smerte og skade på hud ved fjerning.^{1,2}

Utviklet for å bidra til redusert risiko for trykksår

Det ikke-klebende området er utviklet for å gi minimalt trykk ved neseroten, og siden produktet er gjennomsiktig, er det lett å observere huden.

1. Arkiverte 3M-data. EM-05-014937.


2. Arkiverte 3M-data. EM-05-014954.

Fikseringsløsningen du velger for pasientene dine, enten en fikseringsbandasje eller teip, skal holde sonder på plass og samtidig sikre minst mulig forskyvning for dermed å bidra til å unngå avbrudd i den nasogastriske (NG) behandlingen. Vurder prestasjonen til 3M™ Fikseringsenhet til nasalsonder i en komparativ studie.

En sammenligning mellom 3M™ Fikseringsenhet til nasalsonder og Hollister® Ernæringssondeklemme.¹

Mer pålitelig fiksering:

3M™ Fikseringsenhet til nasalsonder hadde en statistisk høyere andel av enheter som fortsatt var festet til huden 48 timer og 72 timer etter applikasjon enn Hollister® Ernæringssondeklemme.*

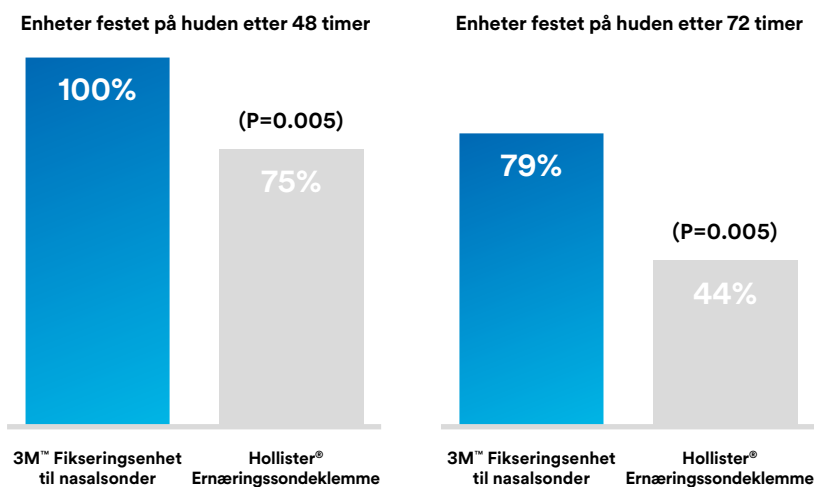

Mindre forskyvning:

3M™ Fikseringsenhet til nasalsonder hadde forskjøvet seg 60 % mindre enn Hollister® Ernæringssondeklemme etter 72 timer.**



Det sikre valget. Vær sikker på at 3M™ Fikseringsenhet til nasalsonder gir en konsekvent sterk, men samtidig skånsom fiksering.

For mer informasjon gå til 3M.com/Medical eller kontakt din lokale salgsrepresentant i 3M Health Care.

Se produktets bruksanvisning for annen viktig informasjon.

Bestillingsinformasjon

Produkt	Produktnavn	Artikkelnummer	Størrelse	Enheter/eske	Esker/kartong
	3M™ Fikseringsenhet til nasalsonder, Stor	1501NG	5.7cm x 7.3cm	50	4
	3M™ Fikseringsenhet til nasalsonder, Liten	1500NG	4.5cm x 4.7cm	50	4

3M Medical Solutions Division
3M Norge AS
Tærudgata 16
2004 Lillestrøm

*Resultat av en komparativ, prospektiv klinisk studie som involverte 64 friske personer over 3 dager med bruk.

**Et 50 grams vektloadd ble festet på hver enhet i 15 minutter daglig for å simulere en sonde. Prosentverdiene ble fastsatt ved hjelp av forskjellen mellom enheter med forskyvning 30 % (3M) og 78 % (Hollister).