



# Prevena™

Sistema de Manejo de Incisiones

## Unidad de Terapia 3M™ Prevena™ 125

### Indicadores y Alertas



Indicador de precaución



Alerta sonora (silenciada)

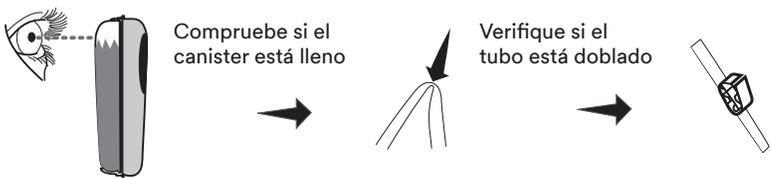
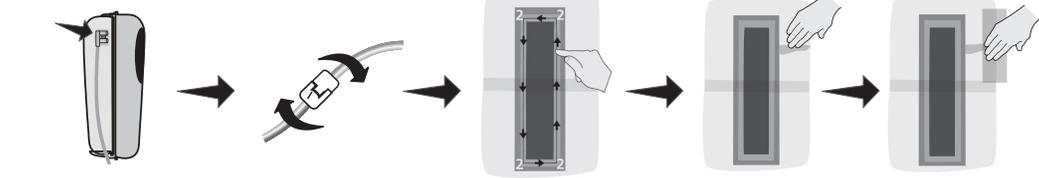
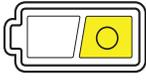
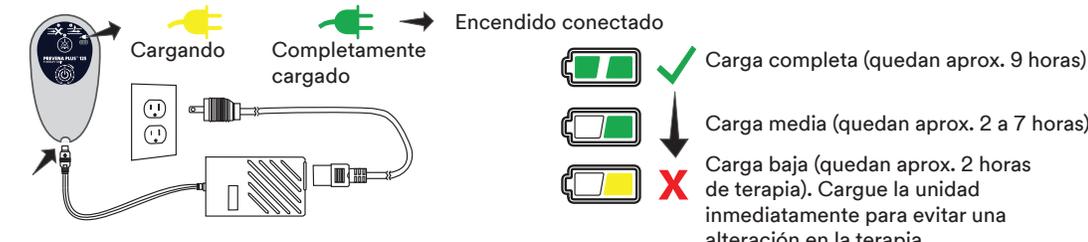


Nivel de batería

Esta es una guía rápida. Encontrará más información en la Guía para Clínicos de la Terapia 3M™ Prevena™

Tipo de alerta	Cómo solucionarlo
<p><b>Alerta de filtración</b> Un pitido, una luz amarilla fija</p> 	<p>Para garantizar la correcta aplicación del Apósito Incisional 3M™ Prevena™, la Unidad de Terapia 3M™ Prevena™ Plus 125 incorpora la función Visicheck™. Pulse dos veces el botón ON/OFF.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una luz: Mejor</li> <li>- Dos luces: Bueno</li> <li>- Tres luces: Marginal</li> </ul> <p>Si la función Visicheck™ indica una filtración "Marginal", siga estos pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asegúrese que el canister esté correctamente encajado y bloqueado en la unidad.</li> <li>- Compruebe que los conectores de los tubos estén bien encajados y bloqueados.</li> <li>- Utilice el dedo para alisar cualquier pliegue del adhesivo.</li> <li>- Utilice 3M™ Prevena™ Patch Strips (que se encuentran en el paquete del apósito) para ayudar a sellar las filtraciones.</li> <li>- Presione suave de forma continua alrededor de los bordes del apósito.</li> </ul>
<p><b>Alerta de canister lleno</b> Dos pitidos, una luz amarilla fija</p> 	<p>Compruebe el nivel de fluido en el canister</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si el canister está lleno, apague la unidad y cámbielo.</li> <li>2. Si el canister no está lleno, compruebe si hay dobleces o pellizcos en el tubo.</li> <li>3. Si la terapia continua en alerta, contacte a su representante de 3M.</li> </ol>
<p><b>Alerta de batería baja</b> Baja- un pitido lento, una luz amarilla fija</p> <p>Crítica- un pitido que se repite rápidamente aumentando el volumen, dos luces amarillas fijas</p> 	<p>Esta unidad de terapia viene con tres pilas tipo AA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantenga pulsado cinco segundos para apagar.</li> <li>2. Presione y empuje el panel en la parte posterior de la unidad para abrirlo.</li> <li>3. Inserte tres pilas tipo AA (se recomiendan pilas de litio).</li> <li>4. Presione y empuje para cerrar el panel.</li> <li>5. Mantenga pulsado dos segundos para encender.</li> </ol>
<p><b>Alerta de error del sistema</b> Un pitido que se repite rápidamente aumentando el volumen, dos luces amarillas fijas</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantenga pulsado durante cinco segundos para apagar.</li> <li>2. Mantenga pulsado dos segundos para volver a encender.</li> <li>3. Si la terapia sigue sin funcionar, contacte a su representante de 3M.</li> </ol>
<p><b>Ciclo de vida del dispositivo caducado</b> Tres luces indican que el ciclo de vida ha terminado. Se oirá un pitido repetido durante 15 segundos, y a continuación la unidad se apagará.</p> 	<p>El ciclo de vida de la Unidad de Terapia Prevena 125 es de 192 horas (ocho días).</p> <p>Informe al profesional de salud tratante o al cuidador, que la terapia ha finalizado.</p>

# Unidad de Terapia 3M™ Prevena™ Plus 125 - Indicadores y Alertas

Tipo de alerta	Cómo solucionarlo
<p><b>Alerta de bloqueo</b></p>  <p>Alerta sonora de bloqueo que emitirá dos pitidos que se repetirán cada 15 segundos</p> <p>Una luz LED amarilla se encenderá encima del símbolo de bloqueo.</p>	 <p>Compruebe si el canister está lleno</p> <p>Verifique si el tubo está doblado</p> <p>Asegúrese que la abrazadera del tubo esté abierta</p>
<p><b>Alerta de filtración</b></p>  <p>La alerta de filtración emitirá dos pitidos que se repetirán cada 15 segundos</p> <p>Una luz LED amarilla se encenderá encima del símbolo de fuga.</p>	 <p>Confirme que el canister esté bloqueado de manera segura en la unidad de terapia. Cuando se instale el canister, se oirá un click</p> <p>Compruebe que los conectores de los tubos estén bien encajados y bloqueados</p> <p>A través de la tela, presione bien sobre el sello adhesivo por todo el perímetro, para asegurar el sellado</p> <p>Utilice los dedos para alisar cualquier pliegue o arruga</p> <p>Utilice 3M™ Prevena™ Patch Strips o el sobrante de tela, a lo largo del borde exterior de la tela, para sellar las filtraciones</p>
<p><b>Alerta de batería baja</b></p>  <p>La alerta emitirá dos pitidos que se repetirán cada cuatro minutos</p> <p>Una luz LED amarilla se encenderá en el indicador de nivel de batería.</p>	 <p>Encendido conectado</p> <p>Cargando</p> <p>Completamente cargado</p> <p>Carga completa (quedan aprox. 9 horas)</p> <p>Carga media (quedan aprox. 2 a 7 horas)</p> <p>Carga baja (quedan aprox. 2 horas de terapia). Cargue la unidad inmediatamente para evitar una alteración en la terapia</p>
<p><b>Alerta de falla del sistema</b></p>  <p>Todos los LEDs parpadean y se emiten dos pitidos cada 15 segundos</p> <p>PREVENA PLUS™ 125 THERAPY UNIT</p>	<p>Apague la unidad y luego enciéndala</p>  <p>Continuar con la terapia</p> <p>Contactar a su representante 3M</p>
<p><b>Silenciar botón de alerta</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante una situación de alerta sonora, pulse y mantenga presionado por tres segundos el centro del botón Silenciar Alerta para pausar la alerta sonora durante dos minutos.</li> <li>• Al presionar el botón de Silenciar Alerta, este se iluminará para indicar que se ha pausado la alerta.</li> <li>• La alerta volverá a activarse después de dos minutos a menos que se haya corregido la situación de alerta.</li> </ul>
<p><b>Terapia finalizada</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se encenderá un LED amarillo fijo en la parte superior del Indicador de Duración de la Terapia.</li> <li>• La unidad de terapia emitirá ocho pitidos, seguidos de un pitido continuo durante cinco segundos y, a continuación, la unidad se apagará.</li> <li>• Si la unidad de terapia ha completado su ciclo y se intenta volver a encender la terapia, la unidad emitirá una alerta durante tres segundos y luego se apagará.</li> <li>• Notificar al médico tratante o al cuidador de la finalización de la terapia.</li> </ul>



División de Soluciones Médicas  
3M Latinoamérica

**Nota:** Existen indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información de seguridad específicas para estos productos y terapias. Sírvase consultar a un profesional de la salud y revise las instrucciones de uso del producto antes de su utilización. Este material está dirigido a profesionales de la salud.

© 2023 3M. Todos los derechos reservados. 3M y las otras marcas mencionadas son marcas y/o registradas. Prohibido el uso no autorizado.