

Vitrebond

Ionómero de vidrio para base o liner



■ Descripción

Ionómero de vidrio para base/liner cavitario, que combina la comodidad de la foto polimerización con la liberación de flúor y alta fuerza de adhesión característica de los ionómeros de vidrio.

■ Ventajas

- Su rápida técnica, ya que es foto polimerizable y excelentes características de manipulación, permite una colocación rápida y sencilla.
- Forma una fuerte adhesión a la dentina, sellando el diente para reducir la incidencia de micro filtraciones, ayudando así a reducir la sensibilidad post-operatoria.
- Produce zonas de inhibición contra las bacterias que comúnmente se encuentran en la cavidad oral.
- Liberación continua de flúor para la protección del diente, aún tiempo después de terminada la restauración.
- Radiopaco que permite un fácil diagnóstico
- No necesita pre tratamiento de la dentina
- Alta fuerza de compresión y tensión pudiendo usarse bajo restauraciones de amalgama y resinas compuestas

■ Indicaciones de Uso

Base/Liner, bajo restauraciones directas e indirectas, incluyendo resinas compuestas, amalgamas, restauraciones cerámicas y metálicas.

■ Instrucciones de Uso

Antes de dispensar, agitar el frasco para que el polvo se disperse. Cerrar herméticamente los dos frascos (polvo y líquido) después de usarlos.

Proporción de mezcla 1 de polvo y 1 de líquido para obtener una óptima consistencia.

Foto polimerización por 30 segundos

■ Presentación

Kit Introductorio

9 g de polvo

5.5 ml de líquido

Cuchara, block de mezcla

Reposición

Líquido, 5.5 ml

Actualización Nov 2017