

Modo de aplicación en **Brazo Corto**



Modo de aplicación en **Bota Corta**



El yeso **Scotchcast Plus** debe ajustarse como un guante. Las inmovilizaciones con el yeso **Scotchcast Plus** deberán extenderse hasta los límites anatómicos adecuados.

Utilización sugerida de **Scotchcast Plus**

Brazo Corto	Scotchcast Plus	Syncast	Stockinet
	1 rollo de 7,6 cm. (Código 82003) 	1 rollo de 5,1 cm. (Código MW02) 	MS 03 de 7,5 cm. (45 cm)
Brazo Largo	Scotchcast Plus	Syncast	Stockinet
	2 rollos de 7,6 cm. (Código 82003) 	1 rollo de 7,6 cm. (Código MW03) 	MS 03 de 7,5 cm. (60 cm)
Bota Corta	Scotchcast Plus	Syncast	Stockinet
	3 rollos de 10 cm. (Código 82004) 	2 rollos de 7,6 cm. (Código MW03) 	MS 04 de 10 cm. (75 cm)
Bota Larga	Scotchcast Plus	Syncast	Stockinet
	3 rollos de 10 cm. (Código 82004) 2 rollos de 12,7 cm. (Código 82005) 	3 rollos de 7,6 cm. (Código MW03) 	MS 04 de 10 cm. (95 cm)
Tórax	Scotchcast Plus	Syncast	Stockinet
	5 rollos de 12,7 cm. (Código 82005) 	2/3 rollos de 7,6 cm. (Código MW03) 	MS 06 de 15 cm. (60 cm)


» Cantidades sugeridas en base a un paciente de 80 kg. de peso y 1,75 m. de altura.

Para mayor información acerca de los productos, por favor comuníquese con Atención al Cliente.

3M Medical Division Atención al Cliente: (011) 4339-2585 / 3msalud-ar@mmm.com

Inmovilización

Scotchcast Plus
Stockinet
Syncast

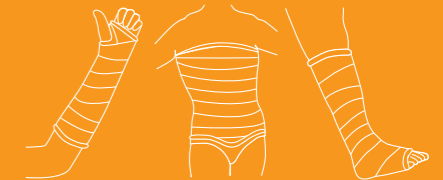

3M Medical Division

Inmovilización

Línea de suministros y accesorios para inmovilización



La venda para inmovilización **3M Scotchcast Plus** permite brindarle al paciente la movilidad que necesita para regresar a sus actividades diarias normales más rápidamente.

Cuando se inmoviliza un fractura ósea con la venda para inmovilización **Scotchcast Plus**, el molde está listo para soportar el peso en sólo 20 minutos en lugar de 24 a 48 hs. que tarda el yeso paris.

› Más limpio y más fácil de usar

Luego de proteger la extremidad que se va a inmovilizar de la manera acostumbrada, simplemente seleccione el ancho apropiado de la venda para su paciente, sumerja el rollo en agua y envuelva. (Debe usar guantes mientras maneja la venda ya que la resina se adhiere a la piel).

La venda **Scotchcast Plus** se desenrolla suave y uniformemente. El diseño del tejido le permite plegar o doblar la venda para adaptarla en forma cómoda como de guante a cualquier contorno. El acabado suave no se enganchará con la ropa o rasguñará la piel.

A diferencia del yeso paris, la inmovilización con la venda **Scotchcast Plus** deja el área limpia. Usted no tiene que proteger su área de trabajo y hay muy poco que limpiar.

Scotchcast Plus

Beneficios y características

› Un molde más cómodo

Usted puede terminar un molde con venda para inmovilización **Scotchcast Plus** más rápidamente que con yeso. Debido a que el molde adquiere fuerza rápidamente y es muy liviano, los pacientes se sienten más cómodos.

Sus pacientes podrán comenzar a moverse más pronto, lo que los devuelve a su actividad normal más rápido. El movimiento pronto y continuo ayuda también a prevenir la rigidez de las articulaciones.

› Liviano y aún así, más duradero

Mientras que la construcción con fibra de vidrio hace a la venda para inmovilización **Scotchcast Plus** más liviana para la movilidad más fácil del paciente, también la hace fuerte y duradera para minimizar la rotura del molde, reduciendo las reparaciones costosas o la reinmovilización.

Reduce la necesidad de visitas adicionales entre citas programadas.

› Con costo comparable al yeso paris y/o tradicional

A pesar de que un rollo de venda para inmovilización **Scotchcast Plus** tiene un precio más alto que la venda de yeso tradicional, su costo por tratamiento puede ser igual o menor. Usted puede ahorrar en recubrimiento protector. Se utilizan menos rollos de venda para inmovilización **Scotchcast Plus** por aplicación que rollos de yeso común.

Adicionalmente, gracias a la estructura de **Scotchcast Plus** no necesitará realizar reparaciones en el molde lo que se traduce en ahorro de tiempo y por consiguiente en menores costos.

Características	
1. Liviano	6. Alta resistencia al golpe
2. Radiolúcido	7. No requiere accesorios
3. Resistente al agua	
4. Poco voluminoso	
5. Poroso	

Inmovilización sintética básica

Modo de preparación

Se debe utilizar guantes mientras se efectúa la colocación con el fin de evitar que la resina sintética se adhiera a la piel.

Paso 1



Procedimiento

Aplique únicamente **Stockinet 3M** y protector para prominencias óseas **Syncast 3M** en la forma convencional para facilitar su mejor secado si debe ser sumergido al agua.

Paso 2



Procedimiento

Sumerja un rollo por vez de **Scotchcast Plus** en agua a temperatura ambiente (21° a 25° C). Si sumerge el rollo en agua, lo aprieta tres (3) veces y lo retira y tiene tres (3) minutos para colocarlo. Para prolongar el tiempo de colocación se sumerge el rollo en el agua sin apretar y se lo retira inmediatamente: esto le dará un tiempo de colocación de cinco (5) minutos. El agua caliente acorta el tiempo de colocación y el agua fría lo prolonga. Si procede sin humedecer el rollo en agua, la humedad ambiental le dará 10 minutos para poder trabajar.


Paso 3



Procedimiento

Aplique la venda en forma de espiral, la estructura de su trama permite estirarla para una mejor conformación del contorno. Se puede cambiar de dirección sin hacer plegados y sin que se produzcan arrugas.

Paso 4

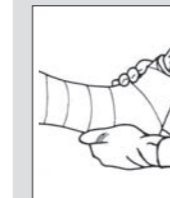

Procedimiento

Puede moldearlo de acuerdo a como lo desee.

Déle a la venda la tensión definitiva porque no cede ni encoje.