

## Elipar™/Elipar™ S10

- (en)** 10-mm Light Guide
- (fr)** Guide faisceau de 10 mm de diamètre
- (es)** Guía de luz de 10 mm

Filtek™ Z250 A3 (3M ESPE)	Tetric® EvoCeram A3 (Ivoclar Vivadent)
Filtek™ P60 A3 (3M ESPE)	Grandio® A3 (Voco)
CeramX™ duo E3 (Dentsply)	Venus™ A3 (Heraeus Kulzer)
QuiXfil™ (Dentsply)	Charisma® A3 (Heraeus Kulzer)
TPH® 3 A3 (Dentsply)	Estelite® Σ A3 (Tokuyama)
EsthetX® A3 (Dentsply)	



**(en) Composite filling materials which can be used with an exposure time of 5 sec**

If it is possible to place the light guide at a minimum distance, the composite filling materials listed here as well as lighter colors (A0, A1, A2, A3, B1, B2, C1, Bleach) of the same product with the same or lower opacity may be cured in 5 sec.

Date of the Information September 2011



**(fr) Matériaux d'obturation composite permettant un temps d'exposition de 5 secondes**

S'il est possible de rapprocher le guide faisceau au maximum, les matériaux d'obturation composite mentionnés ici, tout comme les teintes les plus claires (A0, A1, A2, A3, B1, B2, C1, Bleach) du même produit avec une opacité égale ou inférieure, peuvent être polymérisés en 5 secondes.

Mise à jour de l'information septembre 2011



**(es) Materiales de obturación (composites) que permiten un tiempo de exposición de 5 segundos**

Si la guía de luz se puede situar a una distancia mínima, los materiales de obturación (composites) mencionados así como los colores más claros (A0, A1, A2, A3, B1, B2, C1, Bleach) del mismo producto con la misma opacidad o inferior pueden endurecerse en 5 segundos.

Estado de la información Septiembre 2011



**3M ESPE AG**  
Dental Products  
D-82229 Seefeld – Germany

**3M ESPE**  
Dental Products  
St. Paul, MN 55144-1000 U.S.A.

Charisma, CeramX, Estelite, EsthetX, Grandio, Tetric, TPH, QuiXfil and Venus are registered trademarks. 3M, ESPE, Elipar and Filtek are trademarks of 3M or 3M ESPE AG.

© 3M 2011. All rights reserved.



