

Ayudándole a usarlo correctamente

Uso de la mascarilla quirúrgica y respirador de la pieza facial filtrante para partículas para el cuidado de la salud 1870+ 3M™ Aura™

Aplicación


Siempre lea y siga las instrucciones para el usuario.



1 Retire el respirador del empaque y sosténgalo con las bandas hacia arriba. Coloque la banda inferior debajo de las solapas centrales junto al aviso de "ATENCIÓN."



2 Abra completamente los paneles superior e inferior, doblando la pieza de la nariz alrededor del pulgar en el centro de la espuma. Las bandas se deberán separar cuando los paneles estén abiertos. Asegúrese que el panel inferior está desdoblado y completamente abierto.

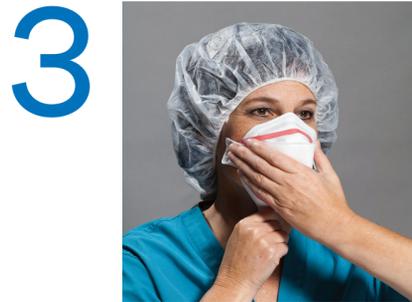

3 Coloque el respirador en su cara de modo que la espuma descansa en su nariz y el panel inferior esté asegurado sobre su barbilla.



4 Jale la banda superior sobre su cabeza y colóquela alto sobre su coronilla. Luego, jale la banda inferior sobre su cabeza y colóquela alrededor del cuello y por abajo de las orejas.



5 Para obtener un ajuste confortable jale el panel superior hacia el puente de la nariz y el panel inferior por abajo de la barbilla.

Asegúrese de que el cabello, el vello facial, las joyas y las ropas no se interpongan entre su cara y el respirador para no interferir en el ajuste.



6 Coloque las puntas de los dedos de ambas manos sobre la pieza de la nariz metálica. Usando los dedos de ambas manos, moldee el área de la nariz para adaptarla a la forma de su nariz empujando hacia adentro al mismo tiempo que mueve las puntas de los dedos hacia abajo por ambos lados de la pieza de la nariz.

Nota: Utilice siempre las dos manos cuando moldee la pieza de la nariz. Apretar la pieza de la nariz con una sola mano puede causar un ajuste inadecuado y menor efectividad del respirador.



7 Coloque una o ambas manos completamente sobre el panel del medio. Inhale y exhale bruscamente. Tenga cuidado de no cambiar la posición del respirador al hacerlo. Si el aire se fuga alrededor de su nariz, vuelva a ajustar la pieza de la nariz como se describe en el Paso 6. Si el aire se fuga alrededor de los bordes del respirador, ajuste los paneles y la posición de las bandas y asegúrese de que los bordes del respirador se adapten firmemente contra la cara. **Si no puede lograr un sellado adecuado, no ingrese al área contaminada. Consulte a su supervisor.**

Realice un control de sellado por el usuario

Verifique el sellado del respirador cada vez que lo utilice.

Remoción

Puede llevarse a cabo usando una o dos manos



1 Sin tocar la pieza facial del respirador, eleve lentamente la banda inferior desde alrededor del cuello hacia la cabeza.



2 Levante la banda superior. No toque el respirador.



3 Almacene o deseche según la política de control de infección del establecimiento.

3M Health Care
Medical Solutions Division
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 U.S.A.
1-800-228-3957
3M.com/Medical

3M y Aura son marcas comerciales de 3M, utilizadas bajo licencia en Canadá.
Recicle. Impreso en los EE. UU.
© 3M 2020 Todos los derechos reservados.
70-2010-9154-6

⚠️ ADVERTENCIA

Estos respiradores ayudan a proteger contra determinadas partículas del aire. Antes de emplearlos, el usuario debe leer y entender las Instrucciones de uso que se suministran como parte del empaque del producto. Se debe poner en práctica un programa escrito de protección respiratoria que cumpla con todos los requisitos del Código de reglamentos federales 1910.134 y la norma 29 de la Administración de la seguridad y la salud ocupacionales (OSHA), incluida la capacitación, la prueba de ajuste y la evaluación médica. En Canadá, se deben cumplir con los requisitos de las normas Z94.4 de la CSA o los requisitos de jurisdicciones aplicables, según corresponda. El uso indebido puede dar lugar a enfermedad o muerte. Para un uso correcto, consulte a su supervisor y las Instrucciones del empaque o llame a la Línea de ayuda para el cuidado de la salud de 3M en EE. UU. al 1-800-228-3957 y en Canadá al 1-800-563-2921.