

3M™ Aura™ 防護マスク 9211+N95 / 9210+N95 装着方法



米国規格NIOSH N95認定品

1 マスクの準備



裏側を上にしてしめひもが見えるように持ちます。

2 立体状に形を作る



ノーズクリップと下面をつまみます。ノーズクリップを真ん中で2つ折りにします。

3 片手でマスクを持つ



親指と中指でマスクを軽く持ち、しめひもが下に垂れるように手を返します。2本のしめひもに手を通します。

4 アゴを乗せる



マスクにアゴを乗せます。

5 マスクを着ける



2本のしめひもを一緒に頭の上から首の後ろへ回します。

6 しめひもを正しい位置に



上側のしめひもに指をかけて頭頂部にかけます。しめひものねじれを修正します。

7 マスクを整える



上下の面を同時に引っ張り、マスクを整えます。鼻やアゴが覆われるようにしてください。

8 ノーズクリップの調整



両手の指で、鼻の形に合うようにノーズクリップを強く押し付けます。鼻の周りからの漏れ込みを防止するために、必ず行ってください。

9 密着性の確認



両手でマスクの表面を覆い、息を強く吐き出します。マスク周辺から空気が漏れなければOKです。漏れる場合にはノーズクリップやマスクの位置を調整してください。

マスクの外し方

防護マスク不織布表面には、汚染物質が付着している可能性があります。なるべくマスク本体に触れないように注意しながら外してください。

下側のしめひもから



先に下側のしめひもを外してから、上側のしめひもを外します。

そのまま廃棄袋へ



マスク本体に触れないように注意しながら廃棄袋へ捨ててください。

マスクを外した後に

- 手を洗う
- 顔を洗う
- うがいをする

3M, Auraは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部
<http://go.3M.com/psd>

Please Recycle. Printed in Japan. ©3M 2018. All Rights Reserved.

カスタマーコールセンター

 0570-011-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

OHS-964-D(0218)

装着方法は携帯でも確認できます。
<http://go.3M.com/48U>

スマートフォン、一部機種ではご利用いただけません。

